


Rekonditioneringsanvisning

JAZZ 510/610



Rollatorn bör kontrolleras regelbundet, enligt nedanstående anvisningar. Serviceintervaller bestäms av hur rollatorn använts och vilka påfrestningar den utsatts för. För ytterligare information se avsnitt Underhåll i huvudmanualen för produkten eller kontakta din Dolomiteleverantör.

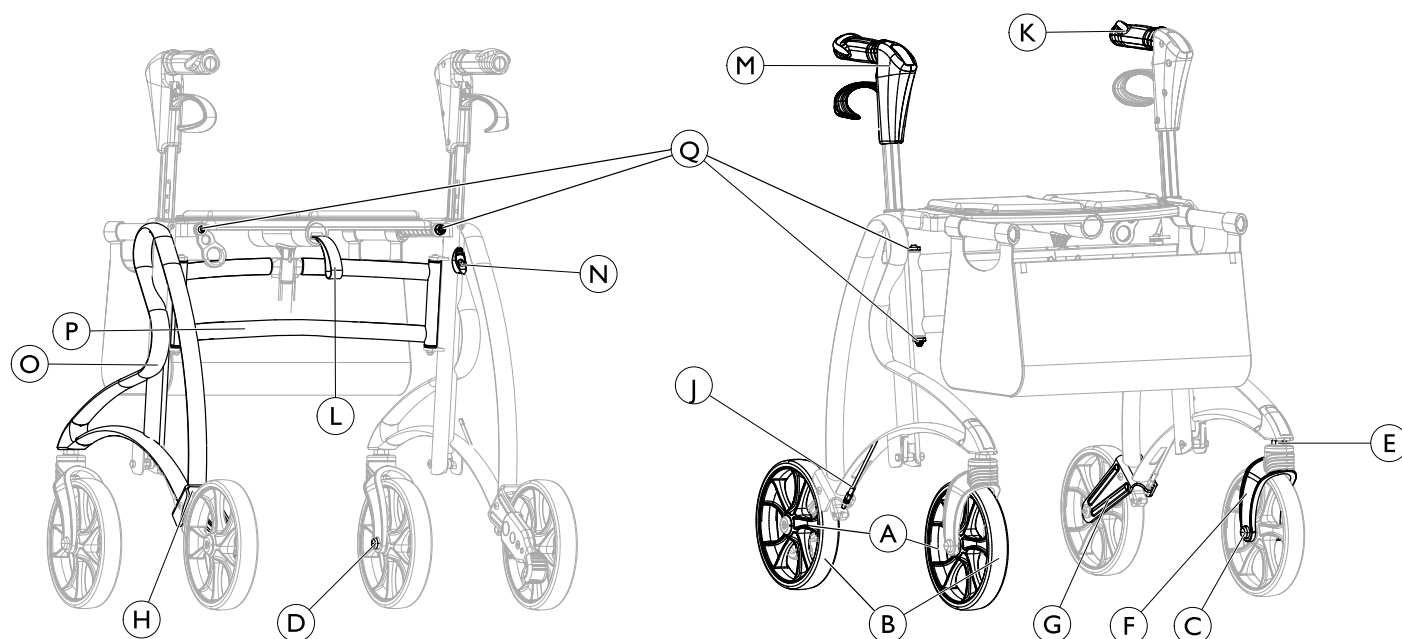

	Kontrollpunkter:	Åtgärd:	Kommentar	OK
1	Om hjulen Ⓐ är skadade	Ersätt hjul och låsmutter	Ersätt alltid låsmutter vid byte av hjul.	
2	Om slitbanan Ⓑ är skadad eller utsliten	Ersätt hjul och låsmutter	Ersätt alltid låsmutter vid byte av hjul.	
3	Om hjulbultarna i framgaffeln Ⓒ är lösa	Dra åt bultar		
4	Om skruvarna i bakgaffeln Ⓓ är lösa	Dra åt skruvar		
5	Om framgaffeln är lös i stativet Ⓔ	Dra åt framgaffeln	Åtdragsmoment 60 Nm.	
6	Om framgaffeln Ⓕ är skadad	Ersätt framgaffel	Åtdragsmoment 60 Nm.	
7	Om bakhjulsgaffeln Ⓖ har mekaniska skador	Kassera rollatorn		
8	Om bromsklacken Ⓗ är sliten	Ersätt bromsklack	Använd permanent låsvätska.	
9	Om avståndet mellan klack och hjul Ⓖ överstiger 2 mm	Justera avstånd	Avståndet får ej överstiga 2mm.	
10	Om bromsvajern Ⓙ går trögt	Ersätt vajer och hölje		
11	Om handtagsgreppen Ⓚ sitter löst eller är skadat	Ersätt handtagsgrepp		
12	Om fällspärrbandet Ⓛ är skadat	Ersätt sitsen		
13	Fälledsmekanism ; Om rollatorn inte låser/stannar i utfällt läge	Ersätt sitsen		
14	Om bromseffekten inte är fullgod	Ersätt körhandtag Ⓜ	Kontrollera först avstånd enl 9	
15	Om körhandtagen Ⓜ är skadade	Ersätt körhandtag		
16	Om handtagsrören ej låses vid höjjustering Ⓝ	Ersätt körhandtag		
17	Om mekaniska skador uppstått på ramen Ⓞ eller grinden Ⓟ	Kassera rollator		
18	Om skruvarna till sits och grind Ⓠ är lösa	Dra åt skruvar		
19	Om ryggbandet är skadat	Ersätt detta	Ryggband är tillval och inte standard på rollatorn.	
20	Om skruvarna på ryggbandsfästena är lösa	Dra åt skruvar	Ryggband är tillval och inte standard på rollatorn.	