

USER MANUAL

VICAIR[®]

LIBERTY



relief by air

Bästa kund,


tack för att du har valt en produkt från Vicair®. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta produktens enkelhet, pålitlighet och enastående egenskaper. För snabb installation av dynan kan du använda dig av den medföljande snabbinstallationsguiden. Se även till att läsa och förstå denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk. Spara både snabbinstallationsguiden och denna bruksanvisning för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren i ditt land för mer information eller beställning av bruksanvisningar. Besök vicair.com för information om återförsäljare.

INTRODUKTION

Vicair Liberty är en sittdyna (för rullstolar) för användare som är ute efter komfort i kombination med en låg till medelhög nivå av stöd och förebyggande av trycksår.

HUVUDKOMPONENTER

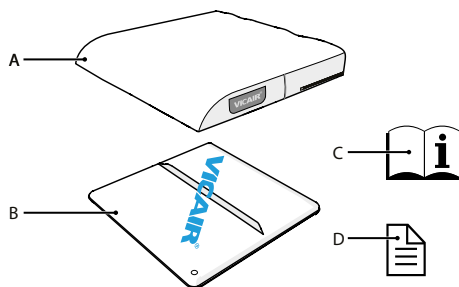

- A** Dynöverdrag
- B** Dyna
- C** Bruksanvisning
- D** Snabbinstallationsguide
(Quick installation guide)

ALLMÄNNA PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn:	Vicair Liberty
Tillverkad av:	Vicair B.V., Nederländerna
Garanti:	24 månader
Material:	endast latexfria
Dyna:	polyvinylklorid
Stoppning:	luftfyllda SmartCells™ (luftkuddar) och silikonolja

Dynöverdrag

Dynöverdrag Comfair Cover: Stickat elastiskt polyestertyg, med undersida i polyestertyg med antiglidbehandlad polyuretanyta

Dynöverdrag Incontinence Cover: Elastiskt tyg med vätskeresistent polyuretanyta som andas och undersida i polyestertyg med antiglidbehandlad polyuretanyta

Alla överdrag tål maskintvätt. Överdragen uppfyller kraven i EN1021-1, 1021-2 och CAL117.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

En Vicair-sittdyna får endast användas som sittdyna. All annan användning av denna produkt anses vara felaktig. Vicair B.V. kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av felaktig användning, icke avsedd användning eller vårdslöshet. Se till att hela denna bruksanvisning har lästs och förstås.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att Vicair Liberty installeras under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Varning! Svanskotan och bäckenbenet får inte vidröra dynans botten ("bottoming out").

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out") ska ske första gången dynan installeras och därefter ske regelbundet (minst en gång i månaden).

Varning! Använd inte dynan som dusch- eller baddyna.

Varning! Kontrollera regelbundet huden avseende rodnad, särskilt under de första dagarna. Rådfråga ansvarig terapeut eller hjälpmedelskonsulent om rodnad som inte försvinner inom 15 minuter uppstår.

Varning! För närvarande föreligger inga testdata avseende säker användning av Vicair-sittdynor i motorfordon. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av sittdynor i motorfordon.

Varning! Om produkten förorenas med kroppsvätskor eller överförs till annan brukare måste den desinficeras för att undvika korskontaminering.

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage och tömda luftkuddar var tredje månad. Fortsätt inte att använda produkten om den är allvarligt skadad eller ett stort antal luftkuddar är tömda. Rådgör med din återförsäljare.

Varning! Sänk inte ner denna dyna i vatten eller annan vätska och tvätta den inte tvättmaskin.

Försiktighet! Använd eller förvara inte produkten nära öppen eld eller värmekälla som avger hög temperatur.

Försiktighet! Ångengör eller autoklavera inte produkten. Produkten tål inte stark värme eller högt tryck. Om angivna rengöringsanvisningar inte följs kommer livslängden för produkten och/eller produktens överdrag med stor sannolikhet att förkortas.

Försiktighet! Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra dynan.

Försiktighet! Säkerställ att dynan inte kan komma i kontakt med hjulens ekrar.

INSTALLATION

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att Vicair Liberty installeras under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Försiktighet! Säkerställ att dynan inte kan komma i kontakt med hjulens ekrar.

Observera! Använd alltid dynan med överdrag. **Observera!** Säkerställ att rullstolens sits är ren och avfettad.

Tips: Om användning utan kardborrband föredras kan dessa avlägsnas. Observera att banden som sitter på undersidan av dynöverdraget inte kan avlägsnas.

Gör följande när du installerar Vicair Liberty

Dessa steg motsvarar installationsbilderna på snabbinstallationsguiden:

- Kontrollera dynans storlek. Dynans bredd (X) ska motsvara sitsens bredd. Om dynan vilar mot armstöd eller sidoskydd kan den vara upp till 2,5 cm (1") bredare. Dynans djup (Y) ska motsvara sitsens bredd.
- Kontrollera om överdragets storlek motsvarar dynans storlek.
- För in dynan i överdraget. Ventilen ska vara i vänster framhörn, riktad uppåt. På dynan undersida är framsidan indikerad.
- Stäng blixtlåset. Se till att dynan inte skadas.

- Avlägsna skyddstejpen från kardborrbanden på dynans överdrag.
- Placera dynan i sitsen och tryck ner den ordentligt.
- Sitt på dynan under några minuter så att luften i den kan formas efter din kropp och vikt.
- Justera fotstöd vid behov.

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out"):

Varning! Svanskotan och bäckenbenet får inte vidröra dynans botten ("bottoming out").

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out") ska ske första gången dynan installeras och därefter ske regelbundet (minst en gång i månaden).

- Kontrollera att ingen kroppskontakt med dynans botten föreligger efter att ha suttit på dynan i cirka 5 minuter.
- Samtidigt som du lutar dig framåt, ska du låt din terapeut eller hjälpmedelskonsulent skjuta in en hand mellan din bakdel och Vicair-dynan. Låt terapeuten eller hjälpmedelskonsulents kontrollera om din bakdel stöds av minst 2,5 cm (1") SmartCells (luftkuddar). På detta sätt säkerställs att sittbenen inte kommer i kontakt med rullstolens sits.
- Använd inte dynan om kroppskontakt med dynans botten uppstår. I de flesta fallen löser man problemet genom att använda en annan dynmodell eller -storlek.

ANVÄNDNING

Varning! Använd inte dynan som dusch- eller baddyna.

Kontroll av hudrodnad

Varning! Kontrollera regelbundet huden avseende rodnad, särskilt under de första dagarna. Rådfråga ansvarig terapeut eller

hjälpmedelskonsulent om rodnad som inte försvinner inom 15 minuter uppstår.

Förutsättningar för användning och förvaring

- **Högsta brukarvikt:** 150 kg
- **Temperatur:** Lägsta: -10 °C, högsta: 50 °C
- **Användning på hög höjd**
Observera! Vicair B.V. avråder från användning av dynan på platser 2 400 m (8 000 ft) över havsytan eller 50 m (164 ft) under havsytan. Då varje enskild SmartCell (luftkudde) är fylld med luft kan dynans egenskaper förändras om den används på hög höjd, exempelvis under en flygresä.
- **Luftfuktighet:** Lägsta: 0 %, högsta 100 %

Användning av Vicair-sittdynor i motorfordon

Varning! För närvarande föreligger inga testdata avseende säker användning av Vicair-sittdynor i motorfordon. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av sittdynor i motorfordon.

Som ett alternativ till Vicair-sittdynan kan Vicair AllRounder (som kan fästas på användarens kropp) användas om ytterligare skydd behövs vid transport.

Återanvändning - Överföring av produkten till en annan användare

Produkten passar för upprepad användning. Antalet gånger den kan användas styrs av hur ofta och på vilket sätt den används. Produkten måste rengöras och desinficeras grundligt innan en annan person tillåts att använda den. Se kapitlet "Underhåll och rengöring" för anvisningar.

Byte av dynöverdrag

Vid normal användning rekommenderar Vicair B.V. att dynöverdraget byts ut årligen. Extra överdrag kan köpas separat.

Bortskaffning

Bortskaffning och återvinning av använda enheter och förpackningar måste överensstämma med gällande lagar och regler. För att undvika föroreningar ska du säkerställa att produkten är rengjord innan du slänger den.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage och tömda luftkuddar var tredje månad. Fortsätt inte att använda produkten om den är allvarligt skadad eller ett stort antal luftkuddar är tömda. Rådgör med din återförsäljare.

Varning! Sänk inte ner denna dyna i vatten eller annan vätska och tvätta den inte tvättmaskin.

Försiktighet! Ångrengör eller autoklavera inte produkten. Den tål inte stark värme eller högt tryck. Om angivna rengöringsanvisningar inte följs kommer livslängden för produkten med stor sannolikhet att förkortas.

Försiktighet! Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra dynan.

Att rengöra Vicair Liberty

- **Rengöring av överdraget till Vicair Liberty**
Dynöverdraget tål maskintvätt ut och in. Följ tvättråden på etiketten som sitter på insidan av överdraget.



- **Rengöring av Vicair Liberty-dynan**
Tvätta dynan med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Maskintvätta inte dynan och sänk inte ner den i vatten eller annan vätska.



Desinfektering av Vicair Liberty

Varning! Om produkten förorenas med kroppsvätskor eller överförs till annan brukare måste den desinficeras för att undvika korskontaminering. Rengör dynan och överdraget enligt anvisningarna ovan. Använd företrädesvis ett antibakteriellt rengöringsmedel. Efter rengöring ska du spreja dynan och överdraget med desinfektionsmedel.

GARANTI

Vicair B.V. erbjuder en begränsad garanti mot defekter i utförande och material under förutsättning att produkten har använts på avsett sätt. Eventuella skador som uppkommer till följd av icke avsedd användning, felaktig hantering, felaktig rengöring eller vårdslöshet omfattas inte av denna garanti.

Garantiperiod

Från inköpsdatum: 24 månader.

Skulle ett fel i material eller utförande upptäckas inom ovan angiven garantitid kommer Vicair B.V. på eget initiativ att utan kostnad reparera eller byta ut produkten. Dynöverdraget omfattas inte av denna garanti. Kompensation till följd av att en utställd garanti inte efterlevs är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Skada till följd av att en garanti inte efterlevs ska under inga omständigheter omfatta följdskador eller överstiga priset på den icke avtalsenliga varan.

Frågor?

Kontakta Vicair B.V. via info@vicair.com eller kontakta Vicair-återförsäljaren i ditt land.

Hyvä asiakas!


Kiitos Vicair®-tuotteen valinnasta. Olemme varmoja, että arvostat sen yksinkertaisuutta, luotettavuutta ja erinomaista vaikutusta. Asennuksen nopeuttamiseksi voit käyttää tyynyn mukana toimitettua pika-asennusopasta. Lue ja omaksu lisäksi tämä käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä sekä pika-asennusopas että tämä ohje tulevaa tarvetta varten.

Ota yhteys oman maasi jakelijaan, kun tarvitset lisätietoa tai haluat tilata (lisää) käyttöohjeita. Lue jakelijatiedot osoitteesta vicair.com.

JOHDANTO

Vicair Liberty on (pyötuoli)tyyny ja tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat mukavuutta sekä lievää tai keskinkertaista tukea ja painehaavojen ehkäisyä.

PÄÄOSAT

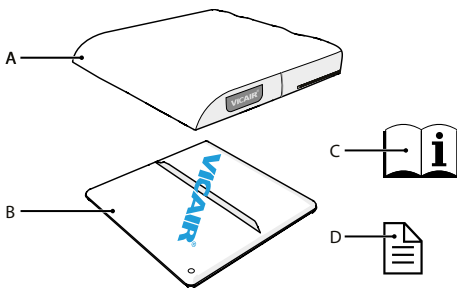

- A Tyynynpäällinen
- B Tyyny
- C Käyttöohje
- D Pika-asennusopas (Quick installation guide)

Tuotenimi:	Vicair Liberty
Valmistaja:	Vicair B.V., Alankomaat
Takuu:	24 kuukautta
Käytetyt materiaalit:	Täysin lateksittomat
Tyyny:	Polyvinyylikloridi
Täyte:	Ilmatäytteiset SmartCells™-ilmakartiot ja silikoniöljy

Tyynynpäälliset:

Comfair Cover -päällinen: Joustava neulottu polyesterikangas, jonka polyesterikangaisessa pohjassa on polyuretaanista valmistettu liukumisenestopinnoite.

Incontinence Cover -päällinen: Elastinen kuitu, joka on pinnoitettu vedenpitävällä hengittävällä polyuretaanilla, pohja polyesterikangasta, jossa polyuretaanista valmistettu liukumisenestopinnoite.

Kaikki päälliset ovat konepestäviä. Päälliset täyttävät standardit EN 1021-1, 1021-2 ja CAL 117.

VAROTOIMET JA TURVAOHJEET

Vicair-istuintyynyä saa käyttää ainoastaan istuintyynynä. Muunlainen tuotteen käyttö katsotaan virheelliseksi käytöksi. Vicair B.V. ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä tai väärästä käytöstä tai laiminlyönnistä. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän ohjeen kokonaisuudessaan.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että Vicair Liberty -tyyny asennetaan hoitajan tai apuvälineen luovuttajan välittömässä valvonnassa.

Varoitus! Häntäluusi ja lantion luittesi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen tarkistaminen on tehtävä ensimmäisellä käyttökerralla ja säännöllisesti sen jälkeen (ainakin kerran kuussa).

Varoitus! Älä käytä suihku- tai kylpytyynynä.

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti

erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana. Mikäli punoitusta ilmenee eikä se häviä 15 minuutin kuluessa, ota yhteyttä hoitajaasi tai apuvälineen luovuttajaan.

Varoitus! Vicair-istuintyynyjen käytöstä moottoriajoneuvoissa ei ole tällä hetkellä olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme suosittele istuintyynyyn käyttöä moottoriajoneuvoissa.

Varoitus! Jos tyyny on likaantunut kehon nesteistä ja eritteistä ja se luovutetaan toiselle käyttäjälle, se on desinfioitava ristikontaminaation ehkäisemiseksi.

Varoitus! Tarkista tuotteen kuluminen ja ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen kuukauden välein. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on tyhjentyneet, älä jatka tuotteen käyttöä. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Varoitus! Älä upota tätä tyynyä veteen tai muuhun nesteeseen äläkä pese sitä pesukoneessa.

Huomio! Älä käytä tai jätä tuotetta avotulen lähelle tai kuumaa lämmönlähteen lähelle.

Huomio! Älä pese tuotetta höyrystämillä äläkä laita sitä autoklaaviin. Tuote ei kestä korkeata lämpöä eikä painetta. Jollei annettuja puhdistusohjeita noudateta, on todennäköistä, että tuote ja/tai sen päällinen kuluvat käytössä nopeammin.

Huomio! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu teräspintojen väliin.

ASENNUS

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että Vicair Liberty -tyyny asennetaan hoitajan tai apuvälineen luovuttajan välittömässä valvonnassa.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu teräspintojen väliin.

Huomautus! Käytä tyynyä aina päällisen kanssa.

Huomautus! Tarkista, että pyörätuolin istuin on puhdas ja tahraton rasvasta.

Vinkki: Jollei halua käyttää tarranauhaa, voit irrottaa tarranauhat. Huomaa, ettei tyynynpäällisen pohjaan kiinnitettyjä nauhoja voi irrottaa.

Asenna Vicair Liberty seuraavissa vaiheissa.

Vaiheet vastaavat pika-asennusoppaan asennuskuvia.

- Tarkista tyynyn koko. Tyynyn ja istuimen leveyden (X) tulee olla sama. Kun käsinojat tai sivusuojat tukevat tyynyä, tyyny voi olla enintään 2,5 cm leveämpi. Tyynyn ja istuimen syvyyden (Y) tulee olla sama.
- Tarkista, että päällisen koko vastaa tyynyn kokoa.
- Aseta tyyny päällisen sisään. Venttiilin tulee sijaita vasemmassa etureunassa ja osoittaa ylöspäin. Tyynyn pohjassa oleva painatus osoittaa etupään.
- Sulje vetoketju. Varmista, ettei tyyny vahingoitu.
- Poista päälliseen kiinnitettyjen tarranauhojen suojaitepit.
- Aseta tyyny paikalleen painamalla voimakkaasti.
- Istu tyynyn päällä pari minuuttia, jotta sen ilmasisältö mukautuu sinulle ja painollesi mukavaksi.
- Säädä tarvittaessa pyörätuolin jalkatukia.

Tarkista pohjakosketus:

Varoitus! Häntäluusi ja lantion luittesi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen tarkistaminen on tehtävä ensimmäisellä käyttökerralla ja säännöllisesti sen jälkeen (ainakin kerran kuussa).

- Tarkista pohjakosketus, kun olet istunut tyynyllä noin 5 minuutin ajan.

- Nojaa eteenpäin ja anna hoitajan tai apuvälineen luovuttajan työntää kätensä pakaroidesi ja Vicair-tyynyn väliin. Pyydä hoitajaa tai apuvälineen luovuttajaa tarkistamaan, että pakaroitteesi alla on vähintään 2,5 cm SmartCells-ilmakartioita. Ne estävät istumaluitasi koskettamasta pyörätuolin istuimeen.
- Älä käytä tyynyä, mikäli tunnet pohjakosketuksen. Useimmiten erilaisen tyynymallin tai tyynykoon käyttö ratkaisee ongelman.

KÄYTTÖ

Varoitus! Älä käytä suihku- tai kylpytyynyä.

Ihon punoituksen tarkistus

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana.

Mikäli punoitusta ilmenee eikä se häviä 15 minuutin kuluessa, ota yhteyttä hoitajaasi tai apuvälineen luovuttajaan.

Käyttö- ja säilytysolosuhteet

- **Käyttäjän enimmäispaino:** 150 kg
- **Lämpötila:** Alin: -10 °C, ylin: 50 °C
- **Käyttö korkeassa ilmanalassa**
Huomautus! Vicair B.V. ei suosittele tyynyn käyttöä yli 2 400 m:n korkeudessa merenpinnasta eikä yli 50 m merenpinnan alapuolella. Koska SmartCell-kartioiden ovat täynnä ilmaa, tyyny voi käyttäytyä poikkeavasti korkeassa ilmanalassa tai lentokoneessa.
- **Ilmankosteus:** Alin: 0 %, ylin 100 %

Vicair-istuintyynyjen käyttö moottoriajoneuvoissa

Varoitus! Vicair-istuintyynyjen käytöstä moottoriajoneuvoissa ei ole tällä hetkellä olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme suosittele istuintyynyjen käyttöä

moottoriajoneuvoissa.

Vaihtoehtona Vicair-istuintyynylle voit käyttää Vicair AllRounder -tyynyä (joka voidaan kiinnittää käyttäjän vartaloon), jos tarvitetset kuljetuksen ajaksi lisäsuoja.

Uudelleenkäyttö - Tuotteen luovuttaminen toiselle käyttäjälle

Tuote soveltuu toistuvaan käyttöön. Käyttökertojen määrä riippuu siitä, miten usein ja millä tavalla tuotetta käytetään. Tuote on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti, ennen kuin toisen henkilön annetaan käyttää sitä. Katso ohjeet luvusta Kunnossapito ja puhdistus.

Tyynynpäällisen uusiminen

Vicair B.V. suosittelee tyynynpäällisen uusimista vuosittain normaalikäytössä. Vaihtopäällisiä voi ostaa erikseen.

Hävittäminen

Käytettyjen laitteiden ja pakkausten hävittämisessä ja kierrättämisessä on noudatettava sovellettavia lakisäätöisiä määräyksiä. Varmista, että tuote on puhdistettu ennen hävittämistä kontaminaatiovaaran välttämiseksi.

HUOLTAMINEN JA PUHDISTAMINEN

Varoitus! Tarkista tuotteen kulumisen ja ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen kuukauden välein. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on tyhjentyneet, älä jatka tuotteen käyttöä. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Varoitus! Älä upota tätä tyynyä veteen tai muuhun nesteeseen äläkä pese sitä pesukoneessa.

Huomio! Älä pese tuotetta höyryttämällä äläkä laita sitä autoklaaviin. Se ei kestä korkeata lämpöä eikä painetta. Jollei annettu

puhdistusohjeita noudateta, on todennäköistä, että tuote kuuluu käytössä nopeammin.

Huomio! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.

Vicair Liberty -tyynyn puhdistaminen

- **Vicair Liberty -tyynynpäällisen puhdistaminen**

Tyynynpäällinen voidaan pestä pesukoneessa nurinpäin käännettynä. Noudata päällisen sisäpuolella sijaitsevassa pesulapussa annettuja ohjeita.



- **Vicair Liberty -tyynyn puhdistus**

Pyyhi tyyny kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä pese tyynyä pesukoneessa äläkä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.



Vicair Liberty -tyynyn desinfiointi

Varoitus! Jos tyyny on likaantunut kehon nesteistä ja eritteistä ja se luovutetaan toiselle käyttäjälle, se on desinfioitava ristikontaminaation ehkäisemiseksi. Puhdista tyyny ja päällinen yllä olevien ohjeiden mukaan. Käytä mieluiten bakteereja tuhoavaa pesuainetta. Suihkuta puhdistuksen jälkeen tyyny ja päällinen desinfiointiaineella.

TAKUU

Vicair B.V. myöntää tuotteelle rajoitetun takuun, joka kattaa valmistusvirheet ja materiaalit, kunhan tuotetta käytetään normaalisti. Tuotteen väärinkäytöstä, virheellisestä käsittelystä,

puhdistuksesta tai laiminlyönnistä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuaika

Alkuperäisestä ostopäivästä 24 kuukautta.

Jos materiaalista tai valmistusvirheestä johtuva vika ilmenee ilmoitettuna takuuaikana, Vicair B.V. korjaa tai vaihtaa – oman valintansa mukaisesti – tuotteen maksutta.

Tyynynpäällinen ei kuulu takuun piiriin.


Tässä ilmoitettu takuu koskee pelkästään tuotteen korjausta tai vaihtoa.

Takuu ei missään tapauksessa korvaa välillisiä vahinkoja, eikä korvaus ylitä viallisen tuotteen hintaa.

Jäikö sinulle kysymyksiä?

Ota yhteys Vicair B.V.:hen osoitteessa info@vicair.com tai oman maasi Vicair-jakelijaan.

Standard sizes Width x depth		Vicair Liberty + Comfair Cover	Vicair Liberty + Incontinence Cover	Weight
CM	Inches	Article number	Article number	Approx.
40x40	16x16	LBA/CK/4040	LBA/IN/4040	0,4 Kg
40x45	16x18	LBA/CK/4045	LBA/IN/4045	0,4 Kg
43x43	17¼x17¼	LBA/CK/4343	LBA/IN/4343	0,4 Kg
45x40	18x16	LBA/CK/4540	LBA/IN/4540	0,4 Kg
45x45	18x18	LBA/CK/4545	LBA/IN/4545	0,4 Kg
45x50	18x20	LBA/CK/4550	LBA/IN/4550	0,4 Kg
50x45	20x18	LBA/CK/5045	LBA/IN/5045	0,4 Kg
50x50	20x20	LBA/CK/5050	LBA/IN/5050	0,4 Kg

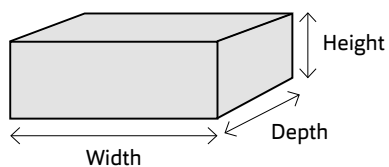



Vicair B.V.

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands

info@vicair.com
www.vicair.com

