

INVACARE INFORMERAR

www.invacare.se

DECEMBER 2020



I detta nummer:

Manuella rullstolar och Sportprodukter	s 2-3
Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen	s 4-6
Sängar & Personlyftar	s 7-10
Hygienstolar	s 11
Hitta din kontaktperson	s 12-14
Azalea Reservdelslista	s 15-23

INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

*Ny märkning! På **Azalea***

Vill informera att Azalea rullstolar beställd från och med 1:a december kommer att ha en liten märklapp på baksidan av tippskyddet. Se bild.



Denna märkning blir "synlig" när man står bakom rullstolen och tippskyddet inte är i aktivt läge. Det är alltså en varningslapp att man inte har tippskyddet aktiverat. När man vrider på tippskyddet så det hamnar i aktivt läge så ser man alltså inte lappen bakifrån.

Det är ingen lapp som måste monteras på äldre stolar. Gäller alla Azalea modeller.

*Positioneringsbälten **till manuella stolar***

Sedan en tid tillbaka, 2020-06, får man montera alla CE-märkta höftbälten. Detta gäller om man använder de anvisningar som anges i monteringsanvisningen för bältet och rullstolens bruksanvisning om hur man använder rullstolens infästningar och/eller infästningspunkter.


Detta gäller Azalea-familjen, Dahlia, Action-serien, rullstolar från Küschall, Spirea och XLT-familjen. Gäller även på rullstolar tillverkade innan 2020-06.

INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

*Ny reservdelslista förenklad för **Azalea***

På vår hemsida under Azalea och Teknisk data och dokumentation-Reservdelar så finns det en förenklad reservdelslista. Den är i PDF format och kan enkelt laddas ner om man så önskar. (se sista sidan i detta dokument)

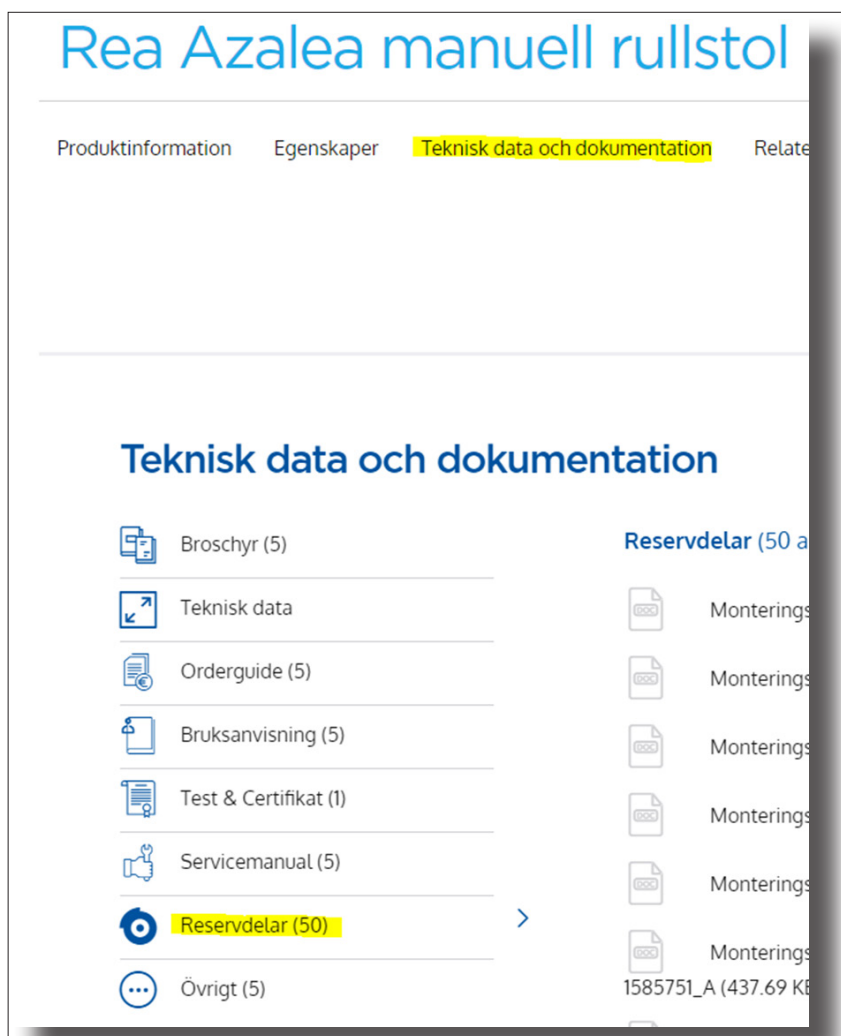

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Joakim Sköldfelt
Produktchef Manuella rullstolar och Sportprodukter
jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05

INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

NYHET! AVIVA den nya familjen elrullstolar

De nya elrullstolarna AVIVA RX har en patenterade stötdämpning, CTC. Den ger användaren stor kontroll, bättre grepp och extra komfort. Stötdämpningen kan enkelt ställas in från hård till mjuk för att passa olika brukarbehov. Tekniken fungerar lite som en kulle, så att basen kan röra sig i alla riktningar vilket ger en smidig körupplevelse. För mer information om hur det fungerar kontakta vår elrullstolsrepresentant i ditt distrikt, eller gå gärna in på vår Youtube-kanal alternativt besök vår hemsida.



Trådlös programmering med LiNX


AVIVA RX, precis som övriga elrullstolar med LiNX-kontrollsystem, kan programmeras med brukaren sittande i stolen samtidigt som personen kör och kan uppleva skillnaden. Detta gör att man kan säkerställa att prestandan blir precis som användaren vill. Programmeringen sker enkelt och trådlöst från vilken mobiltelefon eller surfplatta som helst. För mer information om hur det fungerar kontakta vår elrullstolsrepresentant i ditt distrikt, eller gå gärna in på vår Youtube-kanal.



Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

Val av manöverbox

För att underlätta valet av manöverbox och ge stöd till vad som passar för olika brukare så har vi skapat en microsite där man kan få uppslag. Välj användarens specifika motoriska och kognitiva förmågor så ger detta verktyget ett förslag till den bästa lösningen.
(Sidan är på engelska)

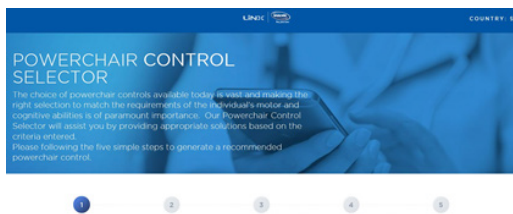

<https://linx4you.com/sverige-se/>

Ny fällbar Scooter som underlättar att ta med på resan **Scorpius A**

För er som missat så har vi introducerat en ny Scooter. I det växande segmentet med fällbara produkter som enkelt kan tas med på resan så har vi lanserat Scorpius A. Kompakt nog för att passa i de flesta normalstora bilars bagageutrymme, så är Scorpius A perfekt för den aktiva personen som är på väg. Scorpius A kan fällas ihop på under 10 sekunder med ett enda knapptryck på scootern eller med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. För mer information om hur det fungerar kontakta vår elrullstolsrepresentant i ditt distrikt, eller gå gärna in på vår Youtube-kanal.

<https://youtu.be/OKpP12gqcbw>



INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

Smoov One ett nytillskott från Alber

Ett år som detta då inget är sig likt så är det från våra fabriker och utvecklingsavdelningar business as usual i stor utsträckning. Under 2020 så har vi fortsatt att lansera nyheter i samma takt som tidigare år. Bland annat så har vi lanserat Smoov One. Smoov One är ett tillbehör till en manuell rullstol som ger en kontinuerlig drift och har en toppfart på 10km/h. SMOOV One har en räckvidd på upp till 20 km, väger bara 7,2 kg. Smoov passar lika bra för fastram eller fällbara rullstolar, SMOOVE One fungerar på de flesta underlag och bibehåller en konstant hastighet även i sluttningar. För mer information om hur det fungerar kontakta vår elrullstolsrepresentant i ditt distrikt, eller gå gärna in på vår Youtube-kanal.
<https://www.youtube.com/watch?v=WbiCSBAE80I>



NYHET! E-Pilot med grovmönstrat däck

E-pilot kan nu beställas med grovmönstrat däck. Med det däcket har e-pilot mer grepp på t.ex. grus eller gräs. Vi har därför skapat nya artikelnummer för systemet för att särskilja vilket system som har vilket däck vid lagerhållning. Se nedan

Artikelnummer

1593778

1593783

1593780

1593784

Benämning

E-Pilot P15 6 km/h Standard Grovmönstrat

E-Pilot P15 6 km/h Supernova Grovmönstrat

E-Pilot P15 10 km/h Standard Grovmönstrat

E-Pilot P15 10 km/h Supernova Grovmönstrat



Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar

Mikael Forsman

Produktchef Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

mforsman@invacare.com, 08-5223 70 44



INVACARE INFORMERAR

Personlyftar

Mobil lyft Birdie EVO och Uppresningslyft ISA

Produkterna levereras nu med en platta som extra stöd för benmotorerna, implementerades i produktion från S/N 20H09000089 (Birdie EVO) och 20H09001094 (ISA).

Ingen åtgärd på tidigare lyftar krävs. Går att beställa som reservdel SP1664202 (stödplatta för benmotorer kpl).

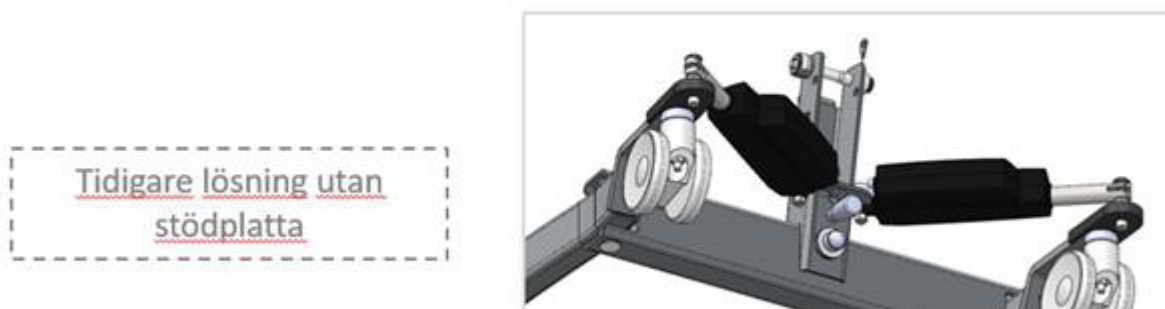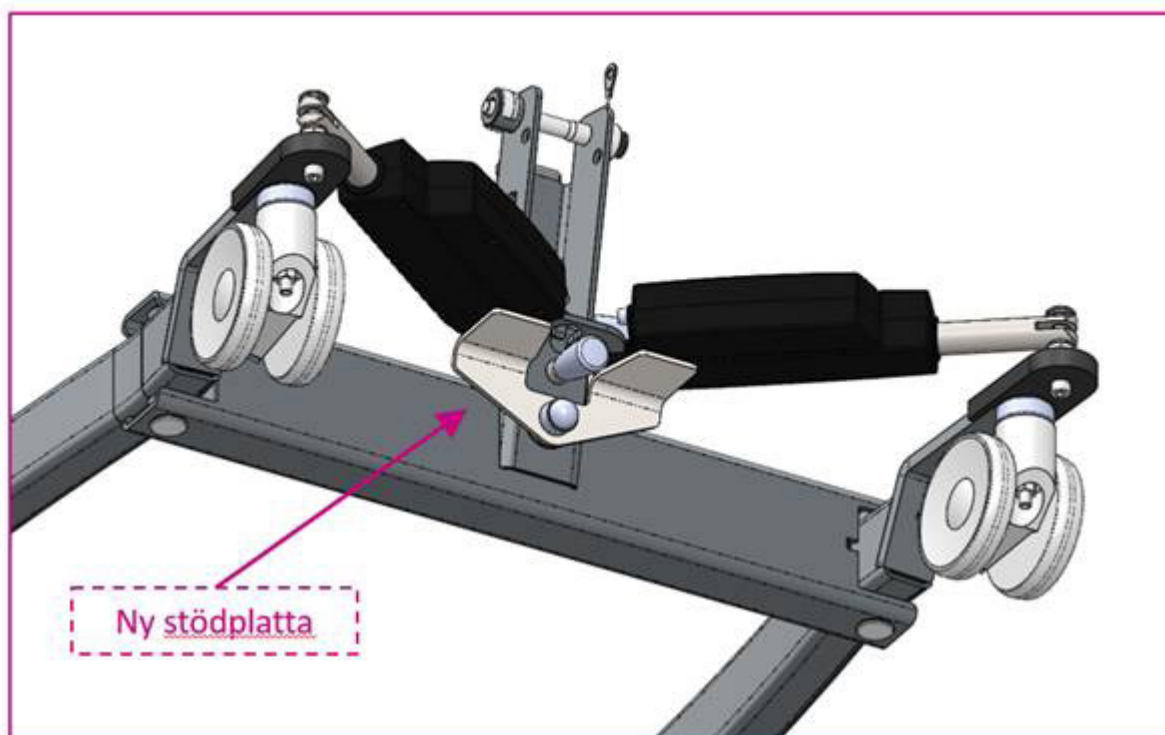

INVACARE INFORMERAR

Personlyftar

*Uppdaterat benstöd till uppresningslyft **ISA***

Handtaget till benstödet har fått en ny utlösarknapp (röd i bilden här nedanför) för att underlätta justering i höjddled, implementerades i produktion från S/N 20109000345.



INVACARE INFORMERAR

Selar

NYA, optimerade lyftselar – *Ivacare Slings*

Våra lyftselar har omarbetats och optimerats för att erbjuda brukaren en säker, trygg och bekväm förflyttning. De är designade för att följa brukarens kroppsform och ge stöd där det behövs. Vi erbjuder ett stort urval bestående av 15 olika modeller, varje modell i upp till sex storlekar samt upp till tre olika material att välja mellan.

Lyftselarna är tillverkade av följsamt material och har polstrade rygg- och bendelar, för att göra förflyttningen så bekväm säker som möjligt. Lyftselarna har även anpassats för att hanteringen ska vara så intuitiv som möjligt. Dessutom har alla selar en QR-kod som leder till direkt till en instruktionsvideo som visar hur den appliceras. Det finns även bilder som visar applicering och positionering på varje seles etikett.



Lyftsele Universal High Plus



Exempel på etikett

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: [Personlyftar & Selar](#). Se även våra instruktionsfilmer på Youtube, [Invacare slings](#). Kontakta oss gärna för att boka en digital visning.

INVACARE INFORMERAR

Vårdsängar

NYHET! NordBed Kid - barnsäng, som uppfyller den nya Europeiska standarden

Säkerhet har varit i fokus vid framtagandet av vår nya barnsäng, Invacare NordBed Kid. Allt ifrån säkerhetslåset på de vikbara grindarna till boxen där manöverdosan hålls i säkert förvar utom räckhåll för barnet till stabila spjälor som klarar belastningstestet. NordBed Kid är höjdjusterbar från 30 - 80 cm för att möjliggöra att barnet själv kan förflytta sig i och ur säng samtidigt som den kan ställas in på en lämplig höjd för omvårdnad. Sängen finns tillgänglig i tre olika längder för barn mellan 3-12 år. Sängbotten består av fyra delar som baserats på antropometriska mått som kan justeras individuellt för optimalt stöd och bästa komfort. Den elektriska manöverdosan är integrerat låsbar vilket ger möjlighet att stänga av vissa funktioner.



För ytterligare information, besök gärna vår hemsida, sök på NordBed Kid. eller kontakta oss gärna för att boka en digital visning


Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Anna-Karin Eskilsson
Produktchef Sängar & Personlyftar
akeskils@invacare.com, 08-5223 7042

Hygienprodukter

*Nya dräneringshål på **Aquatec Ocean Ergo-familjen***

Bilden visar var dräneringshålet sitter, det är på undersidan av hygienstolens sittram, mot ryggstöddets infästning.

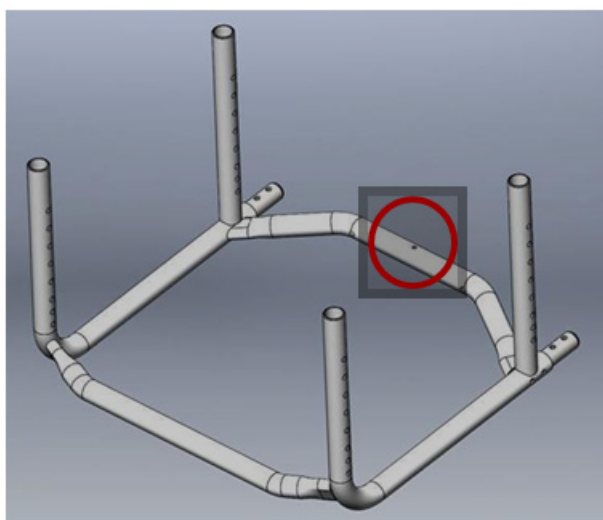

Alla hygienstolar har, från och med serienummer nedan, de nya dräneringshålen i hygienstolens sittram:

Ocean Ergo:
20IVP100001-128

Ocean Ergo med ett riktningsspärrat hjul:
20IVP110001-50

Ocean Ergo XL:
20IVP120001-30

Ocean VIP Ergo med ett riktningsspärrat hjul:
20IVP310001-20

Dessa hygienstolar börja distribueras inom kort.

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Marie-Louise Tham
Produktchef Gång- och Hygienhjälpmedel
mltham@invacare.com, 08-5223 7020

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggssystem



Johanna Koch
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Södermanland,
Östergötland



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Värmland,
Västmanland,
Gävleborg,
Dalarna, Örebro



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland



Dan Emmertz
Distriktsansvarig
Skåne, Blekinge,
Halland, Kronoberg,
Kalmar



Monica Hernquist
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping

jkoch@invacare.com
070-224 58 82

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

demmertz@invacare.com
070-190 21 63

mhernqui@invacare.com
070-340 32 53

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggssystem



Peder Tägtström
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland



Anna Landsmann
Distriktsansvarig
Uppsala,
Stockholm



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Dalarna,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Värmland



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33

alandsma@invacare.com
070-396 91 01

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Sängar, Personlyftar och Madrasser



Keith Kågström
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08



Maths Fuxinger
Distriktsansvarig
Västra Götaland

mfuxinge@invacare.com
0708-32 07 75



Mats Adelros
Distriktsansvarig
Halland, Blekinge,
Kronoberg, Skåne,
Jönköping

madelros@invacare.com
070-677 33 80



Anton Enlund
Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Kalmar,
Södermanland,
Östergötland

aenlund@invacare.com
0720-70 52 71



Per-Olof Fallemark
Distriktsansvarig
Värmland, Uppsala,
Västmanland,
Södermanland
Örebro, Gävleborg,
Dalarna


pfallema@invacare.com
070-204 67 60

Gång- och Hygienhjälpmedel



Christina Nilsson
Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

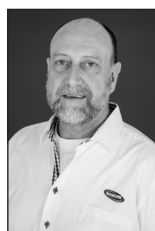

Per Danielsson
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Värmland

pdaniels@invacare.com
073-274 44 19



Bertil Lundh
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Dalarna

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Keith Kågström
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Oxygenprodukter



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Anna Landsmann

Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Värmland,
Uppsala,
Västmanland,
Södermanland,
Örebro, Gävleborg,-
Dalarna

alandsma@invacare.com
070-396 91 01



Christina Nilsson

Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Västra Götaland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

Key Account Managers



Johan Bergkvist

Key Account Manager

jbergkvi@invacare.com
070-191 90 75



Christer Nyqwist

Key Account Manager

cnyqwist@invacare.com
070-459 97 22

Du vet väl att vi finns på Facebook, klicka förbi direkt och Gilla vår sida!



På vår Facebook-sida kan du följa oss på nära håll, se spännande nyheter, läsa artiklar, delta i tävlingar och mycket mer. Dessutom kommer vi att dela några av de många inläggen från vår bloggsida Passionate people!

Välkommen in!

www.facebook.com/InvacareSverige



**TILLBEHÖR och RESERVDELAR till
Azalea / Azalea Assist
(för fullständig lista se Elektronisk reservdelskatalog)**

	SITS	SB (är inget mått skrivet passar artikel till)		
	Sitsplatta inkl velcro och skruv sb39	39	För sittdjup 43-50cm	☐ 1508135
	Sitsplatta inkl velcro och skruv sb44	44		☐ 1508136
	Sitsplatta inkl velcro och skruv sb49	49		☐ 1508137
	Sitsplatta inkl velcro och skruv f Tall sb39	39	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐ 1507946
	Sitsplatta inkl velcro och skruv f Tall sb44	44	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐ 1507947
	Sitsplatta inkl velcro och skruv f Tall sb49	49	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	☐ 1507948
	Glidsits f sb 39	39	Passar ej Azalea Tall / Azalea Assist Tall	☐ SP1484576
	Glidsits f sb 44	44	bendelare. Ökar SH +5cm	☐ SP1484577
	Glidsits f sb 49	49		☐ SP1484578
SITTDYNA				
	Sittdyna Flosshape, plysch			
	Sittdyna Flosshape 405x535 plysch	39		☐ 1508055-TR35
	Sittdyna Flosshape 455x535 plysch	44		☐ 1508057-TR35
	Sittdyna Flosshape 505x535 plysch	49		☐ 1508059-TR35
	Sittdyna Flosshape, dartex			
	Sittdyna Flosshape 405x535 dartex	39		☐ 1508055-TR26
	Sittdyna Flosshape 455x535 dartex	44		☐ 1508057-TR26
	Sittdyna Flosshape 505x535 dartex	49		☐ 1508059-TR26
	Sittdyna Flosshape, spacer			
	Sittdyna Flosshape 405x535 spacer	39		☐ SP1508055-TR36
	Sittdyna Flosshape 455x535 spacer	44		☐ SP1508057-TR36
	Sittdyna Flosshape 505x535 spacer	49		☐ SP1508059-TR36
	Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag			
	Sittdyna Vicair Multifunctional inkl O2 std överdrag 40x52x8	39		☐ OMFS/CC/4052
	Sittdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag 45x52x8	44		☐ OMFS/CC/4552
	Sittdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag 50x52x8	49		☐ OMFS/CC/5052
RYGGSTÖD				
	Ryggstöd fast Flex3 Laguna sats		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐ SP1562142
	För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna			
	Ryggstöd fast Flex3 Mistral2 sats		Passar ej ryggöverdrag polstrat	☐ SP1562143
	För Mistral ryggdyna			
	Ryggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 39	39		☐ SP1579675
	Ryggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 44	44		☐ SP1579692
	Ryggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 49	49		☐ SP1579693

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
  	RYGGDYNA Ryggöverdrag polstrat plysch Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR35 ☐ SP1589930-TR35 ☐ SP1589941-TR35
	Ryggöverdrag polstrat, dartex Ryggöverdrag polstrat 475x540 dartex sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 dartex sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 dartex sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR26 ☐ SP1589930-TR26 ☐ SP1589941-TR26
	Ryggöverdrag polstrat, spacer Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	☐ SP1589929-TR36 ☐ SP1589930-TR36 ☐ SP1589931-TR36
  	Ryggdyna Laguna svart plysch Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	39 44 49		☐ SP1427118-TR35 ☐ SP1427119-TR35 ☐ SP1427120-TR35
	Ryggdyna Laguna svart dartex Ryggdyna Laguna 372x550 dartex sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 dartex sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 dartex sb49	39 44 49		☐ SP1427118-TR26 ☐ SP1427119-TR26 ☐ SP1427120-TR26
	Ryggdyna Laguna svart spacer Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49	39 44 49		☐ SP1427118-TR36 ☐ SP1427119-TR36 ☐ SP1427120-TR36
	Ryggdyna Mistral 2 plysch Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39 Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44 Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	39 44 49		☐ SP1431668-TR35 ☐ SP1424651-TR35 ☐ SP1424652-TR35
	Ryggdyna Mistral 2 dartex Ryggdyna Mistral 2 355x510 dartex sb39 Ryggdyna Mistral 2 455x510 dartex sb44 Ryggdyna Mistral 2 505x510 dartex sb49	39 44 49		☐ SP1431668-TR26 ☐ SP1424651-TR26 ☐ SP1424652-TR26
   	Ryggdyna Passad 2 plysch Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49	39 44 49		☐ SP1429271-TR35 ☐ SP1424647-TR35 ☐ SP1424649-TR35
	Ryggdyna Passad 2 dartex Ryggdyna Passad 440x550 dartex sb39 Ryggdyna Passad 470x550 dartex sb44 Ryggdyna Passad 520x550 dartex sb49	39 44 49		☐ SP1429271-TR26 ☐ SP1424647-TR26 ☐ SP1424649-TR26
	Ryggdyna Passad 2 spacer Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49	39 44 49		☐ SP1429271-TR36 ☐ SP1424647-TR36 ☐ SP1424649-TR36
	Ryggdyna Passad2 hög dartex Ryggdyna Passad hög 440x550 dartex sb39 Ryggdyna Passad hög 470x550 dartex sb44 Ryggdyna Passad hög 520x550 dartex sb49	39 44 49		☐ SP1444275-TR26 ☐ SP1444276-TR26 ☐ SP1444277-TR26
	Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54	39 44 49		☐ OMFB/CC/4054 ☐ OMFB/CC/4554 ☐ OMFB/CC/5054

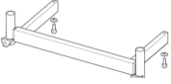
BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	KÖRHANDTAG			
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39	39		☐ SP1571966
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44	44		☐ SP1571967
	Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49	49		☐ SP1571968
	Körbygel VS 39 Flex3	39		☐ SP1563967
	Körbygel VS 44 Flex3	44		☐ SP1564551
	Körbygel VS 49 Flex3	49		☐ SP1564552
JUSTERING RYGG/SITSENHET				
	Kolvsats f rygg o sits kpl t Azalea tät			☐ SP1605256
	Sits/Rygg tilt el kpl Azalea 2015-08 >			☐ SP1583212
	Låsdelalj för rygg/tilt st 			◆ 1527435
BENSTÖDSALTERNATIV				
	Centralplacerad fotplatta		Ej för SH 40cm	☐ 1484821
  	Benstödsinfästning sb 39cm		Standard	☐ 1449888-0509
	Benstödsinfästning sb 44cm		Standard	☐ 1449889-0509
	Benstödsinfästning sb 49cm		Standard	☐ 1449890-0509
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm		5cm högre benstödsinfästning	☐ SP1574112
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm		5cm högre benstödsinfästning	☐ SP1574113
	Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm		5cm högre benstödsinfästning	☐ SP1574114
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ SP1656850
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ SP1656851
	Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm		För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	☐ SP1656852
BENSTÖDSÖVERDEL				
	Benstöd vs m fäste f vadstöd vä 2020		Passar ej vadband	☐ SP60122669
	Benstöd vs m fäste f vadstöd hö 2020		Passar ej vadband	☐ SP60122670
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019		Passar både hö/vä	☐ SP1574349-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019		Passar både hö/vä	☐ SP1650918-0646
	Benstöd amputation vä		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐ 1442991
	Benstöd amputation hö		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	☐ 1442990
VADSTÖD				
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019	39		☐ SP1605831
	Vadstöd 145mm u fäste hö 2019	39		☐ SP1603256
	Vadstöd 170mm u fäste vä 2019	44		☐ SP1605832
	Vadstöd 170mm u fäste hö 2019	44		☐ SP1605829
	Vadstöd 195mm u fäste vä 2019	49		☐ SP1605833
	Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	49		☐ SP1605834

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	FOTPLATTA HEL VINKEL & DJUPSTÄLLBAR FÖR BENSTÖD VINKELSTÄLLBAR & 90GR			
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	39	Kort rör = 24cm	❑ 1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör	44		❑ 1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör	49		❑ 1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	39	Långt rör = 36cm, ej sitthöjd 40	❑ 1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör	44		❑ 1493377
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör	49		❑ 1495826
	Fotlåda kpl 39	39	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	❑ SP1571749
	Fotlåda kpl 44	44	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	❑ SP1571750
	Fotlåda kpl 49	49	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	❑ SP1571751
			Fotlådan har korta fotrör, 24cm	
FOTPLATTOR DELADE				
	FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2020			
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	39		❑ SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	39		❑ SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	44		❑ SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	44		❑ SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	49		❑ SP1603265
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	49		❑ SP1603261
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR KORT RÖR			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	39		❑ 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	39		❑ 1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	44		❑ 1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	44		❑ 1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	49		❑ 1429167
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	49		❑ 1429168
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR LÅNGT RÖR			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	39		❑ 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	39		❑ 1429176
	FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 90GR KORT			
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	39		❑ 1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	39		❑ 1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	44		❑ 1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	44		❑ 1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	49		❑ 1446159
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	49		❑ 1446160
	FOTSTÖD TILLBEHÖR			
	Hälband			❑

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	BÅLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 inkl fäste Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex3 fast Bålstöd multi inkl fäste Flex3 fast		Passar både hö/vä	☐ SP1552726 ☐ SP1552726
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1552728 ☐ SP1552729
	Bålstöd std dyna Bålstöd standard inkl fäste Flex3 fast Bålstöd standard inkl fäste Flex3 fast		Passar både hö/vä	☐ SP1557672 ☐ SP1557672
	Bålstöd förhöjt std dyna Bålstöd förhöjt standard inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd förhöjt standard inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1552680 ☐ SP1552681
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1557673 ☐ SP1557674
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd swing away multi inkl fäste Flex3 fast vä Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 fast hö			☐ SP1557675 ☐ SP1557676
	BÅLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 inkl fäste Bålstöd multijusterbar dyna Bålstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar Bålstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar		Passar både hö/vä	☐ SP1561729 ☐ SP1561729
	Bålstöd förhöjt multijusterbar dyna Bålstöd förhöjt multi vä Flex3 ställbar inkl fäste Bålstöd förhöjt multi hö Flex3 ställbar inkl fäste			☐ SP1562960 ☐ SP1562961
	Bålstöd std dyna Bålstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar Bålstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar			☐ SP1561730 ☐ SP1561730
	Bålstöd förhöjt std dyna Bålstöd förhöjt standard vä Flex3 ställbar inkl fäste Bålstöd förhöjt standard hö Flex3 ställbar inkl fäste			☐ SP1562962 ☐ SP1562963
	Bålstöd Swing away std dyna Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar hö			☐ SP1561641 ☐ SP1561642
	Bålstöd swing away multijusterbar dyna Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar vä Bålstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar hö			☐ SP1561651 ☐ SP1561652
 	TILLBEHÖR RYGGSTÖD Fäste bålstd Flex3 fast Fäste bålstd Flex3 ställbar kpl		För fast rygg, om bålstd beställs separat För ställbar rygg, om bålstd beställs separat	☐ SP1543574 ☐ SP1554143
	Bålstöd velcro			☐ SP1602253
	Svankstödsdyna		Passar bara ställbar Flex 3 rygg	☐ 5252527
	Ryggkilar, par			☐ SP1513037

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
TILLBEHÖR BENSTÖD				
	Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl par		Passar ej VF fotstöd, 90gr fotstöd, centralplacerad fotplatta, VS fotstöd 2019	☐ SP5255299
	Polstring fotplatta 172mm Polstring fotplatta 197mm Polstring fotplatta 222mm	39 44 49	Passar ej VF fotstöd	☐ SP1650355 ☐ SP1650356 ☐ SP1650357
	Polstring hel fotplatta 272 Polstring hel fotplatta 322 Polstring hel fotplatta 372	39 44 49		☐ SP1563959 ☐ SP1563962 ☐ SP1563963
	Vadmatta			☐ SP1563951
	Vadband justerbart		Passar ej VS benstödsöverdelar	☐ 1429214
TILLBEHÖR CHASSI				
	Ramförlängning Azalea par kpl		Förlänger ramen +5cm, enbart ramförlängning passar ej med 90gr benstöd. Ingår i Azalea Tall / Azalea Assist Tall	☐ 1484535
LÄNKHJUL				
	Länkhjul 140x40 mass svart u axel Länkhjul 150x30 mass svart u axel Länkhjul 175x45 mass svart u axel Länkhjul 200x30 mass svart u axel Länkhjul 200x45 mass svart u axel		För sh 40cm och 45cm För sh 40cm och 45cm För sh 45cm och 50cm För sh 45cm och 50cm För sh 45cm och 50cm	☐ SP1663537 ☐ SP1659704 ☐ SP1663538 ☐ SP1659705 ☐ SP1659706
DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 16 TUM				
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshand par			☐ SP1656801
DRIVHJUL 22 TUM MODELL				
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum pkt fri svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum pkt fri svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum pkt fri svart rostfri drivring Drivhjul 22x1 tum luft HP svart alu drivring Drivhjul 22x1 tum luft HP svart plastad drivring Drivhjul 22x1 tum luft HP svart rostfri drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring Drivhjul 22 tum pkt lågprofil rostfri drivring LP/PKTFRI			☐ SP60109188 ☐ SP60109189 ☐ SP60109190 ☐ SP60109191 ☐ SP60109192 ☐ SP60109193 ☐ SP60109194 ☐ SP60109195 ☐ SP60109196 ☐ SP60109197 ☐ SP60109198 ☐ SP60109199 ☐ 1536541
DRIVHJUL 24 TUM MODELL				
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum pkt fri svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum pkt fri svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum pkt fri svart rostfri drivring Drivhjul 24x1 tum luft HP svart alu drivring Drivhjul 24x1 tum luft HP svart plastad drivring Drivhjul 24x1 tum luft HP svart rostfri drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring			☐ SP60109176 ☐ SP60109177 ☐ SP60109178 ☐ SP60109179 ☐ SP60109180 ☐ SP60109181 ☐ SP60109182 ☐ SP60109183 ☐ SP60109184 ☐ SP60109185 ☐ SP60109186 ☐ SP60109187 ☐ 1536542

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM			
	MODELL			
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring			■ SP60108741
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			■ SP60108742
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			■ SP60108743
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart alu drivring			■ SP60108744
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart plastad drivring			■ SP60108745
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB pkt fri svart rostfri drivring			■ SP60108746
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring			■ SP60108750
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			■ SP60108751
	Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			■ SP60108752
	Drivhjul 22 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring			■ 1536612
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM			
	MODELL			
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring			■ SP60108729
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring			■ SP60108730
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring			■ SP60108731
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart alu drivring			■ SP60108732
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart plastad drivring			■ SP60108733
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB pkt fri svart rostfri drivring			■ SP60108734
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring			■ SP60108738
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring			■ SP60108739
	Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring			■ SP60108740
	Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring			■ 1536613
TILLBEHÖR DRIVHJUL				
	Ekerskydd 22 tum neutral		Passar ej 16 tum hjul	■ 5102800
	Ekerskydd 24 tum neutral		Passar ej 16 tum hjul	■ 5102807
	BROMSAR			
	Broms brukarman u fäste vä		Passar Azalea/Azalea Tall	■ SP1588553
	Broms brukarman u fäste hö			■ SP1588552
	Broms brukarmanövrerad 16 tum, par		Passar Azalea Assist/Assist Tall	■ 1444335
	Bromssats vb kpl		Passar 22-24 tum VB hjul till hela Azalea familjen	■ 1536757
	Broms enarm kpl vä		Passar 22-24 tum hjul	■ SP1575306
	Broms enarm kpl hö		Passar 22-24 tum hjul	■ SP1575307
	TILLBEHÖR			
	Midjebälte med billås			■ 1551066
	Transportfäste f Azalea fram			■ SP1591222
	Bord inkl mont.sats		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	
	Bord kpl medium inkl monteringsats	39		■ SP1570748
	Bord kpl large inkl monteringsats	44		■ SP1570749
	Bord kpl x-large inkl monteringsats	49		■ SP1570775
	Bord m armstödsdyna inkl mont.sats		Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	
	Bord m dyna medium kpl inkl mont sats	39		■ SP1580892
	Bord m dyna large kpl inkl mont sats	44		■ SP1580893
	Bord m dyna xlarge kpl inkl mont sats	49		■ SP1580894
	Hembord m armstöd kpl vä		Passar	■ SP1588322
	Hembord m armstöd kpl hö		Kom ihåg att välja armstöd på motsatt sida. Passar	■ SP1588321
	Bord Swing away stl S u dyna	39, 44	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	■ SP1586424
	Bord Swing away stl M u dyna	49	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	■ SP1586425
	Bord Swing away stl S m dyna	39, 44	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	■ SP1584394
	Bord Swing away stl M m dyna	49	Passar ej låssats bord, utan monteringsats	■ SP1584395
	Monteringsats 1 bord swingaway		Enbart för bord swing away, väljs med.	■ 1449218
	Stoppnings bord			
	Stoppnings bord Medium	39		■ SP1571269
	Stoppnings bord Large	44		■ SP1571270
	Stoppnings bord X-large	49		■ SP1571271

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	Stopning hemibord hö/vä			☐ SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014		Passar monteringsats bord SP1570745	☐ SP1572460
	Monteringssats bord		Väljs enbart då bord beställs separat	☐ SP1570745
	Kryckkäppskållare Flex3			☐ SP1560811
	Rattvredssats Azalea		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	☐ SP1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats Handvred f arm/benstöd bred dyna sats		För Armstöd smal dyna För Armstöd bred dyna	☐ SP1605335 ☐ SP1605347
	Övre fäste för sele		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐ SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par			☐ SP1563952
	Droppställning kpl		Nack / huvudstöd krävs för montering	☐ 1440897
	Tippskydd Azalea st Tippskydd Azalea hög st			☐ 1439933 ☐ 1508008