

INVACARE INFORMERAR

www.invacare.se

MARS 2021



I detta nummer:

Manuella rullstolar	s 2-3
Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen	s 4-6
Sängar	s 7
Gånghjälpmedel	s 8
Hitta din kontaktperson	s 9-11

INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter


*Ny förlängning av fotplatta till **Azalea & Dahlia***

Nu finns en ny variant av fotplatteförlängare tillgänglig för vår vinkelställbara fotplatta från 2019.

Den finns i två storlekar och passar både på höger och vänster sida. Den går även att montera framåt eller bakåt.

Kontakta er lokala representant för en presentation av fotplatteförlängaren.

Artikelnummer är SP60128964, upp till sittbredd 44cm och SP60128965 för sittbredd 49cm. Förlängarna säljs styckvis.

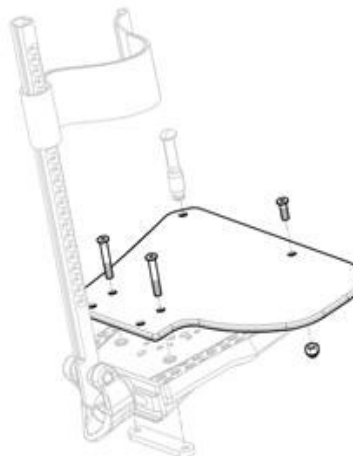

Bendelare med nya artikelnummer

Nya artikelnummer på bendelare och dess komponenter.

Det gamla artikelnumret, för en komplett bendelare SP1449897, har ersatts med SP1663114 Bendelare m fäste st.

Nytt artikelnummer har också själva bendelaren. Det gamla artikelnumret var 1444172 och ersätts med SP60124307.

Numer passar bendelaren bättre till lite högre dynor som används för bättre tryckavlastning eftersom bendelarens stolpe är något längre än tidigare, 225mm.

Givetvis fullt kompatibelt bakåt. Kontakta er lokala representant för en presentation.



INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

Küschall 2.0 ersätter tidigare modeller

Eftersom vi har ersatt alla Küschall-modeller med de uppdaterade 2.0-modellerna så hittar du numer de gamla Küschall-modellerna under **utgångna produkter** där kan du finna bruksanvisningar och servicemanualer.
<https://www.invacare.se/sv/help-support/discontinued-products>



Küschall K-serie 2.0



Küschall Champion 2.0

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Joakim Sköldfelt
Produktchef Manuella rullstolar och Sportprodukter
jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05

INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat

MyLiNX-app laddas gratis ned där appar finns

MyLiNX är ett diagnostik- och serviceverktyg som sänder rullstolsdiagnostik i realtid. Det gör det möjligt för användare att bättre underhålla sin rullstol. MyLiNX är kompatibel med alla Invacares Bluetooth-aktiverade LiNX-kontrollsystem.



e-motion M25 & SMOOV one / cybergaranti

MDR-förordningen kommer att gälla från maj 2021. Den föreskriver lämpliga säkerhetsåtgärder för medicinsk utrustning med trådlös uppkoppling till en smartphone eller extern styrenhet. Detta för att skydda från intrång av obehörig tredje part ("hackare").

Vår SMOOV one O10 och e-motion M25 kan båda ansluta till smartphones via våra Alber-appar. Det är därför vi har beaktat detta krav och ökat säkerheten. Detta innebär att kunderna är optimalt skyddade mot eventuella intrång som i värsta fall kan påverka beteendet i våra påskjutsmotorer.

När det gäller SMOOV one implementerades säkerhetssuppdateringen redan i juli 2020 och för e-motion M25 är alla nya enheter levererade efter 01.01.2021 utrustade med QR-kod för cybersäkerhet.*

E-motion M25 är nu utrustade med en extra QR-kod på hjulnavet. För SMOOV en är detta klistermärke placerat på undersidan av drivenheten. Dessa koder måste skannas när du ansluter till smartphone-appen (parningsprocessen) för första gången.



*Befintliga system levererade innan detta datum påverkas inte av den här uppdateringen.

INVACARE INFORMERAR

Oxygen

NYHET - *Platinum5 NXG*

Vi har den stora äran att presentera nästa generations syrgaskoncentrator från Invacare, Platinum5 NXG.

Denna nya koncentrator har en rad nya innovationer, bl a; Coolpressor™ som hjälper till att hålla kompressorn sval, vilket ger en ökad livslängd och driftsäkerhet.

SieveGuard +™ Ny design av kolonner som förlänger dess livslängd.

Dessutom en rad andra nyheter som vi gärna kommer ut och visar då vi är tillbaka i normalläge som skapar förutsättningar till fysiska möten.



PerfectO2 V & Platinum9 uppdatering

För att överensstämma med ISO 80601-2-69 gällande syrgaskoncentratorer som har uppvärmningsperioder längre än 2 minuter måste koncentratorn ange om syrgaskoncentrationen i den avgivna gasen inte har nått den kliniska nivån.

När PerfectO2 V- & Platinum9 startas och sensorn värms upp för den första renhetskollen SensO2, som inträffar vid 5: e minuten, kommer den gula LED-lampan att förbli tänd (bild A).

Efter den första renhetskollen och då en 85% O₂-nivån har uppnåtts, tänds den gröna LED-lampan och den gula släcks, vilket indikerar att enheten är i normalt driftläge. I enlighet med standarden, om syrgas renheten sjunker under 85% under normal drift (när den gula lysdioden lyser) kommer ett återkommande hörbart larm att ljuda.

Bild A

Grön LED vid start i enlighet med den tidigare standarden.



NYHET, gul LED i uppstartsfasen i enlighet med den nya standarden.



Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

Scalamobil den mobila trappklättraren för din rullstol

Vår trappklättrare Scalamobil S35 kan anpassas till rullstolen vid behov och göra det möjligt att övervinna trappor av alla slag med liten ansträngning. Inte ens spiraltrappor är något problem.

Trappklättraren Scalamobil S35/S36 skyddar trappan tack vare ett intelligent och patenterat klättringssystem. Automatiska bromsar borgar för extra säkerhet.

För denna typ av produkt samarbetar vi med "Funka för livet i Sverige". De håller utbildningar, utför service såväl som produktvisningar och är en utav våra återförsäljare av denna produkt.

Besök dem på hemsidan:

<https://www.yourvismawebste.com/funka-for-livet-i-sverige-ab>

För mer information om hur Scalamobil S35 fungerar, klicka in på länken;

<https://youtu.be/ZaGMLaw10-4>



Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar

Mikael Forsman

Produktchef Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

mforsman@invacare.com, 08-5223 70 44



INVACARE INFORMERAR

Personlyftar

Instruktionsfilmer för **SB755 vårdsäng**

Nu är första omgången instruktionsfilmer till SB755 tillgängliga på YouTube. För att på ett enkelt och överskådligt sätt hantera olika funktioner på vårdsängen SB755, så har säng-teamet på Invacare spelat in ett antal instruktionsfilmer. Ta en titt och återkom gärna till oss om du saknar någon film som skulle göra din vardag enklare.

Se spellistan här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRgduYzx3f_NtYqQUOHEypJ1sqOpqAzXT

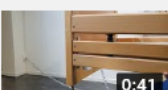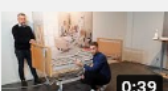1		Byta elektronik SB755 Invacare Sverige 2:33
2		Byta manöverdosa SB755 Invacare Sverige 0:45
3		Byta motor SB755 Invacare Sverige 1:01
4		Förlänga säng SB755 Invacare Sverige 1:48
5		Montera & demontera gavlar SB755 Invacare Sverige 0:42
6		Montera & demontera grindar SB755 Invacare Sverige 0:41
7		Nödsänka huvudändan SB755 Invacare Sverige 0:39

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Anna-Karin Eskilsson
Produktchef Sängar & Personlyftar
akeskils@invacare.com, 08-5223 7042

INVACARE INFORMERAR

Gånghjälpmedel

NYHET Dolomite Gloss rollator

Under våren 2021 har den nya rollatorn Gloss lanserats. Med sin lätta vikt, under 7 kg och en handtagshöjd från 63,5 cm upp till 105 cm i kombination med en maximal brukarvikt upp till 160kg så har Gloss en fantastisk bredd för användare med olika behov.

Ta en titt på vår hemsida eller låt någon av våra säljare visa upp Gloss via Teams eller fysiskt möte om så tillåts.



Hopfälld blir rollatorn endast 19cm bred.

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Marie-Louise Tham
Produktchef Gång- och Hygienhjälpmedel
mltham@invacare.com, 08-5223 7020

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggssystem



Johanna Koch
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Södermanland,
Östergötland



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Värmland,
Västmanland,
Gävleborg,
Dalarna, Örebro



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland



Dan Emmertz
Distriktsansvarig
Skåne, Blekinge,
Halland, Kronoberg,
Kalmar



Monica Hernquist
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping

jkoch@invacare.com
070-224 58 82

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

demmertz@invacare.com
070-190 21 63

mhernqui@invacare.com
070-340 32 53

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggssystem



Peder Tägtström
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland



Anna Landsmann
Distriktsansvarig
Uppsala,
Stockholm



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Dalarna,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Värmland



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33

alandsma@invacare.com
070-396 91 01

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Sängar, Personlyftar och Madrasser



Keith Kågström
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08



Maths Fuxinger
Distriktsansvarig
Västra Götaland

mfuxinge@invacare.com
0708-32 07 75



Mats Adelros
Distriktsansvarig
Halland, Blekinge,
Kronoberg, Skåne,
Jönköping

madelros@invacare.com
070-677 33 80



Anton Enlund
Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Kalmar,
Södermanland,
Östergötland

aenlund@invacare.com
0720-70 52 71



Per-Olof Fallemark
Distriktsansvarig
Värmland, Uppsala,
Västmanland,
Södermanland
Örebro, Gävleborg,
Dalarna


pfallema@invacare.com
070-204 67 60

Gång- och Hygienhjälpmedel



Christina Nilsson
Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

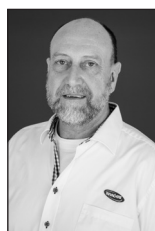

Per Danielsson
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Värmland

pdaniels@invacare.com
073-274 44 19



Bertil Lundh
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Dalarna

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Keith Kågström
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Oxygenprodukter



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Anna Landsmann

Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Värmland,
Uppsala,
Västmanland,
Södermanland,
Örebro, Gävleborg,-
Dalarna

alandsma@invacare.com
070-396 91 01



Christina Nilsson

Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Västra Götaland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

Key Account Managers



Johan Bergkvist

Key Account Manager

jbergkvi@invacare.com
070-191 90 75



Christer Nyqwist

Key Account Manager

cnyqwist@invacare.com
070-459 97 22

Du vet väl att vi finns på Facebook, klicka förbi direkt och Gilla vår sida!



På vår Facebook-sida kan du följa oss på nära håll, se spännande nyheter, läsa artiklar, delta i tävlingar och mycket mer. Dessutom kommer vi att dela några av de många inläggen från vår bloggsida Passionate people!

Välkommen in!

www.facebook.com/InvacareSverige