

INVACARE INFORMERAR

www.invacare.se

JUNI 2021



I detta nummer:

Manuella rullstolar

s 2-4

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

s 5-7

Hitta din kontaktperson

s 8-10

INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

*Justerad infästning till vaddyna **Azalea***

Vadstödsdynan har upplevts som för rörlig, nästan lös, i sin infästning. Som informerats om tidigare ska den göras trögare. Den förändringen är nu gjord och rullstolar som tillverkas sedan i slutet av v16 ska ha mera friktion och mindre "spel" i infästningen. Se bifogade bilder som visar skillnaden i tröghet mellan nya och gamla infästningen.

Det som är förändrat är att den hylsa med gäng som man skruvar fast själva vadstödsdynan i har gjorts några mm kortare.



Bild 1, visar hylsan, inringat i blått. Resultatet blir att man då kan dra åt vaddynan så den blir både stabilare och trögare i sina rörelser.



Bild 2, tv, visar på hur mycket hylsan har stuckit ut och bild 3, th, på hur det ska se ut framöver. Det är inga skillnader på dynan eller i hur mycket dynan kan röras utan enbart hur lätt den rör sig.



Bild 4, visar samma hylsa men motsatt sida

INVACARE INFORMERAR

Manuella rullstolar & Sportprodukter

Artnr 1536613 tillfällig produktförändring

Vi vill meddela att det tillfälligt **kan** bli ett annat däck på artiklarna 1536542 och 1536613. Det råder brist på däck från vår underleverantör och för att undvika förseningar på kompletta rullstolar så kan det bli ett annat däck monterat på hjulet.

Vi gör allt för att inte behöva byta däck men vill informera om utifall det ändå skulle bli nödvändigt.

Det däck som ersätter är av märket Maxxis, med samma dimension. De visuella skillnaderna är att färgen är lite mörkare grå och att det svarta bandet på sidan saknas. På bilderna nedan ses det nya däcket till höger i bild.



INVACARE INFORMERAR


Manuella rullstolar & Sportprodukter

Äldre modell av vinkelställbara benstöd till **Produkt?**

Vår underleverantör har beslutat sig för att sluta tillverka delar till de vinkelställbara benstöden som ersattes under våren 2019. Dessa benstöd har inte levererats på kompletta rullstolar sedan 2019.

Det gäller artikelnummer 1513007 och 1513006.
Bild nedan, till vänster

Alla beställningar kommer därför ersättas med SP60122669 och SP60122670.
Bild nedan, till höger

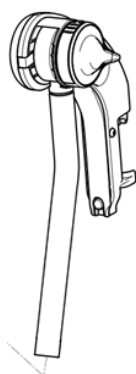

Gammalt benstöd, utgått



Nytt benstöd, ersätter

Vi ber om ursäkt för de problem detta kan skapa för er.

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Joakim Sköldfelt
Produktchef Manuella rullstolar och Sportprodukter
jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05

INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat

Uppdaterade höjdställbara körhandtag, Viamobil V25

Under slutet av maj / början av juni kommer det en uppdatering på de extra höjdställbara körhandtagen till Viamobil V25.

Istället för metall upptill på de extra körhandtagen byts denna del ut till en glasfiberförstärkt plast.

Den nya versionen av de extra körhandtagen är fullt bakåtkompatibla med äldre Viamobil V25.

Alla artikelnummer för reservdelarna (par, vänster, höger) förblir desamma.



INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

e-motion M25 & SMOOV one intrångsskydd

E-MOTION®

SMOOV

I vårt senaste Invacare Informerar #1 2021 nämndes att med den nya MDR-förordningen som börjar gälla nu i maj 2021, krävs det säkerhetsåtgärder för medicinsk utrustning med trådlös uppkoppling till en smartphone eller extern styrenhet. Detta för att skydda från intrång av obehörig tredje part ("hackare").

När det gäller SMOOV one implementerades säkerhetsuppdateringen redan i juli 2020 och för e-motion M25 är alla nya enheter levererade efter 01.01.2021 utrustade med QR-kod för cybersäkerhet*.



E-motion M25 är nu utrustade med en extra QR-kod på hjulnavet. För SMOOV one är detta klistermärke placerat på undersidan av drivenheten. Dessa koder måste skannas när du ansluter till smartphone-appen (parningsprocessen) för första gången.

På samma sätt har kontrollenheten till SMOOV one och ECS-fjärrkontrollen till e-motion M25 dessa QR-koder fastsatta på baksidan. Dessa koder bör inte tas bort. Kontrollenheter och ECS-fjärrkontroller som levereras från fabriken tillsammans med en ny enhet är redan anslutna till drivenheterna, inget förändras och inga ytterligare steg krävs.

Men när man byter ut eller kompletterar med en styrenhet till en O10 eller M25 krävs motsvarande smartphone-app för en engångs-sammankopplingsprocess. Under denna sammankopplingsprocess måste QR-koden på kontrollenheten eller ECS-fjärrkontrollen skannas via smartphone. De gamla och nya versionerna (med och utan QR-kod) är inte kompatibla med varandra.

*Befintliga system levererade innan detta datum påverkas inte av den här uppdateringen.

INVACARE INFORMERAR

Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

Scalamobil den mobila trappklättraren till din rullstol

Vår trappklättrare Scalamobil S35 kan anpassas till rullstolen vid behov och göra det möjligt att övervinna trappor av alla slag med liten ansträngning. Inte ens spiraltrappor är något problem.

Trappklättraren Scalamobil S35/S36 skyddar trappan tack vare ett intelligent och patenterat klättringssystem. Automatiska bromsar borgar för extra säkerhet.

Till Scalamobil så finns även ett universalfäste, Scalaport X7, detta gör att man kan nyttja samma trappklättrare för flera olika rullstolsmodeller.

För denna typ av produkt samarbetar vi med "Funka för livet i Sverige". De håller utbildningar, utför service såväl som produktvisningar och är en utav våra återförsäljare av denna produkt.

Besök dem på hemsidan:

<https://www.yourvismawebste.com/funka-for-livet-i-sverige-ab>

För mer information om hur Scalamobil S35 fungerar, klicka in på länken;

<https://youtu.be/ZaGMLaw10-4>



Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Mikael Forsman
Produktchef Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen
mforsman@invacare.com, 08-5223 70 44

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggssystem



Johanna Koch
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Södermanland,
Östergötland



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Värmland,
Västmanland,
Gävleborg,
Dalarna, Örebro



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland



Dan Emmertz
Distriktsansvarig
Skåne, Blekinge,
Halland, Kronoberg,
Kalmar

jkoch@invacare.com
070-224 58 82

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

demmertz@invacare.com
070-190 21 63

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggssystem



Peder Tägtström
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland



Anna Landsmann
Distriktsansvarig
Uppsala,
Stockholm



Håkan Johansson
Distriktsansvarig
Dalarna,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Värmland



Martin Tornberg
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33

alandsma@invacare.com
070-396 91 01

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Sängar, Personlyftar och Madrasser



Keith Kågström
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08



Maths Fuxinger
Distriktsansvarig
Västra Götaland

mfuxinge@invacare.com
0708-32 07 75



Mats Adellos
Distriktsansvarig
Halland, Blekinge,
Kronoberg, Skåne,
Jönköping

madelros@invacare.com
070-677 33 80



Anton Enlund
Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Kalmar,
Södermanland,
Östergötland

aenlund@invacare.com
0720-70 52 71



Per-Olof Fallemark
Distriktsansvarig
Värmland, Uppsala,
Västmanland,
Södermanland
Örebro, Gävleborg,
Dalarna


pfallema@invacare.com
070-204 67 60

Gång- och Hygienhjälpmedel



Christina Nilsson
Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

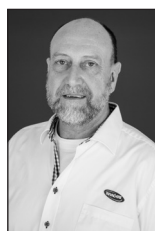

Per Danielsson
Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Värmland

pdaniels@invacare.com
073-274 44 19



Bertil Lundh
Distriktsansvarig
Stockholm,
Uppsala, Gotland,
Västmanland,
Södermanland,
Gävleborg,
Örebro, Dalarna

blundh@invacare.com
070-202 43 32



Keith Kågström
Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08

INVACARE INFORMERAR

Hitta din kontaktperson

Oxygenprodukter



Martin Tornberg

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Västernorrland,
Jämtland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96



Anna Landsmann

Distriktsansvarig
Stockholm,
Gotland, Värmland,
Uppsala,
Västmanland,
Södermanland,
Örebro, Gävleborg,-
Dalarna

alandsma@invacare.com
070-396 91 01



Christina Nilsson

Distriktsansvarig
Jönköping,
Blekinge,
Kalmar, Skåne,
Kronoberg,
Östergötland,
Västra Götaland,
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

Key Account Managers



Johan Bergkvist

Key Account Manager

jbergkvi@invacare.com
070-191 90 75



Christer Nyqwist

Key Account Manager

cnyqwist@invacare.com
070-459 97 22

Du vet väl att vi finns på Facebook, klicka förbi direkt och Gilla vår sida!



På vår Facebook-sida kan du följa oss på nära håll, se spännande nyheter, läsa artiklar, delta i tävlingar och mycket mer. Dessutom kommer vi att dela några av de många inläggen från vår bloggsida Passionate people!

Välkommen in!

www.facebook.com/InvacareSverige