

# VICAIR®

## Till dig som förskriver sittdynor från Invacare

Innehåller produktspecifikationer för:

- Vicair Adjuster O2, 6 & 10 cm
- Vicair Vector O2, 6 & 10 cm
- Vicair Active O2, 6 & 10 cm
- Matrx Libra
- Artikelnummerlista
- Kontaktuppgifter



## DEN OPTIMALA DYNAN FÖR RULLSTOLS- ANVÄNDARE MED KROPPSASYMMETRI

- ▲ Individuell lösning för asymmetri
- ▲ Motverkar glid- och skjuvkrafter
- ▲ Optimal anpassning till kroppens konturer för jämn tryckfördelning

Rullstolsdynan Vicair Adjuster O2 är extra lämplig för användning med asymmetriska kroppskonturer och amputationer. Den hanterar automatiskt små snedställningar och är individuellt justerbar för att stödja mer extrem asymmetri. När du letar efter en hög komfortnivå, optimalt vävnadsskydd och stabilitet: är Adjuster O2 alltid ett säkert val.

Designen tillåter total insjunkning för att jämnt omfördela trycket och förhindrar glidning framåt. Som ett resultat ger Adjuster O2, fylld med trinangelformade Vicair SmartCells, dig optimalt skydd mot vävnadsskador.

Vicair Adjuster O2 består av 5 individuella sektioner, utformade för att konturera under belastning. Varje sektion är designad för att påverka ett specifikt område av bäckenet, skapa en unik balans mellan att bevara hud och underliggande vävnad vid sittbesknölar och svanskoteområdet samt trochanter, positionera bäckenet och stödja lårbenen.

För specifika behov kan fyllningen av vart och ett av de 5 sektionerna enkelt justeras. Tillåter dig att ändra fyllnadsgraden för varje sektion, vilket gynnar användare som: (1) behöver anpassning av en mild till svår fixerad bäckenassymetri eller korrigering av en flexibel bäckenassymetri; (2) dra nytta av ytterligare stöd för låren, till exempel användare med amputation ovanför knäet.



- Optimal temperatur- och fuktreglering
- Fullt tvättbar i maskin



Följer kroppens konturer för jämn tryckfördelning  
| stödjer sittbensknölar/svanskoteområdet | han-  
terar bäckenasymmetri

Mellansektion begränsar  
glidning framåt | omvandlar  
skjuvning till normala krafter



Dragkedja mitt på för enkel  
justering när användaren sitter på  
plats | Dynan behåller sin form,  
vilket förbättrar användarens  
vävnadsskydd

Lårstöd

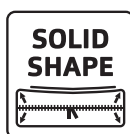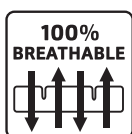

#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Höjd               | 6 och 10 cm |
| Genomsnittlig vikt | 725 g       |
| Max. brukarvikt    | 250 kg      |
| Tvättbar i maskin  | 60°C max.   |

#### DYNSTORLEKAR - ÖVERDRAG

- Brett utbud av storlekar, 35\*35 - 60\*60, storlekar kan variera mellan de olika modellerna.

## DEN MEST STABILA DYNAN FÖR RULLSTOLSANVÄNDARE

Utökar användarens räckvidd

Nio justerbara sektioner för maximal stabilitet



Extra positionering av låren

Ibland är det nödvändigt att avlasta det sårbara området runt sittbensknölna och svanskotan. Rullstolsdynan Vicair Vector O2 gör just det. Dess unika layout av sektioner ger ytterligare komfort, optimalt vävnadsskydd, utmärkt mittplacering av låren och extra bäckenstabilitet.

Vicair Vector O2, fylld med triangelformade SmartCells, erbjuder stöd där det behövs, vilket resulterar i förbättrad funktionalitet i överkroppen och utökad räckvidd.

För specifika behov kan fyllningen av vart och ett av de 9 sektionerna enkelt justeras. Så att du kan ändra tätheten för varje sektion vilket gynnar användare som:

(1) Behöver korrigering eller ackommodation av ett asymmetriskt bäcken. (2) Vill ha (delvis) avlastning av sittbensknölar och svanskoteområdet (3) Behöver korrigering eller anpassning för bättre lårplacering. (t.ex. abduction, sparka sig fram, öppna upp höftvinkeln.)

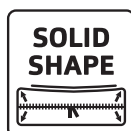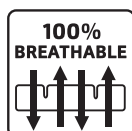

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Höjd               | 6 and 10 cm |
| Genomsnittlig vikt | 725 g       |
| Max. brukarvikt    | 250 kg      |
| Tvättbar i maskin  | 60°C max.   |

### DYNSTORLEKAR - ÖVERDRAG

- Brett utbud av storlekar, 35\*35 - 60\*60, storlekar kan variera mellan de olika modellerna.

- 
- ▲ Optimal temperatur- och fuktreglering
  - ▲ Fullt tvättbar i maskin

Trochanterstöd  
fastare densitet för att ge  
sidostabilitet | omfördelar  
trycket för att skapa en  
sittgrop

Sittgrop - Två sektioner  
för överlägsen tryckminskning vid  
sittbensknölar/svanskoteområde &  
extra positioneringsmöjligheter



Dragkedja mitt på för enkel justering  
när användaren sitter på dynan | Dynan  
behåller sin form, vilket förbättrar  
användarens vävnadsskydd

Främre sektionerna  
ger guidning för låren  
och stabilitet | lätt  
justerbar för individuella  
positioneringsbehov

## FÖR DEN AKTIVA RULLSTOLSANVÄNDAREN

- ▶ Perfekt för användare som förflyttar sig ofta
- ▶ Utmärkt sido- och frontstabilitet
- ▶ Har en snygg förvaringsväska för att ha personliga föremål inom räckhåll

Rullstolsdynan Vicair Active O2 är designad för den aktiva rullstolsanvändaren. Den erbjuder den unika kombinationen av ergonomiskt format skum och Vicair SmartCells. De fyra bakre SmartCell-sektionerna ger en hög nivå av komfort och vävnadsskydd, och avlastar sittbensknölar och svanskotan. Skumfronten gör förflyttningar enkel och känns stadig och förbättrar rullstolshanteringen. Skuminlägget skyddas av ett vätskebeständigt överdrag som är lätt att rengöra. Resten av dynan är fylld med triangelformade SmartCells.

Vicair Active O2 har en lättillgänglig förvaringsväska för värdefulla tillhörigheter (nycklar, telefon, plånbok). Kort sagt: allt du behöver för att behålla din aktiva livsstil!

Vicair Active O2 är en förformad dyna som består av 4 individuella sektioner fyllda med Smartcells i den bakre delen av dynan och ett anatomiskt konturerat skuminlägg framtill. En unik balans mellan att bevara huden i områden med hög risk vid sittbensknölar och svanskota genom omfördelning av tryck, stabiliserar bäckenet och underlättar enkla förflyttningar.



För specifika behov kan fyllningen av vart och ett av de 4 SmartCell-fyllda sektionerna enkelt justeras. Tillåter dig att ändra tätheten för varje sektion användare som: (1) Behöver korrigering eller anpassning av ett asymmetriskt bäcken. (2) Vill ha (delvis) avlastning av sittbensknölar och svanskoteområdet. (3) Dra nytta av ytterligare lateralt stöd.



▲ Optimal temperatur- och fuktreglering

▲ Fullt tvättbar i maskin\*

\* avlägsna skumdelen som inte är tvättbar i maskin

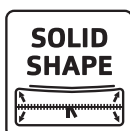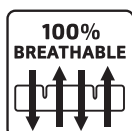

#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Höjd 6 and 9 cm

Genomsnittlig vikt 1250 g

Max. brukarvikt 200 kg

Tvättbar i maskin 60°C max.  
(tvättas utan skumilägg)

#### DYNSTORLEKAR - ÖVERDRAG

■ Brett utbud av storlekar, 35\*35 - 60\*60, storlekar kan variera mellan de olika modellerna.

- Förbättrad design kombinerar skum och silikonbaserad gel för att ge en hög nivå av skydd mot tryck, positionering och justerbarhet för varje individuell användares behov
- Nytt två-lagers geleinlägg utvecklat från Invacares **Flo-tech™** teknik för att motverka skjuvning samt ge tryckavlastning
- Speciellt formad för att ge balans och stabilitet runt bäckenet samt optimera kroppens funktioner
- Lätt och underhållsfri, **Libra** erbjuder både funktionalitet och en aktiv livsstil

### Unik design

- Skumbas - anatomiskt formad för ett optimalt bäckenstöd och positionering
- Tåligt höglastiskt skum
- Geleinlägg - dubbla lager med förseglade fack för maximalt skydd runt benutskott



### Funktionella fördelar

- Inbyggt främre bäckenstöd som motverkar nerglidning och därmed reducerar skjuvkrafter
- Trochanterhylla som understödjer en lateral stabilitet av bäckenet
- Dynan har en utökad bakre form/radie för att motverka bakåttippning av bäckenet
- Avfasad framkant ger utrymme för strama hamstrings och att sparka sig fram
- Ab- / adductorform för en optimal benposition i mittlinje

### Pålitlig och lätt

- Självutjämnande silikongel som inte är temperaturkänslig. Varken knådning eller underhåll krävs
- Med en viktminskning på 40% jämfört med andra högriskdynor t ex **Flo-tech™** dynor, har **Matrx Libra** en låg vikt och lämpar sig för en aktiv livsstil
- För komplexa sittbehov, finns en mängd lättanvända positioneringstillbehör tillgängliga

### Egenskaper och tillbehör



#### Anatomisk sittgrop

Ökad ytarea för optimal tryckfördelning.



#### Tryckfördelning

Trycket förflyttas från bäckenet till låren, detta ger lägre tryck på utsatta riskområden.



#### Nersjunkning

Sittbensknölna sjunker ner i gel inlägget för optimalt skydd.



#### Motverka skjuvkrafter


Unik design ger stabilitet av bäckenet.

## Egenskaper och tillbehör



### Avfasad framkant

Vid strama hamstringsmuskler, underlättar när man sparkar sig fram.

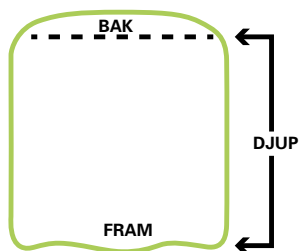

### Dynstorlek

Sittdjup mäts längs med dynans långsida.



### Utökad bakre form/radius

Den bakre delen av dynan har en utökad radius på 3,8 cm för maximal understödsyta och för att minska avståndet mellan sits och rygg. Stabilisering av gelen i tiltad position samt extra avlastning av svanskotan.



### Främre kil

För ökad lutning - motverkar nerglidning och skjuvkrafter.



### Delad främre kil

Används vid nedsatt flexion i höften och/eller för att underlätta att sparka sig fram.



### Avsmalnad kil

För ökat adduktionsstöd.



### Avsmalnad kil

Vid asymmetri och bäckenrotation, används i den bakre delen av dynan.



### Lateral/sidostödsfil

Förstärkning lateral för att stabilisera lårens position.



### Extra geleinlägg

För extra avlastning eller vid asymmetriskt bäcken. Placeras säkert inuti det existerande geleinlägget i den anatomiska sittgroppen.



### Bendelare

Används för att förstärka bendelning och positionering av lårens placering i mittlinje.



### Sidficka för säker förvaring

Utrustad med en dragkedja.



# VICAIR ACTIVE O2 9

## VICAIR ACTIVE O2 9

| ARTIKELNR    | BENÄMNING                                 | MÅTT CM |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
| OCT9/CC/3540 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 35x40x9 |
| OCT9/CC/3545 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 35x45x9 |
| OCT9/CC/3840 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 38x40x9 |
| OCT9/CC/3845 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 38x45x9 |
| OCT9/CC/4040 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 40x40x9 |
| OCT9/CC/4045 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 40x45x9 |
| OCT9/CC/4050 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 40x50x9 |
| OCT9/CC/4340 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 43x40x9 |
| OCT9/CC/4343 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 43x43x9 |
| OCT9/CC/4345 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 43x45x9 |
| OCT9/CC/4540 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 45x40x9 |
| OCT9/CC/4545 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 45x45x9 |
| OCT9/CC/4550 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 45x50x9 |
| OCT9/CC/4840 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 48x40x9 |
| OCT9/CC/4845 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 48x45x9 |
| OCT9/CC/5045 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 50x45x9 |
| OCT9/CC/5050 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 50x50x9 |
| OCT9/CC/5340 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 53x40x9 |
| OCT9/CC/5345 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 53x45x9 |
| OCT9/CC/5550 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 55x50x9 |
| OCT9/CC/5555 | Sittdyna Vicair Active O2 9 exkl överdrag | 55x55x9 |

## VICAIR ACTIVE O2 6

|           |                                           |         |
|-----------|-------------------------------------------|---------|
| OCT6/3540 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 35x40x9 |
| OCT6/3545 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 35x45x9 |
| OCT6/3840 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 38x40x9 |
| OCT6/3845 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 38x45x9 |
| OCT6/4040 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 40x40x9 |
| OCT6/4045 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 40x45x9 |
| OCT6/4050 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 40x50x9 |
| OCT6/4340 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 43x40x9 |
| OCT6/4343 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 43x43x9 |
| OCT6/4345 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 43x45x9 |
| OCT6/4540 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 45x40x9 |
| OCT6/4545 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 45x45x9 |
| OCT6/4550 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 45x50x9 |
| OCT6/4840 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 48x40x9 |
| OCT6/4845 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 48x45x9 |
| OCT6/5045 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 50x45x9 |
| OCT6/5050 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 50x50x9 |
| OCT6/5340 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 53x40x9 |
| OCT6/5345 | Sittdyna Vicair Active O2 6 exkl överdrag | 53x45x9 |

## MATRX LIBRA

| ARTIKELNR | BENÄMNING                                  | MÅTT CM |
|-----------|--------------------------------------------|---------|
| LC1412    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 36x31   |
| LC1414    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 36x36   |
| LC1416    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 36x41   |
| LC1516    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 38x41   |
| LC1518    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 38x46   |
| LC1520    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 38x51   |
| LC1616    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 41x41   |
| LC1618    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 41x46   |
| LC1620    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 41x51   |
| LC1716    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 43x41   |
| LC1717    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 43x43   |
| LC1718    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 43x46   |
| LC1720    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 43x51   |
| LC1816    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 46x41   |
| LC1818    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 46x46   |
| LC1820    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 46x51   |
| LC1916    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 48x41   |
| LC1918    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 48x46   |
| LC1920    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 48x51   |
| LC2016    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 51x41   |
| LC2018    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 51x46   |
| LC2020    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 51x51   |
| LC2118    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 53x46   |
| LC2120    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 53x51   |
| LC2122    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 53x56   |
| LC2218    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 56x46   |
| LC2222    | Sittdyna Matrx Libra inkl standardöverdrag | 56x56   |

## VICAIR RYGGAR

|              |                                                      |       |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| OMFB/CC/3645 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 36x45 |
| OMFB/CC/4145 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 41x45 |
| OMFB/CC/4645 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 46x45 |
| OMFB/CC/3754 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 37x54 |
| OMFB/CC/4054 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 40x54 |
| OMFB/CC/4554 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 45x54 |
| OMFB/CC/5054 | Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag | 50x54 |



## Tillbehör och Överdrag

| ARTIKELNR  | BENÄMNING                               | MÅTT CM  |
|------------|-----------------------------------------|----------|
| VCI10/5050 | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 10 | 50x50x10 |
| VCI10/5340 | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 10 | 53x40x10 |
| VCI10/5345 | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 10 | 53x45x10 |
| VCI10/5550 | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 10 | 55x50x10 |
| VCI10/5555 | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 10 | 55x55x10 |
| VCI6/3540  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 35x40x6  |
| VCI6/3545  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 35x45x6  |
| VCI6/3840  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 38x40x6  |
| VCI6/3845  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 38x45x6  |
| VCI6/4040  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 40x40x6  |
| VCI6/4045  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 40x45x6  |
| VCI6/4050  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 40x50x6  |
| VCI6/4340  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 43x40x6  |
| VCI6/4343  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 43x43x6  |
| VCI6/4345  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 43x45x6  |
| VCI6/4540  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 45x40x6  |
| VCI6/4545  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 45x45x6  |
| VCI6/4550  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 45x50x6  |
| VCI6/4840  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 48x40x6  |
| VCI6/4845  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 48x45x6  |
| VCI6/5045  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 50x45x6  |
| VCI6/5050  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 50x50x6  |
| VCI6/5340  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 53x40x6  |
| VCI6/5345  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 53x45x6  |
| VCI6/5550  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 55x50x6  |
| VCI6/5555  | Överdrag inkontinens sittdyna Vicair 6  | 55x55x6  |

## Överdrag Libra

| ARTIKELNR | BENÄMNING                     | MÅTT CM |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 1584825   | Överdrag standard Matrx Libra | 36x31   |
| 1584826   | Överdrag standard Matrx Libra | 36x36   |
| 1584827   | Överdrag standard Matrx Libra | 36x41   |
| 1584828   | Överdrag standard Matrx Libra | 38x41   |
| 1584895   | Överdrag standard Matrx Libra | 38x46   |
| 1584896   | Överdrag standard Matrx Libra | 38x51   |
| 1584897   | Överdrag standard Matrx Libra | 41x41   |
| 1584898   | Överdrag standard Matrx Libra | 41x46   |
| 1584910   | Överdrag standard Matrx Libra | 41x51   |
| 1584988   | Överdrag standard Matrx Libra | 43x41   |
| 1627471   | Överdrag standard Matrx Libra | 43x43   |
| 1584989   | Överdrag standard Matrx Libra | 43x46   |
| 1584990   | Överdrag standard Matrx Libra | 43x51   |
| 1585022   | Överdrag standard Matrx Libra | 46x41   |
| 1585023   | Överdrag standard Matrx Libra | 46x46   |
| 1585024   | Överdrag standard Matrx Libra | 46x51   |
| 1585025   | Överdrag standard Matrx Libra | 48x41   |
| 1585026   | Överdrag standard Matrx Libra | 48x46   |

## Överdrag Libra

| ARTIKELNR      | BENÄMNING                           | MÅTT CM |
|----------------|-------------------------------------|---------|
| 1585027        | Överdrag standard Matrx Libra       | 48x51   |
| 1585046        | Överdrag standard Matrx Libra       | 51x41   |
| 1585047        | Överdrag standard Matrx Libra       | 51x46   |
| 1585048        | Överdrag standard Matrx Libra       | 51x51   |
| 1585049        | Överdrag standard Matrx Libra       | 53x46   |
| 1585050        | Överdrag standard Matrx Libra       | 53x51   |
| 1585051        | Överdrag standard Matrx Libra       | 53x56   |
| 1585052        | Överdrag standard Matrx Libra       | 56x46   |
| 1585053        | Överdrag standard Matrx Libra       | 56x51   |
| 1585054        | Överdrag standard Matrx Libra       | 56x56   |
| 1585900        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 36x31   |
| 1585901        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 36x36   |
| 1585902        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 36x41   |
| 1585903        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 38x41   |
| 1585904        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 38x46   |
| 1585905        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 38x51   |
| 1585906        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 41x41   |
| 1585952        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 41x46   |
| 1585953        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 41x51   |
| 1585998        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 43x41   |
| 1627473        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 43x43   |
| 1585999        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 43x46   |
| 1586000        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 43x51   |
| 1586005        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 46x41   |
| 1586006        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 46x46   |
| 1586007        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 46x51   |
| 1586008        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 48x41   |
| 1586009        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 48x46   |
| 1586010        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 48x51   |
| 1586011        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 51x41   |
| 1586012        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 51x46   |
| 1586013        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 51x51   |
| 1586014        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 53x46   |
| 1586015        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 53x51   |
| 1586016        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 53x56   |
| 1586017        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 56x46   |
| 1586018        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 56x51   |
| 1586019        | Överdrag inkontinens Matrx Libra    | 56x56   |
| 1578357        | Gelinlägg sittdyna Matrx Libra påse |         |
| 1634585        | Bendelare                           |         |
| 1487158        | Kil avsmalnad används fram o bak    |         |
| 1487157        | Kil främre                          |         |
| 1487155        | Kil sidostöd                        |         |
| 1589366        | Kit box med alla kilar och gelpåse  |         |
| 1445837-VICAIR | SPECIAL - DYNOR INKL ÖVERDRAG       |         |

# Få våra nyhetsbrev

Scanna koden och lämna dina kontaktuppgifter så får du våra digitala nyhetsbrev & inbjudningar framöver.



## Kontakta Dan Emmertz

Distriktsansvarig säljare för Manuella rullstolar, Dynor & Ryggssystem hos Invacare i distrikten: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar län.

Via Dan kan du få reda på mer om:

**Manuella rullstolar**

Aktiva Küschall  
Komfort Azalea/Dahlia

**Dynor/ryggar**

Vicair  
Matrx

**Om du vill nå Dan så finns han här:**

E-post: [demmertz@invacare.com](mailto:demmertz@invacare.com)  
Telefon: 070-190 21 63

