

Rea Azalea



1

•1

Rea Azalea - unika egenskaper


- **Viktförskjutning av tilt - glidande balanspunkt**
Bibehåller rullstolens stabilitet eftersom vikten flyttas framåt/nedåt, tyngdpunkten blir bättre och rullstolen blir lättare att köra. Den främre delen av sitsen höjer sig mindre så att det är lättare att komma in under bord.
- **Ryggstöd Flex 3**
Ryggstödet är multijusterbart och kan anpassas individuellt till olika kroppsformer.
- **24", 22" eller 16" drivhjul**
Alla drivhjul/bakhjul kan monteras i samma chassi.
- **Kroppslängskompensering med höga ledpunkter**
Ryggstödet och benstöden följer kroppen när man vinkeljusterar. Det minskar risken för skjuvning. **Tänk på brukarens placering i stolen!!!**

2

•2

Höga ledpunkter

Addressing Shear

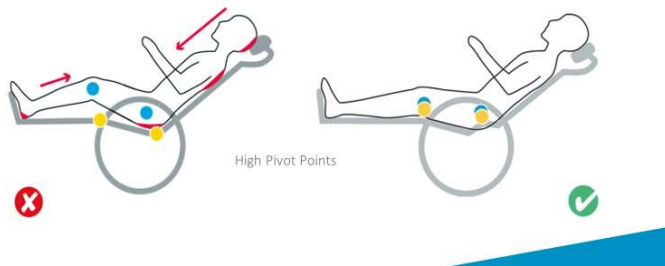

3


•3

Sittdjup och sittbredd


- Sittdjup justerbart 43-50cm (A).
- Sittbredd ram 39 - 44 - 49cm.
Breddjusterbar med armstöds- (B) och benstödsinfästningen (C) - +5cm med 24" hjul och +10cm med 16" hjul.




A

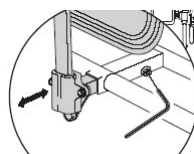

B

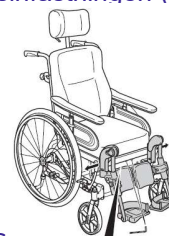

C

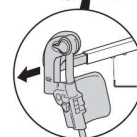

4

•4

Sitthöjd / Brukarvikt

Sitthöjd

45cm med 24" alt. 16" hjul
40cm med 22" alt. 16" hjul
(Azalea Tall har sitthöjd 50cm)

Max brukarvikt

135kg



5

•5

Rea Azalea Tall



Utvecklad för brukare med en längd över 185 cm.

Välj Azalea Tall när standardmodellen är för låg och/eller har för litet sittdjup.

Sitthöjd 50cm

Sittdjup 48-55cm

Chassit är förlängt 5cm

6

•6

Yttermått

- Rullstolens bredd utöver sittbredden

	Azalea	Dahlia
16"	+ 22 cm	+ 16 cm
24"	+ 23 cm	+ 18 cm
24" VB	+ 27 cm	+ 22 cm

7

•7

Ryggstöd Flex 3

Ryggstöd med kardborreband

Används när man har fördel av det ställbara ryggstödet alla justeringsmöjligheter.



Fast ryggstöd

Används för t.ex. korta personer, kraftiga personer och när man behöver ett fast stöd bakifrån.



8

•8


Ryggstöd med kardborreband Flex 3

- Ryggstödet kan höjjusteras 54-71 cm (A).

- Det har två möjliga fasta höjdfästningar med 5 cm höjdskillnad (B). Hög infästning är std. Från det fasta läget kan man även steglöst finjustera rygghöjden.

Hög infästning:
steglös justering 60-71cm

Låg infästning:
steglös justering 54-67cm

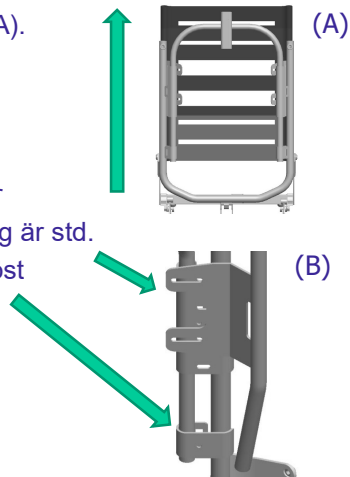

9

•9

Ryggstöd med kardborreband Flex 3

- Ryggrören kan breddjusteras +2,5 cm utåt/framåt på varje sida.
- Eftersom rörelsen är 45 grader framåt, kommer ryggstödet att omsluta brukaren och ge sidostöd.




10

•10

Ryggstöd med kardborreband Flex 3

- Hela ryggstödet kan vändas 180gr för att kunna anpassas till olika kroppsformer. Läge A är std.

Man använder samma skruvar som när man breddjusterar/justerar den fasta rygghöjden.
Lossa skruvarna helt och vänd ryggstödet.

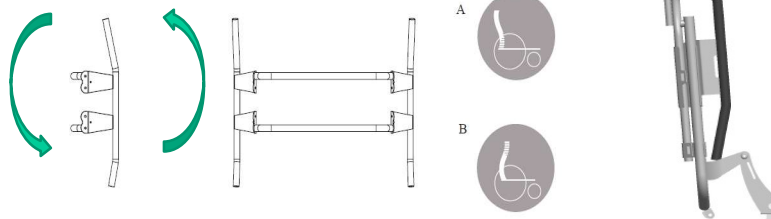


11

•11

Fast ryggstöd Flex 3

- Höjdjusterbar 56-79cm och breddjusterbar +5cm per sida.
- Finns i två varianter – en för ryggdyna Mistral och en för övriga ryggdynor.
- Samma ryggstöd passar alla chassi och sittbredder 39 - 44 - 49cm.

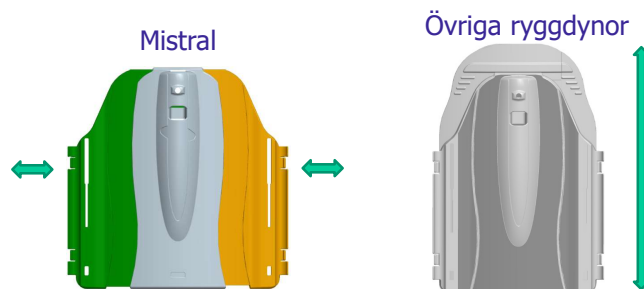


12

•12

Ryggdynor

Ryggöverdrag polstrat

En plan ryggdyna som är följsam för ryggen,
när man justerat ryggbredd och kardborreband.
Passar det ställbara ryggstödet .

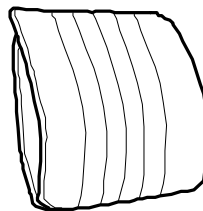

13

•13

Ryggdynor

Laguna


Ryggdyna med laterala stöd.

Mistral

Ryggdyna med formade djupare
lateralstöd för att ge sidostöd men
även rörelsefrihet för armarna.

Passad/Passad hög

Ger stöd för skuldrorna och bäckenet
Finns även i hög modell (+10cm).

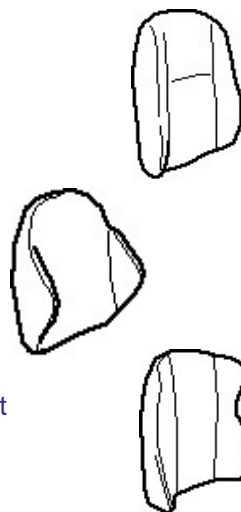

14

•14

Bålstöd

Bålstödsdyna std

En tunnare dyna som är lätt svängd i framkant.



Bålstödsdyna multijusterbar

En dyna med delning så att den kan formas runt om brukaren.



Bålstödsarm rak

Justerbar i sidled och djup.
Har "minne".




Bålstödsarm förhöjd

Justerbar i sidled och djup.
Har "minne".



Bålstödsarm swing away

Justerbar i vinkel, sidled och djup.
Kan svängas åt sidan.

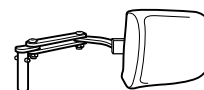

15

•15

Nackstöd och Huvudstöd

Nackstöd

Djupjusterbart.



Huvudstöd med sidostöd

Djup- och sidojusterbart med vinkeljusterbara vingar.



Huvudstöd med käkstöd

Djup- och sidojusterbart med längre vingar.



- Höjdjusteringsröret kan vändas för att få nack/huvudstödet ännu längre fram.

16


•16

Hållare för sele

Hållare för sele

För övre montering av selar/västar.

Monteras på nackstödsröret och är höjdjusterbar.

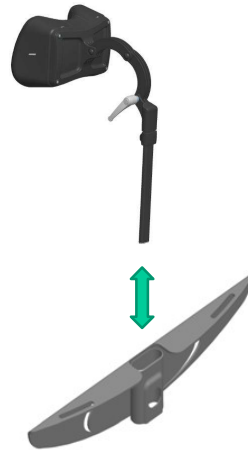


17

•17

Körhandtag / Körbygel

Körhandtag

Körhandtagen kan höjdjusteras.

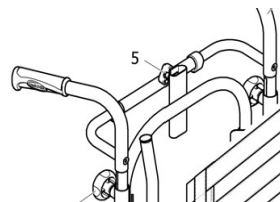

Körbygel

Körbygeln kan höjdjusteras samt vinklas uppåt/bakåt/nedåt för att passa olika långa vårdare, samt möjliggöra för vårdaren att komma närmare brukaren vid förflyttningar.



18

•18

Manuell ryggvinkling och Sitstilt

Ryggvinkling

Ryggstödet kan vinklas 0-30°.



Sitstilt

Sitsen kan tiltas (-1) 0 -- +20° med 22"/24" hjul och (-1) 0 -- +24° med 16" hjul.

- Ryggvinkling och/eller sitstilt kan låsas i ett fast läge med hjälp av tiltlåsningsen.



Tiltskala

Finns som tillbehör och kan användas för att mäta rygg- och/eller sitsvinkel.



19

•19

Elektrisk ryggvinkling och Tilt

- Ryggvinkling och tiltfunktion finns också med el-reglering. Manöverdosan kan betjänas av både brukare och vårdare. Ryggstödet kan vinklas 0-30° och sitsen kan tiltas 0 -- +20°.



20

•20

Tillbehör sits

Bendelare

Två möjliga placeringar i djupled.



Fäste för positioneringsbälte

Främre fäste till positioneringsbälte.
Kompletterar det bakre fästet.




21

•21

Armstöd

Höjd och djupjusterbara

Högre och bredare baktill för att stödja armen även när rullstolen är tiltad.

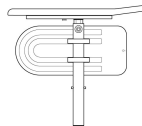


Armstöd/sidostöd

Mjukpolstrade armstöd/sidostöd.



Bredare och mjukare armstöd

För mer komfort.

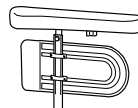

Hemiarmstöd

Höjdjusterbart och svängbart inåt/utåt.



Sidoskyddspolstring

Polstrar och/eller minskar sittbredden.



22

•22

Benstöd

Vinkeljusterbara

Med vadvstöd, vinkel- och djupjusterbara fotstöd, inkl. hälband.


Vinkelfasta 80° eller 90°

Vinkel- och djupjusterbara fotstöd.

Fotplatteförlängare

Kan monteras framåt eller bakåt .

- Fotplattorna finns med korta (24cm) eller långa (36cm) höjdjusteringsrör.

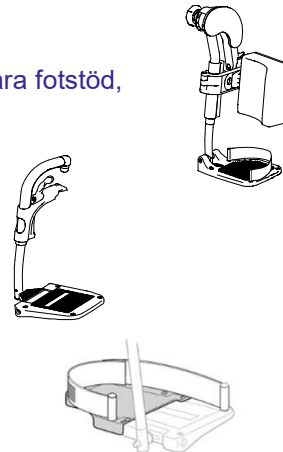

23

•23

Benstöd

Hel fotplatta och Fotlåda

Vinkel- och djupjusterbara.
Hela fotplattan är även uppfällbar.
Kombineras med fasta eller VS benstödsöverdelar.
Håller ihop benen och förhindrar att man fastnar med fötterna bakom fotstöden.

Centralplacerad fotplatta

Höjd- och vinkeljusterbar med individuellt justerbara fotplattor.

Amputationsbenstöd

Djup-, höjd- och vinkeljusterbart.



24

•24

Tillbehör benstöd

Polstring för fotstöd

Finns till hela (A) samt till vinkelställbara delade fotstöd (B). 12mm polstring.



Vadmatta

Kan ersätta vadvädd på de vinkelställbara benstöden eller komplettera fasta benstöd. En storlek.



25

•25

Övriga tillbehör



Polstring bord
Låsning bord
Bord



Midjebälte



Tippskydd/tramprör



Reflexssats



Ekerskydd




Kryckkäpphållare

26

•26

Lycka Till med Rea Azalea Flex 3!

ett steg längre med Säkert Sittande

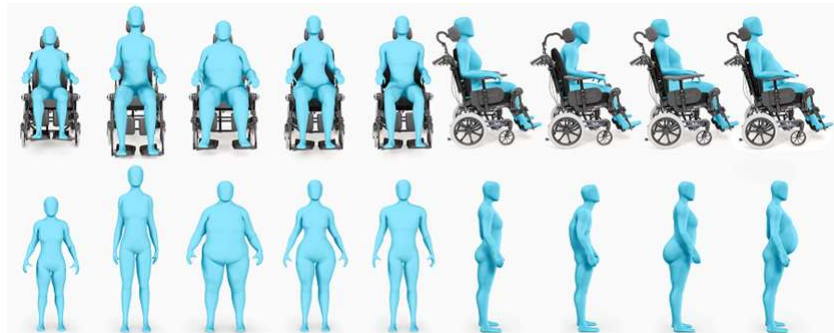

27