

## Instruktioner för rekonditionering av Invacare gåramar

Följande punkter skall gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av Invacare gåramar.

### FÄLLMEKANISM

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Gåramen låser och stannar i utfällt läge.	Byt ut fällmekanismen, annars kassera produkten.		

### HANDTAGSGREPP

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Handtagsgrepp ej är skadade.	När handtag finns som reservdel, byt ut handtagen, annars kassera produkten.		
2	Handtagsgreppen ej enkelt kan vridas.	När handtag finns som reservdel, byt ut handtagen, annars kassera produkten.		

### RAM

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Inga mekaniska skador eller rostangrepp har uppstått på gåramen.	Kassera produkten.		
2	“Anti skrammel” bussningarna i rörändarna är oskadda.	Byt ut samtliga bussningar.		
3	Spärrmekanism för höjjustering låser.	Byt ut spärrfjädern.		
4	Hålen för höjjusteringen inte har utvidgats eller deformerats.	Kassera produkten.		
5	Alla fyra benen har markkontakt på ett plant underlag.	Kassera produkten.		

# Rekonditioneringsanvisning

INVACARE GÅRAMAR



## SKRUVFÖRBAND

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
I	Samtliga skruvförband är åtdragna.	Dra åt skruvförbanden.		

## DOPPSKOR

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
I	Doppskorna är oskadda / oslitna.	Byt ut samtliga doppskor.		

KONTROLL AV GÅSTATIVET ENLIGT REKONDITIONERINGSANVISNINGARNA OVAN SKA UTFÖRAS  
REGELBUNDET.

FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV I VILKEN GRAD GÅSTATIVET HAR ANVÄNTS OCH VILKA  
PÅFRESTNINGAR DET UTSATTS FÖR .

**Kontroll utförd av:**

Namn: \_\_\_\_\_

Gåstativmodell: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Namnteckning: \_\_\_\_\_