

Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
Sigmaringer Str. 100
D . 72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 . 90 96 0
Internet: www.ulrich-alber.de




Artikelnummer [Article number]: VK336002

Rollstuhl: Bediengeräthalterung Scandinavian
[Wheelchair:]

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

e-fix / VK 336002.00

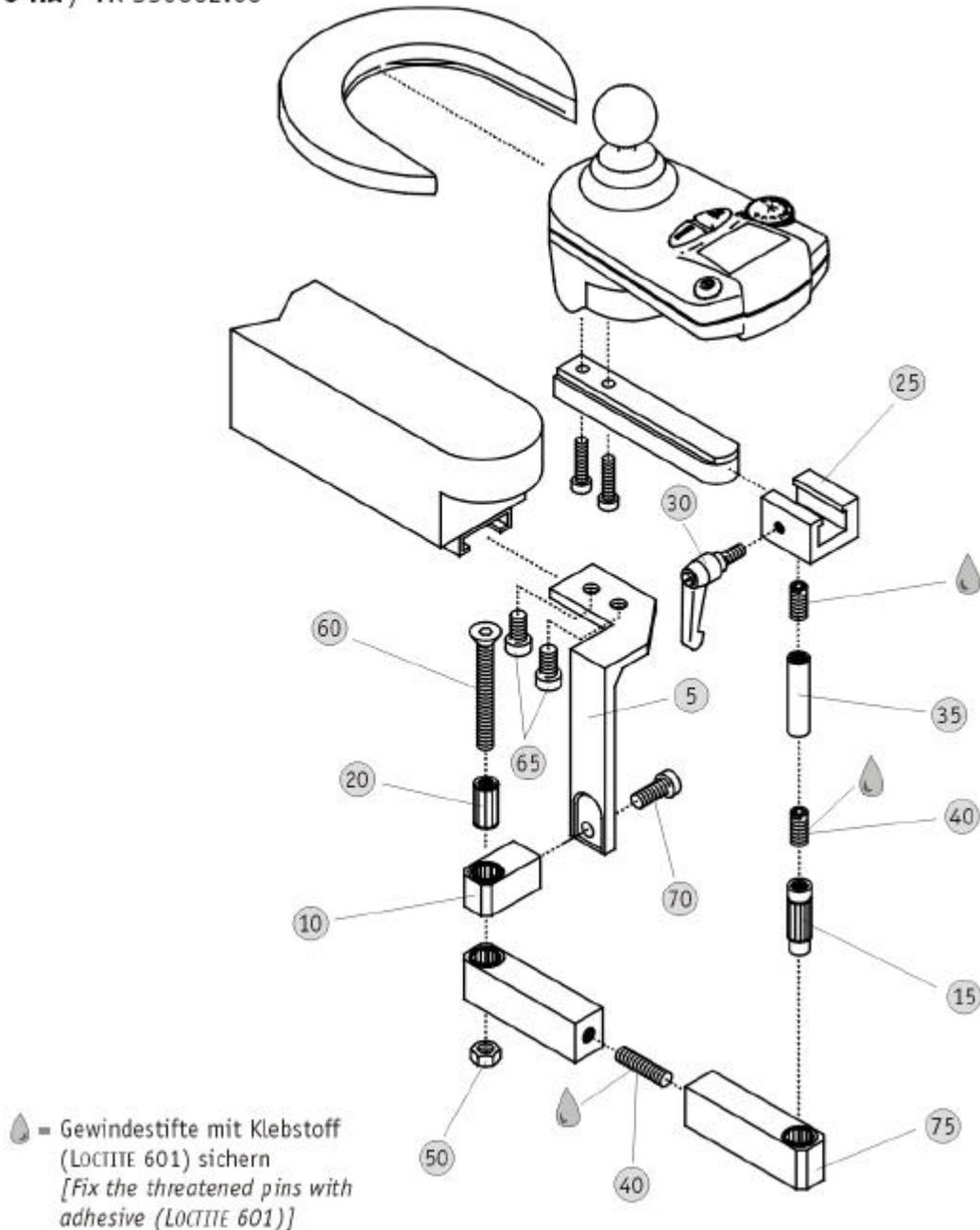

 **Achtung**, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !] 

Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
 Sigmaringer Str. 100
 D . 72458 Albstadt
 Telefon: +49 7431 . 90 96 0
 Internet: www.ulrich-alber.de



Artikelnummer [Article number]: VK336002

Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]	i.O. [O.K]
5	1	Stück [Stück]	200511.0	063/03/07	Halterung rechts, verchromt	
10	1	Stück [Stück]	200447.0	063/02/23	Einsteckteil Rollstuhl 32 mm lang, verzahnt und verchromt	
15	1	Stück [Stück]	200240.0	063/03/14	Verzahnungsteil Messing e-fix, komplett verzahnt	
20	1	Stück [Stück]	200252.0	063/02/15	Verzahnungsbuchse Länge 11,5 mm kompl. verzahnt	
25	1	Stück [Stück]	200046.0	063/01/10	Verschiebeteil e.fix, verchromt Gleitstück für Bediengerätaufnahme	
30	1	Stück [Stück]	090011.0	074/03/08	Klemmhebel m. Außengewinde M6 x 10 e-fix	
35	1	Stück [Stück]	200235.0	063/02/13	Verbindungsrohr 50 mm, verchromt	
40	3	Stück [Stück]	010110.0	PROD	DIN 913 - M8 x 25 - 45H Gewindestift	
45	4	Stück [Stück]	010026.0	PROD	DIN 125 - A 8,4 - St vz Scheibe	
50	1	Stück [Stück]	010156.0	PROD	DIN 985 - M 8 - 8 vz Sechskantmutter	
55	4	Stück [Stück]	010355.0	PROD	Sicherungsscheibe S - 8 - FSt Schnorr	
60	1	Stück [Stück]	010382.0	PROD	DIN 7991 - M8 x 45 - 8.8 vz Senkschraube Gewinde bis Kopf	
65	2	Stück [Stück]	010090.0	PROD	DIN 912 - M 8 x 16 - 8.8 vz Zylinderschraube	
70	1	Stück [Stück]	010339.0	PROD	DIN 7984 - M 8 x 12 - 8.8 vz Zylinderschraube	
75	2	Stück [Stück]	200247.0	063/02/21	Einsteckteil 55 f. 200 242 kpl. geräumt und verchromt	

Geprüft [inspected]: _____

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !

[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]