

Protokoll över återkommande provning av SÄNG/SÄNGLYFT

Kundens namn:		ID nr:
Adress:		Serie nr:
Placering (rum):		Fabrikat:
Telefon:		Typ/År:
Bedömning: Godkänd <input type="checkbox"/> påpekande <input type="checkbox"/> åtgärdas <input type="checkbox"/>		Max-last:
		Provbekastning kg:

01	Rapporterade driftstörningar		05	Inställningsanordningar	
01.1		Ja <input type="checkbox"/>	05.1	Motorer	<input type="checkbox"/>
01.2		Nej <input type="checkbox"/>	05.2	Hydrauler	<input type="checkbox"/>
02	Dokumentation		05.3	Gaskolvar	<input type="checkbox"/>
02.1	Handhavandebeskrivning	<input type="checkbox"/>	05.4	Funktion	<input type="checkbox"/>
02.2	Teknisk dokumentation	<input type="checkbox"/>	06	Underrede/sänglyft	
02.3	Tillbehörslista	<input type="checkbox"/>	06.1	Lyftarmar	<input type="checkbox"/>
03	Märkning		06.2	Hjul	<input type="checkbox"/>
03.1	Maxlast	<input type="checkbox"/>	06.3	Mekanik	<input type="checkbox"/>
03.2	Typbeteckningsskylt	<input type="checkbox"/>	06.4	Lager	<input type="checkbox"/>
03.3	Tillverkare	<input type="checkbox"/>	06.5	Övrigt	<input type="checkbox"/>
03.4	Serienummer	<input type="checkbox"/>	07	Montering	<input type="checkbox"/>
03.5	Tillverkningsår	<input type="checkbox"/>	07.1	Infästning sängbotten/lyft	<input type="checkbox"/>
04	Sängbotten		08	EI	
04.1	Ryggdel	<input type="checkbox"/>	08.1	Manöverdosa	<input type="checkbox"/>
04.2	Mellandel	<input type="checkbox"/>	08.2	Transformator	<input type="checkbox"/>
04.3	Fotdel	<input type="checkbox"/>	08.3	Eldragning	<input type="checkbox"/>
04.4	Sänggram	<input type="checkbox"/>	08.4	Strömanslutning	<input type="checkbox"/>
04.5	Sänggrind	<input type="checkbox"/>	09	Omställningsspakar	<input type="checkbox"/>
04.6	Övrigt	<input type="checkbox"/>	10	Provbekastning	
			10.1		Ja <input type="checkbox"/>
			10.2		Nej <input type="checkbox"/>

Pos	Anmärkning	Åtgärd

Datum:	Kontrollant:	Sign:
--------	--------------	-------

Invacare Servicecenter finns i Stockholm, Göteborg/Mölndal, Oskarshamn & Skåne
 För kontakt, ring: 08-761 70 90

BESIKTNINGSPUNKTER för SÄNG/SÄNGLYFT

01

Rapporterade driftstörningar

Rapporterade driftstörningar på sängen. Om ja, ska orsak anges.

02

Dokumentation

02.1

Finns bruks- och sköteselanvisning tillgänglig?

02.2

Finns reservdelslista och sprängskiss tillgänglig?

02.3

Finns tillbehörslista tillgänglig?

03

Märkning

Sängen skall vara märkt med en läsbar dekal med följande uppgifter:

03.1 Max last

03.2 Typbeteckning

03.3 Tillverkare/leverantör

03.4 Serienummer

03.5 Tillverkningsår

Innan dekalen blir oläslig skall den ersättas av ny dekal med dessa uppgifter. Sängen ska förses med datum för besiktning samt vem som utfört besiktningen.

04

Sängbotten

04.1 - 04.3

Kontrollera följande:

Bandstål/lattor/plåt samt dess infästning till ramen.

Madrasstöd.

Samtliga delar avseende sprickor och deformationer.

Sängbotten avseende lack- och/eller kromskador.

Ev. tillbehör som är monterade på sängen.

Sängbottens samtliga leder.

Ev. wire för rygg/fotdel.

04.4

Kontrollera sängens ramverk (långsidor/gavlar) avseende ihopsättning och slitage.

04.5

Kontrollera följande:

Sänggrindarna avseende bl.a låsning och rörelse.

Att ev mellanläge fungerar samt att mellanlägeshake inte kan orsaka skada.

Segersäkringar, starlock osv på sänggrindarna.

Grindarna avseende skador.

04.6

Kontrollera övrigt, t.ex. sängförlängning.

05

Inställningsanordningar **05.1**

Kontrollera följande:
Gränslägen.
Att ställdon är raka samt smörj vid behov.
Ev. sprickbildning i kåpor.
Att motorfästen är hela.
Infästningar, snabbkopplingar m.m.
Att lyft/sänkrörelse sker med jämn takt.
Lyssna efter oljud.
Kontrollera ev. snabbutlösning för frikoppling av motor.

05.2

Kontrollera följande:
Att sängen inte sjunker vid belastning.
Dragstången.
Ev. oljeläckage.
Infästningar och låsningar.
Pedalgummin.
Pedalrörelse.

05.3

Kontrollera följande:
Att avsedd funktion inte sjunker vid belastning.
Infästningar och låsningar.
Gaskolvens utlösningensanordning/wire.

05.4

Kontrollera den allmänna funktionen på inställningsanordningarna.

06

Underrede/sänglyft **06.1**

Kontrollera följande:
Att inga sprickor eller deformationer finns.
Ev. skevheter och slitage (saxar, dubbellyftarmar, lyftskenor).
Lyssna efter ev. missljud vid rörelse.

06.2

Kontrollera följande:
Fälgskador, rengör hjulen.
Glapp.
Bromsverkan.
Ev. riktningsspärr på hjul.
Slitage på hjulbanor.
Segersäkringar, starlock o.s.v.

06.3

Kontrollera följande:
Leder.
Ev. tappar och stödrullar, infetta dessa.
Ev. teleskoprör.
Ev. pedalupphängning.

06.4

Kontrollera lager och bussningar avseende slitage och glapp.

06.5

Kontrollera avseende lack- och/eller kromskador.

07

Montering

07.1

Kontrollera infästningen mellan sänglyft och säng.

08

El

08.1

Kontrollera följande:

Att manöverdosan fungerar och att manövern stoppas när knapparna släpps.

Att dosan är hel.

Uphängningsanordning.

Sladden.

08.2

Kontrollera följande:

Sprickor och andra otätheter.

Fastsättning.

Att kontakter sitter rätt monterade.

Ev. reservkraftsbatterier.

08.3

Kontrollera så att ledningarna är rätt monterade och inte kan klämmas och att längden räcker till i max-/minläge.

08.4

Kontrollera att stickkontakten och dess ledning är felfri.

09

Omställningsspakar

Kontrollera följande:

Att inga sprickor eller deformationer finns.

Att ev. handtag sitter fast.

Att spakarna har avsedd funktion (chockläge, trendelenburg o.s.v.).

Att märkning finns.

10

Provbelastning

10.1

Provbelastning är av särskild vikt för äldre sängar/sänglyftar.

10.2

Provlasten bör motsvara maxlasten.

Ange med ja/nej samt vikt om provlastning utförts.