

VICAIR®


Vicair® Liberty



Komfort och tryckavlastning



Vicair Liberty ger utmärkt komfort för brukare med låg till medium risk för att utveckla trycksår. Dynan anpassas individuellt och kan användas för olika ändamål där behovet finns för att ge komfort och optimal tryckfördelning. **Vicair Liberty** är enkel att använda och väger endast 300-400 gram.

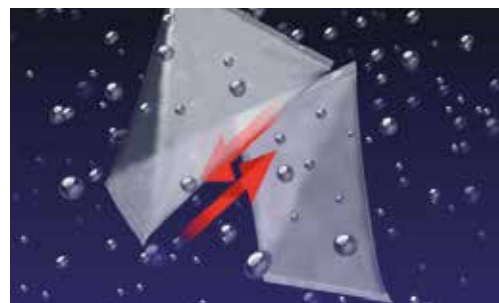

Vicair Liberty teknologi

Vicair Liberty sittdyna består av många tetraformade luftfyllda celler, **Smartcells™**. I **Liberty** dynan är luftcellerna placerade i ett vinylhölje. På luftcellernas yta finns ett tunt skikt med silikonolja som gör att cellerna kan röra sig fritt mot varandra och formar sig optimalt efter kroppen. **Liberty** dynan är otroligt lätt att använda och anpassar sig enkelt med hjälp av en automatisk luftventil.

Perfekt form och tryckfördelning

Vicair Liberty dynan är säker och enkel att använda då ventilen automatiskt reglerar luftmängden i dynan. Dynan anpassar sig då automatiskt efter brukarens kroppsform och vikt. Det enda man behöver göra är att sätta sig. Det innebär att dynan är redo att användas utan inställningar. När man inte sitter på dynan kommer den att återfyllas med luft av sig själv. **Vicair Liberty** används av brukare som behöver en bekväm sittdyna. Den kan användas för att förebygga trycksår hos brukare med låg till medium risk för att utveckla trycksår.

Valmöjligheter



Liberty hygien/ toa

Är en dyna med två sektioner anpassad för användning vid dusch och till toalettstolar. Enkel att montera. Finns i tre storlekar. Storlek 43x43 cm, passar toaförhöjare *Aquatec* **90, 900** och **90000**. Storlek 50x45 cm (har fästband) och 45x50 cm (har sugproppar) passar duschhygienstol **Ocean, Ocean Vip, E-Vip** och **Dual Vip**.



Liberty Basic

Dynan är indelad i två sektioner som ger större tryckavlastning, minskar skjuvning. Dynan är färdig att användas tack vare den automatiska luftventilen.



Liberty Profile

Dyna som ger ökad stabilitet tack vare form och den integrerade skumbasen. Basen är formad i en semi cirkel för att ge mer plats för sittbensknölar. Dynan är färdig att användas tack vare den automatiska luftventilen.



Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.

	Storlek	Vikt	Max brukarvikt	Rengöring ytter- och inneröverdrag
Vicair Liberty	40x40x5-50x50x5 ¹ 40x40x6-45x45x6 ² 43x43-50x45-45x50 ³	0,3 - 0,4 kg	150 kg 180 kg (Liberty med sugproppar)	60°

Garanti: 2 år

1. Storlekar Liberty Basic
1. Storlekar Liberty Profile
2. Liberty Toa

Både standard- och inkontinens-överdrag kan tvättas 60°. Se tvättanvisning i bruksanvisningen

Tillbehör

Standard och inkontinensöverdrag

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

