



Yes, you can.®

Monteringsanvisning Bålstödsfäste XLT Swing / 75 / 90

Montering av fäste på vänster sida (sett bakifrån):

Det övre rektangulära fästets högra skruv skall skruvas fast i ryggavslutningen och det nedre rektangulära fästets högra skruv monteras i ryggröret, så långt isär som möjligt.

De rektangulära fästena kan vid behov även monteras i andra skruvhål än de på bilden. Flytta då först det rektangulära fästets vänstra skruv till nytt hål i det vertikala bålstödsröret.

Montering av fäste på höger sida görs på motsvarande sätt.

OBS! Bålstödsfäste kan ej monteras på ryggstöd med fast höjd.



INVACARE AB

Besöksadress: Fagerstagatan 9, Spånga. PO Box 66, 163 91 SPÅNGA

Tel 08-761 70 90, Fax 08-761 81 08

E-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se



Yes, you can.®

Montering av bålstödsfäste på ryggstöd utan körhandtag (bakifrån)



Montering av bålstödsfäste på ryggstöd med fast eller fällbart körhandtag (bakifrån)



Montering av bålstödsfäste på ryggstöd med bakomliggande körhandtag (bakifrån)



2020-04-22

INVACARE AB

Besöksadress: Fagerstagatan 9, Spånga. PO Box 66, 163 91 SPÅNGA

Tel 08-761 70 90, Fax 08-761 81 08

E-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se