


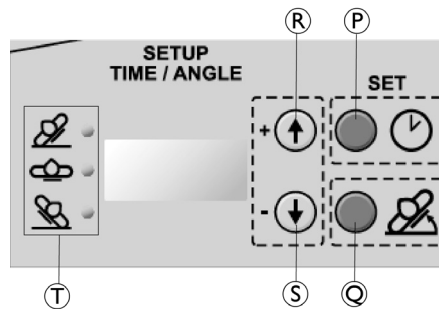






















Soft Tilt 2.0 - Programmering av P1 och P2



- P Knapp för inställning av tid / start av programmering
- Q Knapp för inställning av vinkel
- R Justeringsknapp för plus (öka värden för tid och vinkel)
- S Justeringsknapp för minus (minska värden för tid och vinkel)
- T Positionsvisare (LED)
 - Höger (överst) = höger ving eller position
 - Horisontellt (mellersta) = båda vingarna i horisontell position
 - Vänster (nederst) = vänster ving eller position

När du programmerar Soft Tilt, ställ först in den tid som vingarna är i upphöjt eller plant läge, därefter höjningsvinklarna och till sist vingarnas startsida (höger, vänster eller plant). Detta görs för antingen program 1 eller program 2.

Steg	Funktion		Display	LED	Obs!
1	Tryck och håll i 3 sekunder.		SEL	ingen	Gå över till programmeringsläge
2	Tryck		P1	P1	Välja program som ska ställas in
	eller		P2	P2	
3	Tryck		010	P1 eller P2 & Höger	Tiden visas på displayen
4	Tryck	 	001 020	P1 eller P2 & Höger	Justera tiden mellan 000 och 180 minuter (0, 3, 10–180 i steg om +/-10 minuter)
5	Tryck		010	P1 eller P2 & Horisontellt	Tiden visas på displayen
6	Tryck	 	001 020	P1 eller P2 & Horisontellt	Justera tiden mellan 000 och 180 minuter (0, 3, 10–180 i steg om +/-10 minuter)

Steg	Funktion	Display	LED	Note
7	Tryck 	010	P1 eller P2 & Vänster 	Tiden visas på displayen
8	Tryck  	001 020	P1 eller P2 & Vänster 	Justera tiden mellan 000 och 180 minuter (0, 3, 10–180 i steg om +/-10 minuter)
9	Tryck 	A	–	ett enkelt *PIP* = Tiden har nu ställts in.
10	Tryck 	015	P1 eller P2 & Höger 	Vinkeln visas på displayen
11	Tryck  	014 016	P1 eller P2 & Höger 	Justera vinkeln mellan 00 och 40 grader (i steg om +/-1 grad)
12	Tryck 	010	P1 eller P2 & Vänster 	Vinkeln visas på displayen
13	Tryck  	009 011	P1 eller P2 & Vänster 	Justera vinkeln mellan 00 och 40 grader (i steg om +/-1 grad)
14	Tryck 	-	Ingen	dubbelt *PIP* = vinkeln har nu ställts in och hela programmet sparas.
15	Tryck  	SEL	Höger  Horisontellt  Vänster 	Bestäm sida där Soft Tilt ska starta: HÖGER, PLANT eller VÄNSTER.
16	Tryck 	-	Ingen	tre *PIP* = startside har valts och hela programmet har sparats.



- Om inga knappar trycks under 2 min avslutas programmeringsläget automatiskt utan att några inställningar sparas.