

Rollstuhl [Wheelchair] **Invacare Azalea / Clematis**
Bracket for wheelchair V12




58

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

viaplus V12 / 1520058.02
Rollstuhl [Wheelchair]: Azalea
Sitzhöhe [Seat height]: 45 cm

A Abstand Mitte der Aufnahmegabel zum Boden = 240 mm
Distance from the middle of the mounting fork to bottom: 240 mm

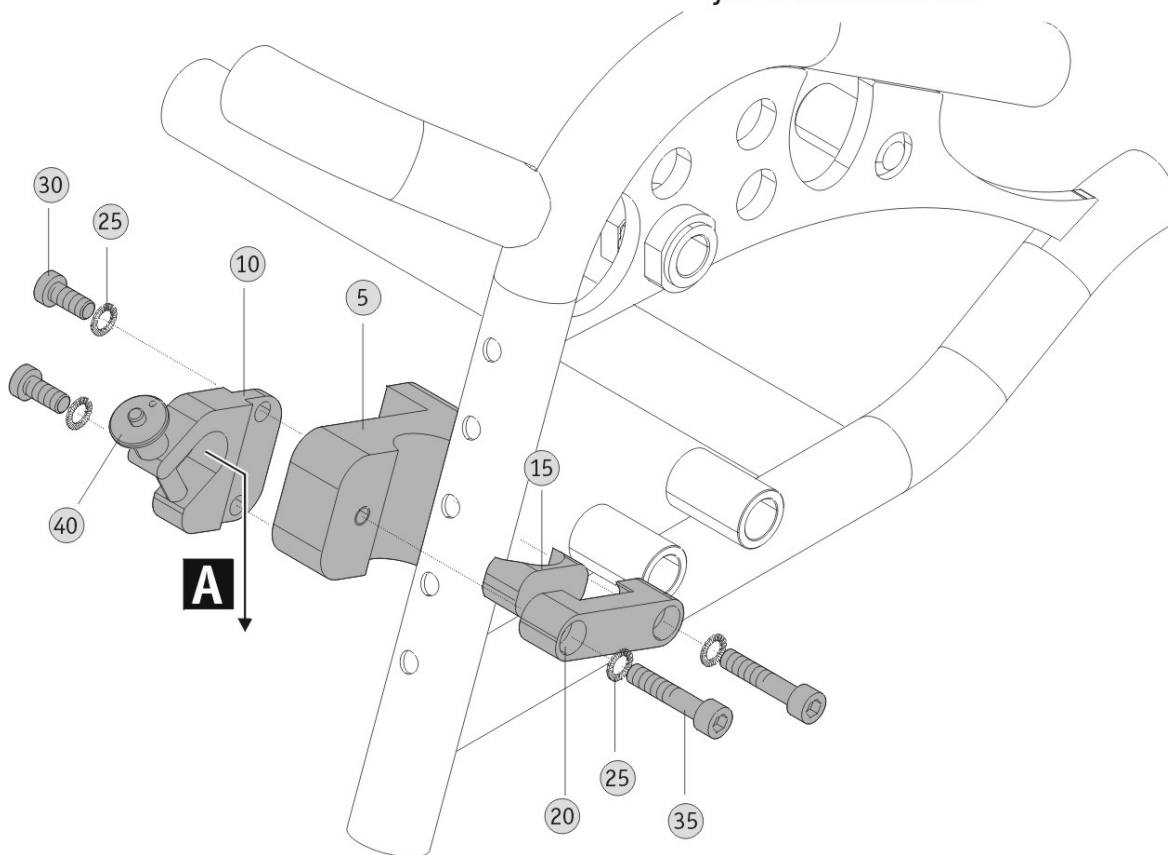

! Das Anbringen von Kippstützen an das viaplus oder den Rollstuhl wird bei Fahrten in der Ebene aus Gründen der Sicherheit dringend empfohlen. Bei Fahrten an Steigungen über 8% ist die Verwendung von paarweisen Kippstützen zwingend vorgeschrieben.
It is strongly recommended that anti-tippers are mounted to your viaplus or wheelchair for drives on flat surfaces! The use of paired anti-tippers is mandatory on drives on uphill slopes over 8%.

! Bitte beachten Sie die auf Seite 4 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern
Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 4

	viaplus V12
Sitzbreite [Seat width]	ab 39 [39 onwards]
Montage [Mounting]:	innen [inside]
Ankipprohr [Tube]:	---

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]

Rollstuhl
[Wheelchair]


Invacare Azalea / Clematis
Bracket for wheelchair V12



58

viaplus V12 / 1520058.02
Rollstuhl [Wheelchair]: Azalea
Sitzhöhe [Seat height]: 42 cm

A Abstand Mitte der Aufnahmegabel
zum Boden = 240 mm
*Distance from the middle of the mounting
fork to bottom: 240 mm*

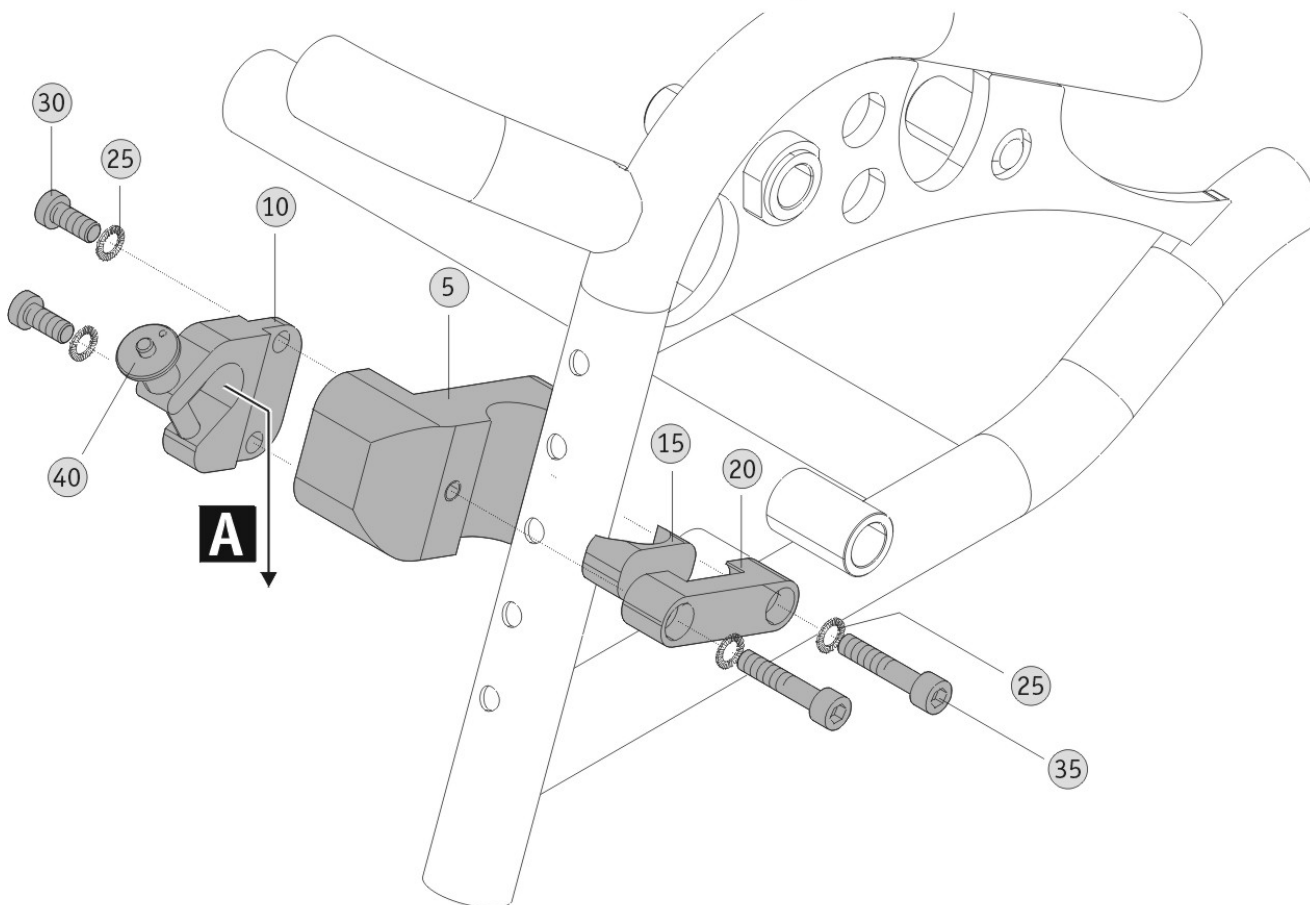

! Das Anbringen von Kippstützen an das viaplus oder den Rollstuhl wird bei Fahrten in der Ebene aus Gründen der Sicherheit dringend empfohlen. Bei Fahrten an Steigungen über 8% ist die Verwendung von paarweisen Kippstützen zwingend vorgeschrieben.
It is strongly recommended that anti-tippers are mounted to your viaplus or wheelchair for drives on flat surfaces! The use of paired anti-tippers is mandatory on drives on uphill slopes over 8%.

! Bitte beachten Sie die auf Seite 4 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern
Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 4


	viaplus V12
Sitzbreite [Seat width]:	ab 39 [39 onwards]
Montage [Mounting]:	innen [inside]
Ankipprohr [Tube]:	---

! **Achtung**, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !] **!**



viaplus V12 / 1520058.02
Rollstuhl [Wheelchair]: Clematis
Sitzhöhe [Seat height]: 45 cm

A Abstand Mitte der Aufnahmegabel
zum Boden = 240 mm
*Distance from the middle of the mounting
fork to bottom: 240 mm*

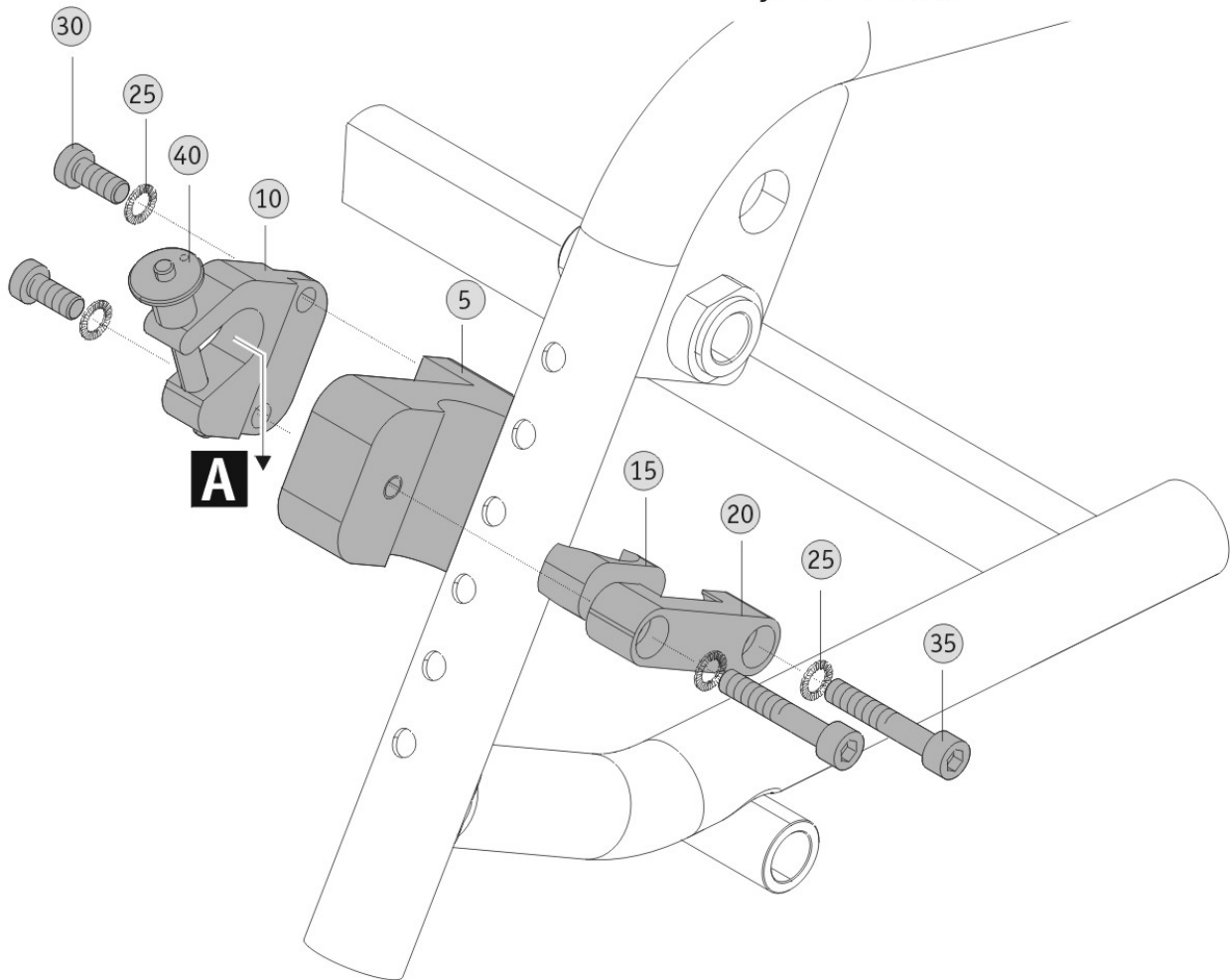

! Das Anbringen von Kippstützen an das viaplus oder den Rollstuhl wird bei Fahrten in der Ebene aus Gründen der Sicherheit dringend empfohlen. Bei Fahrten an Steigungen über 8% ist die Verwendung von paarweisen Kippstützen zwingend vorgeschrieben.
It is strongly recommended that anti-tippers are mounted to your viaplus or wheelchair for drives on flat surfaces! The use of paired anti-tippers is mandatory on drives on uphill slopes over 8%.

! Bitte beachten Sie die auf Seite 4 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern
Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 4

	viaplus V12
Sitzbreite [Seat width]:	ab 39 [39 onwards]
Montage [Mounting]:	innen [inside]
Ankipprohr [Tube]:	---



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !






Sicherung der Schrauben und Muttern

Sofern in der Montageanweisung nicht anders angegeben, sind alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe mit Schraubensicherungen zu versehen (siehe Bilder). Verwenden Sie hierzu WEICON AN 302-43 (blau) / LOCTITE 243 für das Sichern der Adapterhülsen und Schraubverbindungen, sowie WEICON AN 306-01 (grün) / LOCTITE 601 für das Sichern der Verbindungselemente am e-fix Bediengerät.

Locking of screws and screw nuts

If there is no other specification in our mounting instruction: Save all screw fittings which have no locking washer with screw locking adhesive (see pictures below). Use WEICON adhesive AN 302-43 (blue) / LOCTITE 243 adhesive to stick adapter sockets and screws. Use WEICON adhesive AN 306-01 (green) / LOCTITE 601 adhesive to stick the mechanical fasteners of the e-fix control-unit.

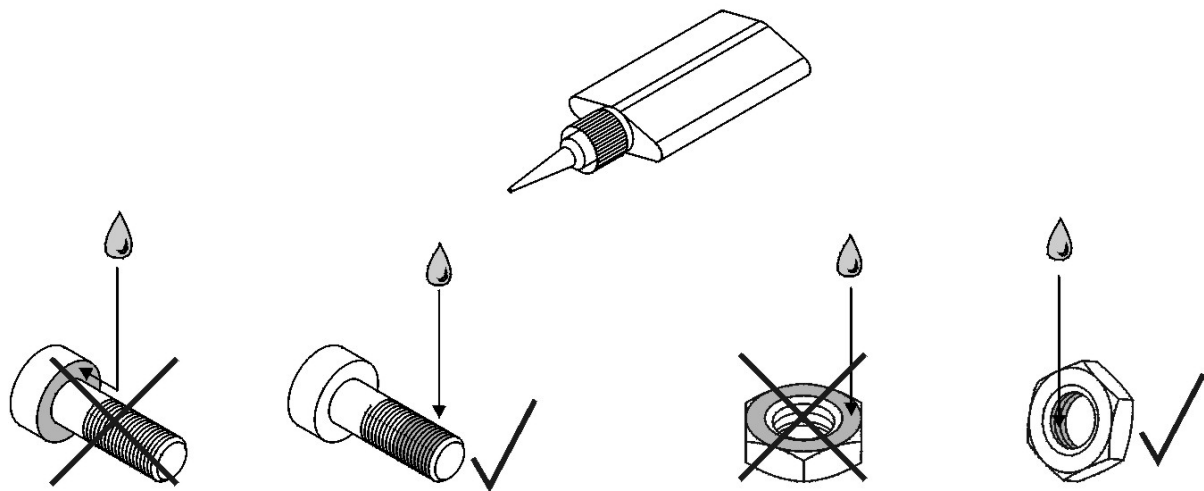

Anzugsmomente für Schraubverbindungen

Fastening torques for screw fittings

Sofern nicht anders angegeben sind Schraubverbindungen wie folgt anzuziehen:
Unless otherwise noted, seize the screw fittings as shown in the following table:

Schraubverbindungen / Screw fitting

Gewinde/Thread	Anzugsmoment/Fastening torque
M3	1,1 Nm
M4	3 Nm
M5	5 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Adapterhülsen / Adapter sockets

Gewinde/Thread	Anzugsmoment/Fastening torque
M16x1	30 Nm



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]



Rollstuhl **Invacare Azalea / Clematis**
[Wheelchair] **Bracket for wheelchair V12**



58

WICHTIGER HAFTUNGSHINWEIS

Eine Kombination der von der Ulrich Alber GmbH (Alber) in Verkehr gebrachten Halterungssysteme mit anderen als den von Alber hergestellten Zusatzantrieben, ist von Alber nicht autorisiert und entspricht nicht dem nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) zu definierenden bestimmungsgemäßen Gebrauch und führt daher zur Nichtkonformität gemäß MPG.

Die Ulrich Alber GmbH lehnt vorsorglich jedwede Haftung hinsichtlich Garantieleistungen oder eventuell entstehenden Sach- und Personenschäden bei einer Kombination von Alber Halterungssystemen mit Fremdfabrikaten ab.

Important Liability Note

A combination of the mounting systems introduced by Ulrich Alber GmbH (Alber) together with auxiliary drives not manufactured by Alber is not authorized by Alber. Such combination does not comply with the intended use to be defined in accordance with the medical device directive (MDD) and therefore constitutes non-conformity according to the MDD.

By way of precaution, Ulrich Alber GmbH rejects any liability regarding warranty services or possibly resulting property damages and personal injuries due to a combination of Alber mounting systems with third party brands.

Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]
05	2	St [St]	1520056	PROD	Halterung Viaplus Azalea / Clematis "gleitgeschliffen"
10	2	St [St]	1463160	719/03/007-009	Standardgabel, blau verzinkt
15	2	St [St]	1467018	721/03/004-005	Einlegeprofil 25 mm, farblos
20	2	St [St]	1467022	718/04/016-017	Klemmstück, farblos eloxiert und trowalisiert
25	8	St [St]	1456223	1560/03/007	Sicherungsscheibe S - 6 - FSt Schnorr
30	4	St [St]	1456209	350/01/062	Zylinderschraube M 6 x 14 8.8 vz
35	4	St [St]	1456192	350/01/023	DIN 912 - M 6 x 30 - 8.8 vz Zylinderschraube gal Zn 5 bk c B
40	2	St [St]	1456406	721/02/004-007	Sicherungsstift (Quickpin)

Bitte bei Erhalt auf Vollständigkeit prüfen! [Please check completeness upon receipt!]

