

XPO₂

Brukarmanual - kortversion

För fullständiga instruktioner och specifikationer hänvisas till den mer detaljerade bruksanvisningen



Sektion 1: Bruksanvisning

- Välj en plats med god ventilation, åtskild från exempelvis gardiner och element. Förvara koncentratorn minst 7,5 cm från väggar och möbler.
- Anslut XPO₂ till ett vanligt eluttag, fordonskontakt eller ett batteri.
- XPO₂ kan inte användas tillsammans med en befuktare.
- Tryck på On/Off knappen i 2-3 sekunder för att slå på XPO₂.
- XPO₂ kommer att återuppta samma flödesinställning som den hade senast den var i drift.
- Ställ in flödet enligt din läkares ordination.
- Pulsflödesmätaren blinkar varje gång den känner av att patienten andas in och ger patienten tillförsel av syre.
- Vid portabel behandling använd den medföljande väskan eller vagnen.
- Tryck in On/Off knappen i 2-3 sekunder för att stänga av XPO₂.



Sektion 2: Ställa in flödesmätaren

- Tryck på + eller – knappen för att justera flödesinställningen.
- Flödesinställningen visas på den upplysta blå indikatorn.

Sektion 3: Alarm och indikatorer

- RÖD lampa som blinkar eller lyser indikerar fel i systemet.
- Indikering åtföljs av ett hörbart larm för att varna patienten.
- Kontrollera den återstående batterinivån genom att snabbt trycka på knappen "Batteristatus". Varje segment utgör 25 % av den återstående batteritiden. Se den utförligare bruksanvisningen för ungefärlig batteritid per flödesinställning.
- Om felet inte kan rättas till, övergå omedelbart till reservkälla för syre och ring din leverantör.

Obs: Se avsnittet Felsökning i Bruksanvisningen för fler detaljer. Kontakta alltid din leverantör om felet kvarstår.

Sektion 4: Rengöring och underhåll

- Ta bort och rengör filterskåpet varje vecka eller oftare beroende på miljön. Använd en dammsugare eller varmt tvålatten för att rengöra. Se till att filtret är torrt innan installation.
 - Rengör höljet med ett mildt rengöringsmedel och en icke-slipande trasa.
 - För allt annat underhåll, kontakta din leverantör.
-

Sektion 5: Säkerhet

- Rök inte och använd inte koncentratorn i närheten av öppen eld.
- Använd inte olja, fett eller andra smörjmedel på eller i närheten av denna produkt.
- Syrgastub, elsladdar eller aggregat får ej övertäckas av exempelvis filter, kuddar, kläder eller liknande.
- Var uppmärksam på risken att snubbla över syreslang och andra tillbehör.
- För att minska risken för brännskador, elchock, brand eller personskador får höljet EJ avlägsnas.
- Kom inte i kontakt med koncentratorn om du är våt.
- Placera eller lagra inte produkten där det finns risk att den kan hamna i vatten.
- Undvik användning vid bad. Om kontinuerlig användning krävs, placera koncentratorn i ett annat rum eller på minst 2,1 m avstånd från badet.
- Plocka inte upp koncentratorn om den faller ner i vatten. Dra ur elsladden omedelbart.
- Om någon del av koncentratorn är skadad vänligen ring din leverantör för reparation.

Uppgifter om din leverantör:

