

ANVISNING

Vad gör man när AQUATEC *BELUGA* inte kan sänkas ned trots laddat batteri

Läs instruktionen noggrant innan du startar!

Var försiktig när du arbetar i lyftsaxens område, så att du undviker klämskador.

A. AQUATEC BELUGA

Typer av fel:

1. Körlåset är aktiverat, badkarslyften kan inte sänkas trots att batteriet är laddat.
2. Badkarslyftens ryggstöd kan inte demonteras från bottenplattan.

B. VERKTYG

1. Stjärnskruvmejsel nr 1.

C. DEMONTERING

1. Ta bort batteriet från batterihållaren.
2. Skruva loss locket till elektronikboxen på ryggstödet genom att lossa de 4 stjärnskruvarna med skruvmejsel nr 1.
3. Ta bort locket och lossa båda motorkablarnas kontakter från kretskortet (se bild 1).
4. Sätt tillbaka batteriet i batterihållaren.
5. Anslut motorkablarnas kontakter med batterikablarna på kretskortet (den bruna motorkabeln med den röda batterikabeln och den blå motorkabeln med den svarta batterikabeln (se bild 2).

OBS! Risk för kortslutning!

(Om säkringen kortsluts, måste säkringen på kretskortet inne i batterilådan bytas ut).

6. Badkarslyften går att sänka.
7. Fäll ner ryggstödet och kroka av det.

Bild 1 motorkablar

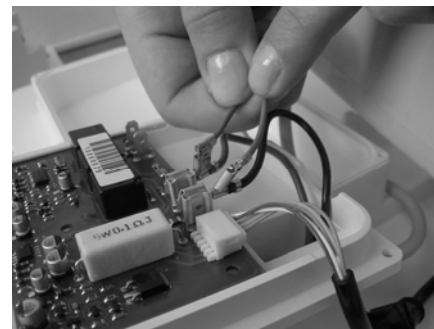
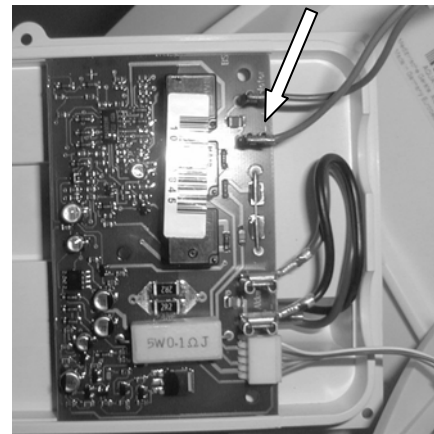


Bild 2