

REKONDITIONERINGSANVISNING FÖR TOALETTSITSFÖRHÖJARE	
Kontrollera att:	Vid fel, gör följande åtgärd
Sits	Sits
Sitsen ej är skadad (sprickor vassa kanter)	Byt ut sitsen.
Infästningar till förhöjningskors inte är skadade	Byt ut sitsen.
Infästningskors inte är skadade	Byt ut förhöjningskorsen
Förhöjningsdelarna sitter fast/ihop ordentligt	Byt förhöjningsdelen
Snäppen på förhöjningsdelarna ej är trasiga	Byt ut förhöjningsdelen
Armstöd	Stativ
Inga mekaniska skador har uppstått på rören	Byt ut armstöden
Inga lackskador finns på stativet	Reparera lackskadorna med Aquatec bättringsfärg.
Armstödsplattor ej är skavda/skarpa kanter	Byt ut armstödsplattorna
Clipsen som fäster armstöden ej sitter löst	Byt clips
Clipsen ej är skadade	Byt clips
Om produkten har vita clips	Byt alltid till röda clips
Infästning	
Antiglidplattor inte är utslitna	Ersätt antiglidplattor
Gänga i överliggare inte utsliten	Byt överliggare
Sidorattar inte skadade	Byt sidorattar
Skruv/mutter detaljer inte skadade	Byt detaljer

Rengöring

Demontera toaförhöjaren innan tvätt och tork.
 Produkterna placeras i fritt läge, inte för nära vägg.

Temperatur: Max. 85 grader under 3 min

Rengöringsmedel: Sprit, vircon på sits.
 Vanliga hushållsrengöringsmedel, ej citronbaserade på övriga detaljer.

**REKONDITIONERINGSFREKVENSEN AVGÖRS AV VILKEN GRAD OCH MED PÅFRESTNING
 PRODUKTEN HAR ANVÄNTS**