



Yes, you can.®

Bruksanvisning

Invacare® Propad Premier DYNA



Återförsäljare:

Invacare AB

Box 66 – 163 91 Spånga

Tel:08-761 7090 Fax:08-761 8108

E-post: sweden@invacare.com, www.invacare.se

MSS

Propad dyna

Innehållsförteckning

1. Användar anvisning	2
2. Produktbeskrivning	2
3. Förflyttning	2
4. Rengöring och underhåll	2
5. Kvalitet	3
6. Garanti	3

Gratulerar

- till ert val av MSS Propad Premier dyna. Produkten är tillverkad för att ge tryckavlastning för brukare, som har låg risk att utveckla trycksår.

Skulle det uppstå problem med den levererade produkten, vänligen kontakta Invacare's Kundservice på tel. 08-761 7090 eller via e-mail sweden@invacare.com.

1. Användar anvisning

- Ta bort allt emballage innan du börjar använda produkten.
- Lägg Propad dynan på en stol med den profilerade ytan uppåt.
- För att göra lagerhanteringen enklare är Propad dynan ihoprullad. Detta påverkar inte dynans prestanda eller livslängd. När dynan packas upp för första gången bör den ligga i minst 20 minuter innan den tas i bruk.
- Det rekommenderas att använda MSS Propad dynan med överdrag. Detta skyddar skummet och förlänger dynans livslängd och prestanda. Inkontinensöverdraget är töjbart i två riktningar, och ger brukaren extra komfort och ökar skumkärnans prestanda.
- Överdragets undersida är av antihalk material vilket innebär att dynan inte glider ur sin position.
- Undvik att lägga något mellan dynan och brukaren då detta kan sätta ned dynans effekt.
- Skummet bör kontrolleras regelbundet. Om överdraget blir förstört, bör dynan inte användas förrän ett nytt överdrag har satts på.
- När överdraget sätts på dynan, kontrollera att dynans hörnor passar precis i överdragets hörnor. Det är också viktigt att dynans profilerade yta vänds uppåt/motsats till undersidan som är av antihalkmaterial.

2. Produktbeskrivning

MSS Propad dynorna är tillverkade av skum, indelat i rutor, som gör det möjligt för brukaren att sjunka ned i materialet och fördela kroppsvikten över en större yta. Att dynan är indelat i rutor tillåter också kroppen att andas. MSS Propad dynan är till för brukare med lågrisk att utveckla trycksår.

3. Förflyttning

Det är fortfarande viktigt att regelbundet göra lägesändring av brukaren om hon/han inte själv kan förflytta sig, vilket ger tryckavlastning och förbygger trycksår.

4. Rengöring och underhåll

Överdraget görs rent med ett lätt rengöringsmedel och en blöt trasa eller maskintvättas i 60 grader. Rengöringsmedel som innehåller fenol och alkohol får ej användas. Överdraget skall vara helt torrt innan det sätts på igen. Det får ej torktumlas. Överdraget tål desinficering.

5. Kvalitet

Produktkvalitet är grundläggande inom arbetet med ISO 9002 och EN 46002. Alla MSS produkter är CE märkta.

Skummet som används i MSS Propad dynorna är testade enligt standarden i BS 5852:1990. Överdraget är testat enligt standarden BS7175:1989 och BS7177:1996.

De är brandtestade.

6. Garanti

Det är 2 års garantitid på både överdraget och skumkärnan.



Yes, you can.[®]

Tillverkad av Medical Support Systems Ltd.
MSS House, Taffs Fall Road, Treforest Industrial Estate, Cardiff, UK, CF37 5TT
Tel: +44 (0) 1443 849 200 Fax: +44 (0) 1443 843 377
E-post: sales@medsys.co.uk Web: www.medsys.co.uk

