

Instruktioner för rekonditionering av DOLOMITE rollatorer

Följande punkter ska gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av Dolomites rollatorer

HJUL/GAFFLAR

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Hjulet snurrar lätt.	Byt hjulet och låsmuttern.		
2	Slitbanan på hjulet inte är skadad.	Drag åt skruvarna (använd permanent låsvätska om låsmuttern inte kan användas).	Använd en ny låsmutter!	
3	Hjulbultarna är ordentligt åtskruvade.	Drag åt skruvarna (använd permanent låsvätska om låsmuttern inte kan användas).	Använd en ny låsmutter!	
4	Skruvarna på framgaffeln är ordentligt åtskruvade.	Drag åt skruvarna.		
5	Framgaffeln är monterad på rätt sätt på ramen.	Drag åt framgaffeln i ramen med 60 Nm.	Symphony: På alla rollatorer som är tillverkade före 2010-09, måste svetsfogarna på framgaffelfästningen inspekteras. Kontrollera att de svetsade fogarna är intakta.	
6	Framgaffeln inte har några skador.	Byt ut gaffeln. Drag åt framgaffeln i ramen med 60 Nm.	Vi rekommenderar att alla framgafflar på Futura/Maxi/Alpha/Symphony/Legacy/Melody som är tillverkade mellan 2006-04 - 2008-01 byts ut.	
7	Bakgaffeln inte har några mekaniska skador.	Byt gaffeln.		
8	Alla hjul är i kontakt på ett plant underlag.	Justera bakhjulen genom att flytta bakhjulet upp eller ned.		
9	Futura: Luftrycket i hjulen är OK när lufthjul används. Kontrollera också att hjulen håller ett konstant tryck.	Byt hjulet, alt. laga punkteringen.	<u>Korrekt luftryck:</u> 250 kPa / 2,5 bar / 2,5 kg/cm ³	

Rekonditioneringsanvisning

FUTURA, LEGACY, SYMPHONY, MAXI, MAXI +



BROMS

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Bromsklacken inte är utsliten.	Byt ut bromsklacken.		
2	Bromsklack går tillbaka efter användning av färdbröms.	Byt bromsklack, alternativt wirar och höljen.		
3	Bromsvajer löper lätt i vajerhöljen.	Byt vajer ev. hölje vid behov.		
4	Full bromseffekt erhålls.	Justera spänning av vajer så att full bromseffekt uppnås.	Avstånd mellan klack och hjul ej får inte överstiga följande mått: Futura med DABS II gaffel: 2 mm Legacy med DABS gaffel: 2,5 mm Legacy med DABS II gaffel: 4 mm	
5	Ändavslutningarna på vajerhöljen ej är skadade.	Byt vajerhölje.		
6	Bromshuset/handtag ej är skadat.	Byt bromshandtag.		

FÄLLMEKANISM

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Rollatorn låser och stannar i utfällt läge.	Byt fällåset inkl fjäder om dessa är skadade.		
2	Skruv i fälled är åtdragen.	Återmontera skruven med låsvätska, använd permanent låsvätska.		
3	Lyftspärren inte är skadad/deformerad.	Byt lyftspärr.		
4	Spärren för låsning i hopfällt läge fungerar.	Byt lyftspärr.		

HANDTAGSGREPP

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Handtagsgrepp inte är skadade.	Byt ut handtagsgreppet/en.		
2	Handtagsgreppen inte enkelt kan vridas.	Ersätt med nya handtagsgrepp. Rengör noggrant innan montering av nya grepp. Använd fettlösande medel utan tillsatser av oljeprodukter t ex ej avfettningemedel, spolarvätska fungerar bra.		

LÅSRATTAR

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Låsrattar låser handtagsrören riktigt.	Byt ut låsratten och låshylsor.		

STATIV

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Inga lackskador finns	Reparera lackskadorna med Dolomites bättringsfärg.		
2	Inga mekaniska skador har uppstått på stativet.	Kassera rollatorn.		
3	Handtagsrör inte är böjda.	Byt ut handtagsröret, alt körhandtaget.		

**KONTROLL AV ROLLATORN ENLIGT REKONDITIONERINGSANVISNINGARNA OVAN SKA UTFÖRAS
REGELBUNDET.
FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV TILL VILKEN GRAD ROLLATORN HAR ANVÄNTS OCH VILKEN PÅ-
FRESTNING DEN HAR UTSATTS FÖR.**

Kontroll utförd av:

Namn: _____

Rollatormodell: _____

Datum: _____

Serienummer: _____

Namnteckning: _____