
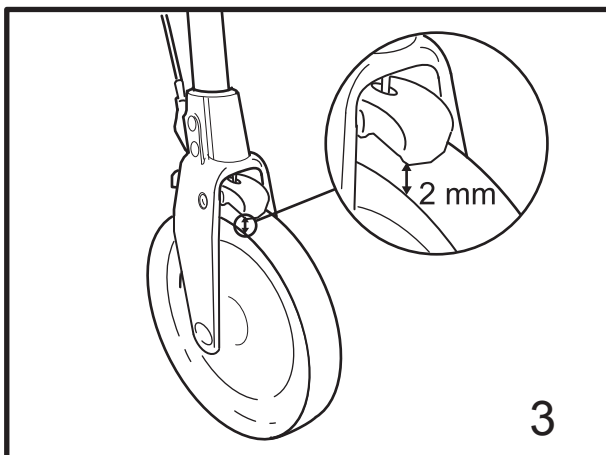
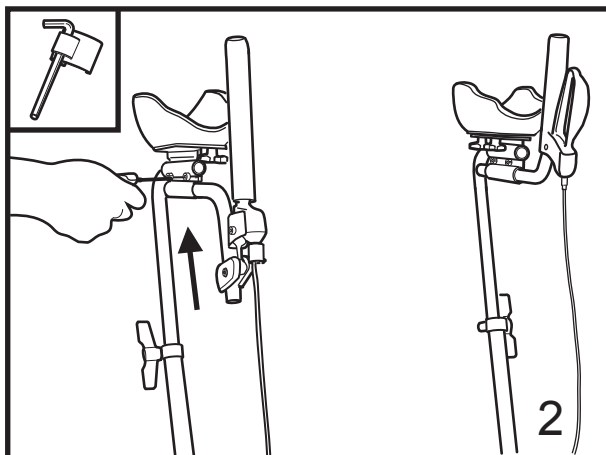


Konverteringskit - Konversion Kit - Umbausatz

13546 DOLOMITE ALPHA BASIC



13547 DOLOMITE ALPHA ADVANCED

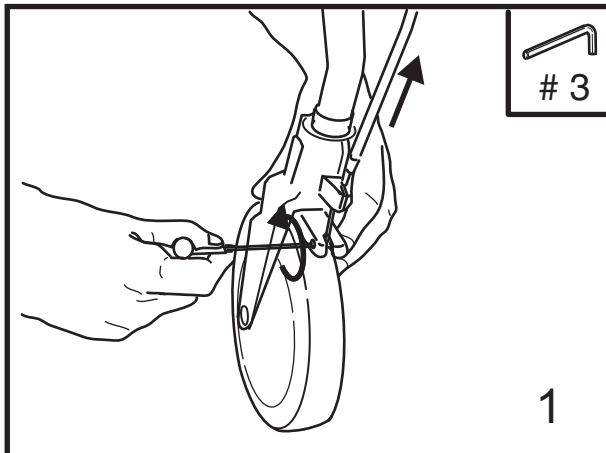

- SV** 1) Lossa vajrarna från bromsklossen, men låt vajerhöljerna sitta kvar.
2) Byt ut befintliga handtag mot ny sats. Bromshandtaget ska vara i neutralläge. Lås vajern med en insexnyckel.
3) Avståndet mellan bromsklack och hjul ska vara ca 2 mm.
4) Justera bromsverkan.
5) Klipp vajern.

- GB** 1) Loosen the wire from the brake stoppers using an, leave the wire covers on.
2) Exchange handles to the new kit. Brake handle is to be placed in neutral position. Lock the wire with an allen key.
3) Distance between brake stopper and wheel shall be about 2 mm.
4) Adjust the brake effect.
5) Cut the wire.

- DE** 1) Kabel vom Bremsschuh lösen mittels Inbusschlüssel, Kabelhülle nicht abziehen.
2) Griffe durch Umbausatz ersetzen, dazu die Tiefenfeststellschrauben lösen. Bremsgriff in neutrale Position stellen. Kabel mittels Inbusschlüssel fixieren.
3) Abstand zwischen Bremsschuh und Rad muss ca. 2 mm betragen.
4) Zur Einstellung der Bremswirkung wird die lange Mutter weiter hoch- oder heruntergeschraubt.
5) Überschüssiges Kabel kürzen.

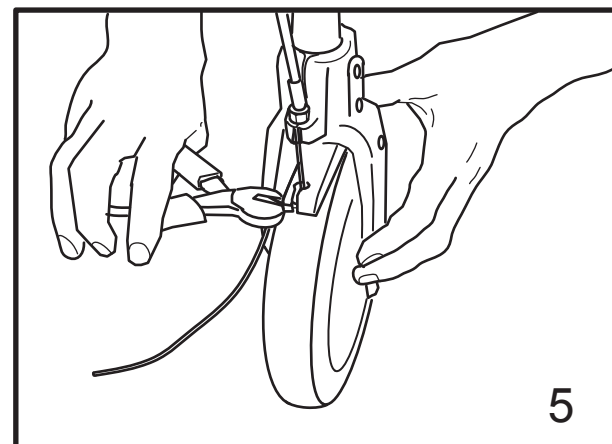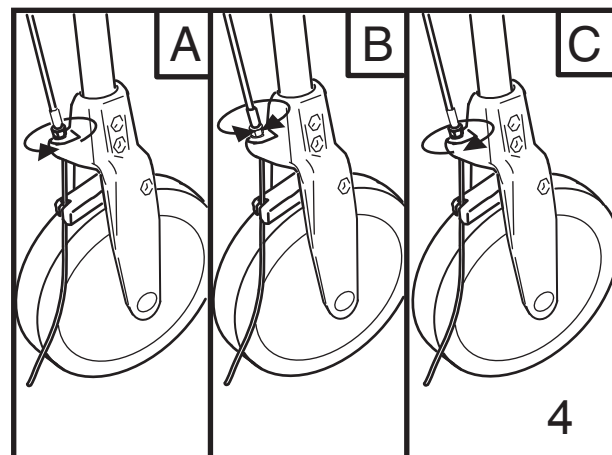

DOLOMITE AB

V. Götgatan 5
S-334 32 ANDERSTORP
TEL +46 (0)371 58 84 00
FAX +46 (0)371 170 90

www.dolomite.se
e-mail: info@dolomite.se