

Rekonditioneringsschema

Hygienstolar, duschpallar och toalettförhöjare

Instruktioner för rekonditionering

Följande punkter skall gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av hygienstolar.
Uppdatering jämfört med tidigare utgåva markerat i texten med understrykning.

HJUL/DOPPSKO

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Länklagren ej är skadade eller går trögt	Byt ut komplett hjul		
2	Hjulet ej går trögt	Rengör ev demontera hjul, återinfetta glidlagret med vattenfast fett och dra åt skruven.	OBS dra åt skruven med högst 6-7 Nm	
3	Slitbanan ej är skadad	Byt hjul	OBS skall limmas med stark gänglåsning. T.ex. Loxeal 83:55	
4	Hjulgafflarna ej är skadade	Byt hjul	OBS skall limmas med stark gänglåsning. T.ex. Loxeal 83:55	
5	Anslutningsbultar till stativet är ordentligt åtdragna	Återmonteras i stativet	OBS skall limmas med stark gänglåsning. T.ex. Loxeal 83:55	
6	Doppsko sitter ordentligt på plats	Byt ut doppsko		
7	Doppsko ej är skadat	Byt ut doppsko		

STATIV

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Inga mekaniska skador har uppstått på stativet	Kassera stativet		
2	Inga lackskador finns på stativet	Reparera lackskadorna med Dolomites bättringsfärg		

FOTSTÖD

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Fotstödsplattorna ej är skadade	Byt ut fotplattorna		
2	Infästningen av fotplattorna ej är skadade.	Byt ur infästningsdetaljerna		
3	Fotstöds rören ej är skadade	Byt ut fotstöds rören	Vid lackskada reparerar med Dolomites bättringsfärg	
4	Fotstödsinfästningen ei stativet ej skadat	Byt ur infästningsdetaljerna		

SITS

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Sitsen ej är skadad (sprickor, vassa kanter).	Byt ut sitsen		
2	Sitsen sitter fast ordentligt på stativet	Byt ut sitsen		
3	Mjuksitsen ej är skadad	Byt ut mjuksitsen		
4	Snäppen under sits ej är skadade	Byt ut sitsen		

Rekonditioneringsschema

Hygienstolar, duschpallar och toalettförhöjare

ARMSTÖDSPLATTOR

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Armstödsplattorn ej är skadade(sprickor och vassa kanter)	Byt ut armstödsplattorna		

RYGG

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Ryggstödet ej är skadat	Byt ut ryggstödet		

VIP- MODELLER

	Kontrollera att/om:	Vid fel gör följande åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Gasfjäder ej är skadad	Byt gasfjäder		
2	Infästning i stativ för gasfjäder ej är skadade och att skruvar är ordentligt åtdragna	Kassera stolen alt dra åt alla skruvar, byt ut låsmutter eller återmontera med stark gänglåsning	Stark gänglåsning tex. Loxeal 83:55	
3	Vajer och vajerhöljen ej är skadade	Byt vajer och vajerhölje		
4	Nackstödet inte är skadat (sprickor och vassa kanter)	Byt ut nackstödet		
5	Armstödslåsningen ej är skadat	Byt ur armstödslåsningen		
6	Ryggklädsels snäpplås låser vid dragkraft	Byt snäpplåset (han-delen) alternativt hela ryggklädseln.		

Rengöring stol/mjuksits

Temperatur: Max 85 grader under 3 min

Rengöringsmedel: Sprit, Vircon på sits och rygg.

Vanliga hushållsrengöringsmedel, ej citronbaserade

**KONTROLL AV PRODUKTERNA SKER ENLIGT SKÖTSELROUTINER OVAN OCH SKA UTFÖRAS
REGELBUNDET.
FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV VILKEN GRAD OCH PÅFRESTNING PRODUKTEN HAR
ANVÄNTS.**

Kontroll utförd av:

Namn: _____

Datum: _____

Namnteckning: _____

Produkt: _____

Serienummer: _____

Invacare AB - Box 66, 163 91 Spånga - Tel: 08-761 70 90 Fax: 08-761 81 08