

Enhet nr: V25_____

Leverantör:_____



Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weissen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432/2006-0
Telefax 07432/2006-299

Arbete

Markera

Kommentar

Hjul

- | | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Kontrollera däckens profildjup | <input type="checkbox"/> | Min.: 1.0 mm |
| Kontrollera att hjulen inte är skeva | <input type="checkbox"/> | |
| Lyssna efter missljud vid framdrivning | <input type="checkbox"/> | |
| Kontrollera att låsmuttrar är åtdragna och sitter fast | <input type="checkbox"/> | |

Manöverenheten

- | | |
|--|--------------------------|
| Kontrollera strömbrytaren för framåt/bakåt | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera strömbrytaren på/av | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera batteriindikatorn | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera att det inte finns sprickor i höljet | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera att hastighetsmätaren fungerar | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera körspak/ säkerhetsströmbrytare | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera kablage och kontakter | <input type="checkbox"/> |
| Gör en slutkontroll medan enheten körs | <input type="checkbox"/> |

Batteripaketet

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kontrollera batterianslutningarna | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|--------------------------|

Slutkontroll

- | | |
|--|--------------------------|
| Kontrollera generell funktion av hela systemet med brukare i rullsolen | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera montering av tipskydden | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera monteringsatser | <input type="checkbox"/> |

Dokumentation

- | | |
|--|--------------------------|
| Byt ut etiketten "Teknisk säkerhetskontroll" på produkten | |
| Märk etiketten med en vattenfast filtpenna. | <input type="checkbox"/> |
| Skriv in datum i fältet för nästa kontroll (24 månaders intervall) | |

Tekniska säkerhetskontroller av Viamobil skall endast utföras av person med ändamålsenlig relevant teknisk bakgrund.