



**Yes, you can.®**


**Monteringsinstruktion för:**

Hälband m pinne L640mm f sb 44-49 st


**SP1672696**

Se instruktionen som en film, klicka på länken <https://youtu.be/GqKhib4VVSY>

1. Ta fram delarna från påsen. Vid behov montera hjälpinne på fotplattan.

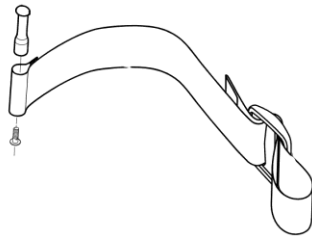

2. Trä in hälbandet underifrån (röd pil), på plastspännet med den släta sidan av hälbandet mot dig. För sedan tillbaka hälbandet, (gul pil) ner genom den andra öppningen. Se bild nedan

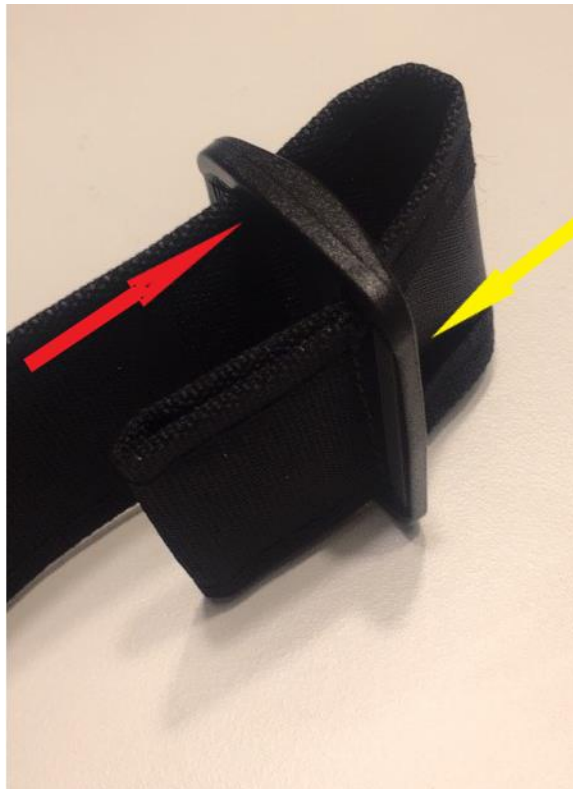

**INVACARE AB**

Besöksadress: Fagerstagatan 9, Spånga. PO Box 66, 163 91 SPÅNGA


Tel 08-761 70 90, Fax 08-761 81 08

E-mail: [sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com), [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



**Yes, you can.®**

3. Sätt fast hälbandet på pinnen som är monterad på fotplattan. Sömmen skall vara bak, markerad i bild nedan.

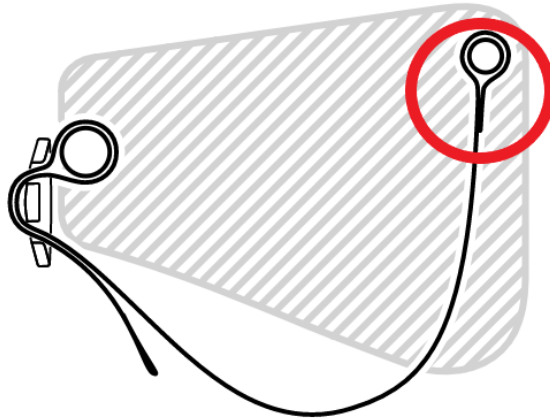

4. För att sätta fast hälbandet, dra efter tillräckligt med band så du kan får hälbandet runt fotplattans rör och tillbaka genom plastspännet, se bild nedan



**INVACARE AB**

Besöksadress: Fagerstagatan 9, Spånga. PO Box 66, 163 91 SPÅNGA

Tel 08-761 70 90, Fax 08-761 81 08

E-mail: [sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com), [www.invacare.se](http://www.invacare.se)




**Yes, you can.®**

5. Sedan låser du fast bandet genom att föra igenom bandet genom den andra öppningen på plastspännet, se bild nedan. Viktigt att tänka på att plastspännet skall vara på utsidan och så nära fotplattans rör som möjligt



6. När det är färdigt ska det se ut så här. Plastspännet i rött

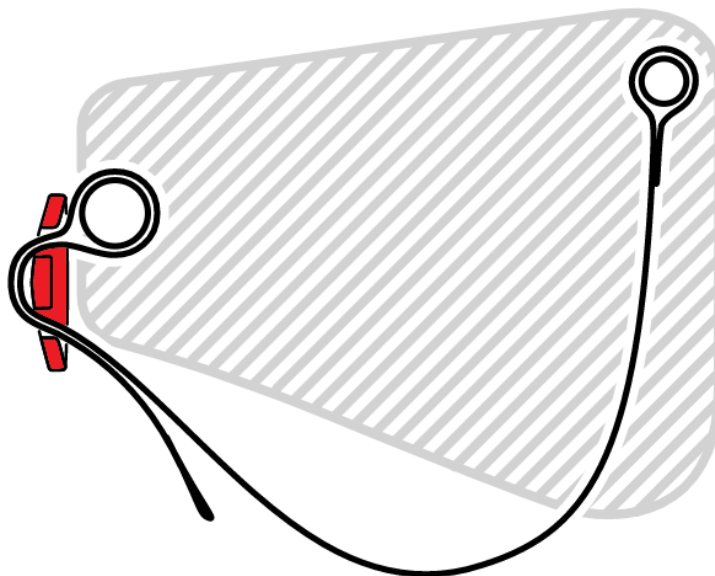

**INVACARE AB**

Besöksadress: Fagerstagatan 9, Spånga. PO Box 66, 163 91 SPÅNGA

Tel 08-761 70 90, Fax 08-761 81 08

E-mail: [sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com), [www.invacare.se](http://www.invacare.se)



**Yes, you can.®**

7. Om det efter justeringen av längden på hälbandet blir en längre del som hänger löst så för man tillbaka den i spännet, markerat i blått.



**INVACARE AB**

Besöksadress: Fagerstagatan 9, Spånga. PO Box 66, 163 91 SPÅNGA

Tel 08-761 70 90, Fax 08-761 81 08

E-mail: [sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com), [www.invacare.se](http://www.invacare.se)