



# Monteringsanvisningar för fast sidostöd: MaTRx-PB elite

## Monteringsanvisningar för fast sidostöd (standard och förskjutet):

- 1 Dra upp nederkanten av klädseln (lossa kardborrbanden) så att monteringsspåren/-kanalerna på bakstycket syns.
- 2 Bestäm önskad monteringshöjd och -inriktning för sidodynorna (övre eller nedre monteringsspår).
- 3 Böj försiktigt på sidostöden tills de har önskad kontur, om tillämpligt (före montering).
- 4 Montera sidostöden provisoriskt på bakstycket med tillhandahållet material. (**Obs!** stödplattan monteras från insidan av bakstycket genom fästena till sidostöden och fästs vid bakstycket med hjälp av brickor och låsmuttrar – se bild nedan).
- 5 Justera sidostöden till önskad position via monteringsspåren på bakstycket och via spåren i fästena till sidostöden. Sätt fast sidostöden på plats.
- 6 Sätt fast ryggstödsklädseln igen med hjälp av kardborrbanden.

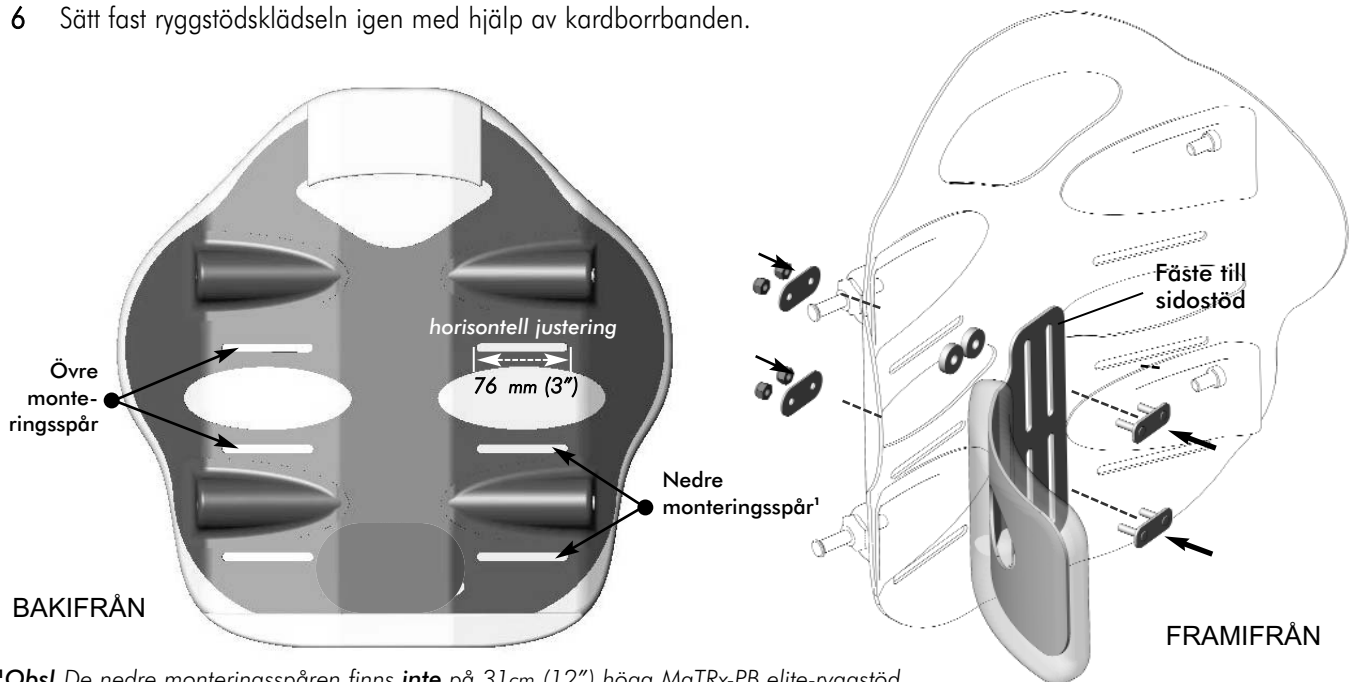



<sup>1</sup>Obs! De nedre monteringsspåren finns **inte** på 31 cm (12") höga MaTRx-PB elite-ryggstöd

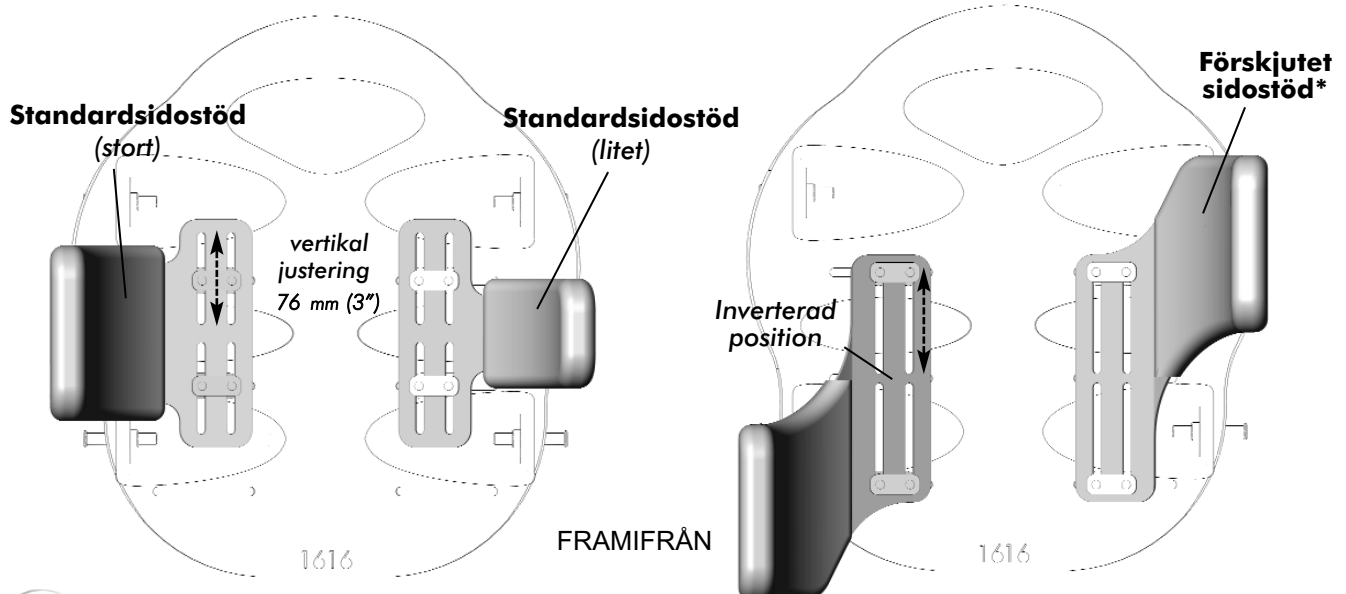

**\*Obs!** Förskjutna sidostöd kan också monteras i inverterad position (enligt bild) för att ge utökat stöd

## Monteringsanvisningar för fasta sidostöd: MaTRx-PB elite (...forts.)



### Montering av standardsidostöd (stor och liten dyna)

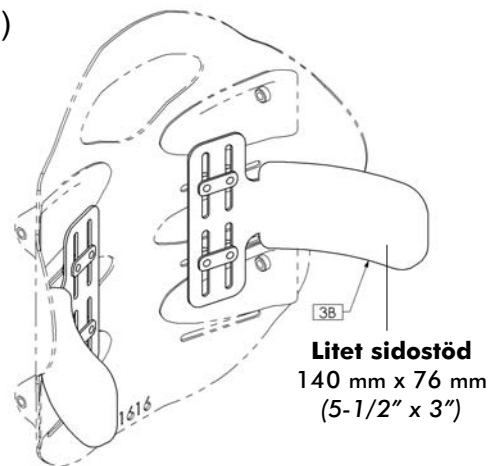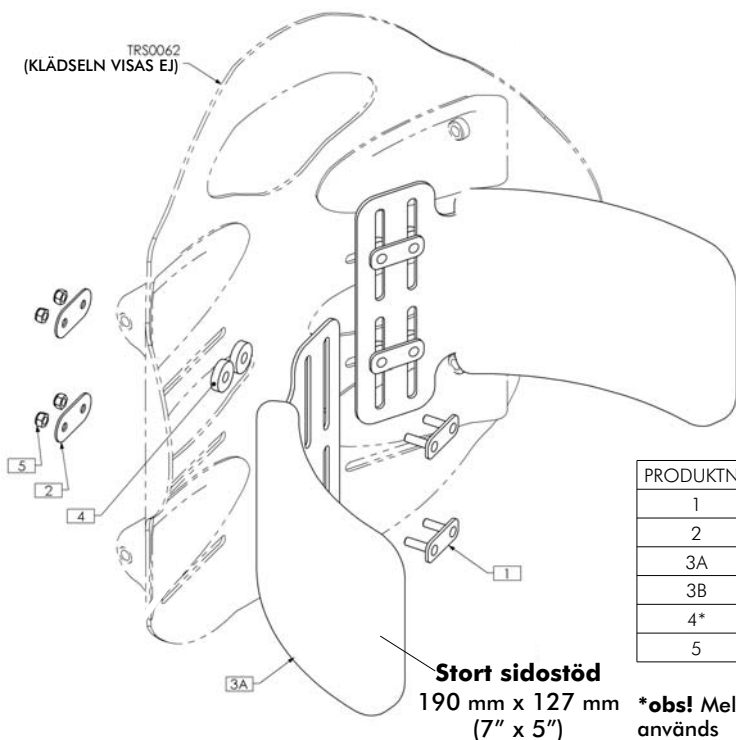

PRODUKTNR	ANTAL	ARTIKELNR	BESKRIVNING
1	4	TRX6480	STÖDPLATTEANORDNING, METRIC
2	4	TRX6481	BRICKA
3A	2	TRM0757	SIDOSTÖD, 7 1/2" X 5" (190mm x 127mm), ELITE
3B	2	TRM0758	SIDOSTÖD, 5 1/2" X 3" (140mm x 76mm), ELITE
4*	8	TRM0775	MELLANLÄGG, 1/4" ID x 3/4" OD x 0,188" THK
5	8	TRH0697	M5 NYLOC-MUTTER, BZ

\*obs! Mellanlägg krävs endast när de övre spåren på bakstycket används

### Montering av förskjutna sidostöd

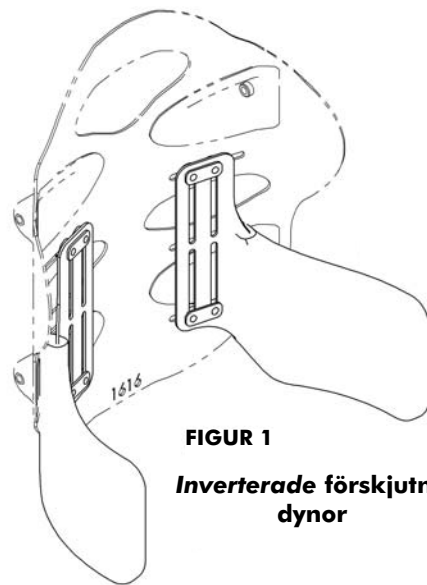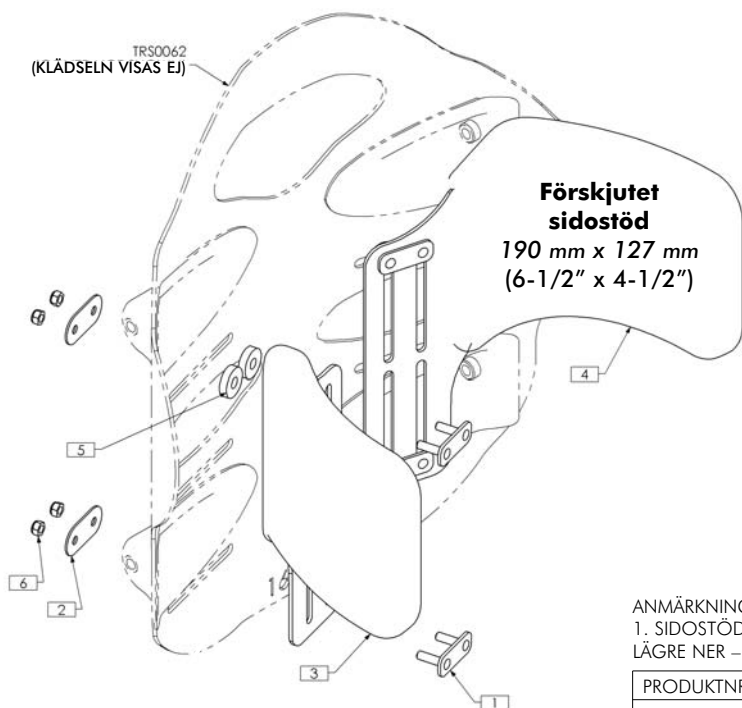



**FIGUR 1**  
Inverterade förskjutna dynor

ANMÄRKNINGAR  
1. SIDOSTÖD KAN MONTERAS UPP OCH NER MITTEMOT VARANDRA FÖR STÖD LÄGRE NER – SE FIGUR 1.

PRODUKTNR	ANTAL	ARTIKELNR	BESKRIVNING
1	4	TRX6480	STÖDPLATTEANORDNING, METRIC
2	4	TRX6481	BRICKA
3	1	TRM0759	FÖRSKJUTET SIDOSTÖD, HÖGER, ELITE
4	1	TRM0760	FÖRSKJUTET SIDOSTÖD, VÄNSTER, ELITE
5*	8	TRM0775	MELLANLÄGG, 1/4" ID x 3/4" OD x 0,188" THK
6	8	TRH0697	M5 NYLOC-MUTTER, BZ

\*obs! Mellanlägg krävs endast när de övre spåren på bakstycket används


 700 Ensminger Rd., Suite 112  
 Tonawanda, NY 14150 USA  
 84 Citation Drive, Units 1-7,  
 Concord, ON L4C 3K1 Kanada  

 www.motionconcepts.com