

Rekonditionering/ förebyggande underhåll
SMOOV O10

System Nr.: O10 _____

Leverantör/kund: _____

Alber GmbH
Vor dem Weifsen Stein 21
72461 Albstadt
Tel. +49 7432 2006-0
Fax +49 7432 2006-299

ATT GÖRA	CHECK	KOMMENTAR
Drivenhet		
Gör en okulär besiktning och titta efter skador på stommen och kåpan	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera däckets profil och tjocklekmin.	<input type="checkbox"/>	0.5 mm
Kontrollera hjulaxelns bult	<input type="checkbox"/>	20 Nm
Lyssna efter missljud från drivhjulet	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att motorkabelns anslutning sitter tight	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att drivhjulet kan rotera fritt	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera höljet till, och funktion av USB-C kontakten	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera LED display	<input type="checkbox"/>	Analog kontroll enhet
Montering		
Kontrollera handtag på drivenhet och att det släpper monteringsbracket när man frigör det	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att monteringsbracket sitter åtdraget	<input type="checkbox"/>	5 Nm
Kontrollera att monteringsbracket sitter centrerat	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att axeln på monteringsbracket sitter monterad i rätt höjd	<input type="checkbox"/>	310 mm
Kontrollera att adapteraxeln är korrekt monterad och åtdragen	<input type="checkbox"/>	Röd markering inte synlig
Kontrollenhet		
Gör en okulär bedömning och titta efter yttre påverkan	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera funktionen på vrid Pot	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera stopp funktionen	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera höljet och funktionen av USB-C kontakten	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera LED display	<input type="checkbox"/>	Analog drivenhet
Infästning kontrollenhet		
Kontrollera att infästningen sitter ordentligt åtdragen	<input type="checkbox"/>	12 Nm
Kontrollera att mekanismen för att ta väck kontrollenhet fungerar	<input type="checkbox"/>	
Batteriladdare		
Gör en okulär bedömning och titta efter yttre påverkan	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera ladduttag på både drivenhet och kontrollenhet	<input type="checkbox"/>	

Rekonditionering/ förebyggande underhåll
SMOOV O10

System No.: O10 _____

Leverantör/kund: _____

Alber GmbH
Vor dem Weissen Stein 21
72461 Albstadt
Tel. +49 7432 2006-0
Fax +49 7432 2006-299

ATT GÖRA	CHECK	KOMMENTAR
Slut kontroll		
Funktionstest av hela enheten/ provkör	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att drivenhet och kontrollenhet tar laddning	<input type="checkbox"/>	Åtminstone upp till 70% kapaciteten
Rengör drivenheten	<input type="checkbox"/>	
Rengör kontrollenheten	<input type="checkbox"/>	
Rengör batteriladdaren och laddkontakten	<input type="checkbox"/>	Med en torr trasa
Dokumentation		
Ersätt eventuell etiketten för underhåll	<input type="checkbox"/>	Skriv in när den skall in nästa gang för underhåll

Underhåll som utförs på SMOOV bör endast utföras av utbildad personal.

Datum

Namn

Signatur