
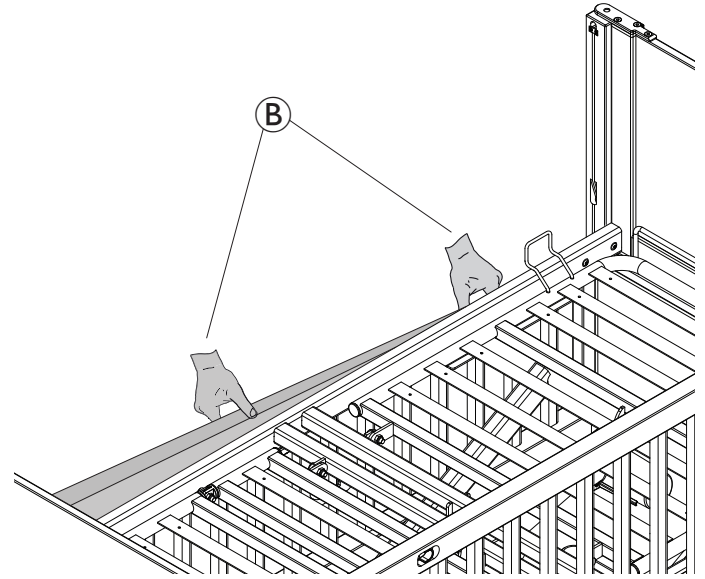


Sänka sänggrunden

Demontering

1. Höj sängen till det högsta läget.
2. Sänk sänggrunden till det lägsta läget.
3. Skjut ihop och håll de två spärrarna mot varandra och sänk sänggrunden tills spärrstoppet kommer i kontakt med madrassplattformen.

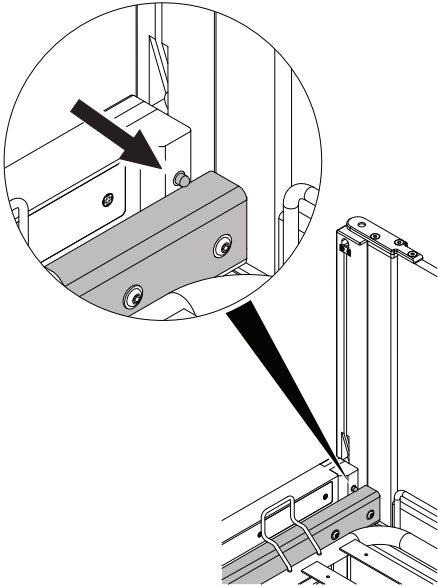

5. Följ steg 1 och 2 i monteringsavsnittet i omvänd ordning för att avlägsna stolparna i båda ändar av sängen.

4. Håll sänggrunden med en hand och tryck in spärrstoppet på en av sidorna med den andra handen (A) för att avlägsna sänggrunden (enligt B).

