



MONTERINGINSTRUKTION ELEKTRISK SITS & RYGGTILT AZALEA OCH AZALEA MAX



Sid 2 Kontrollenhet

Sid 3 Ställdon sits


Sid 4 Ställdon rygg och Batteri

Sid 5 Batteri


Sid 6-7 Uttag laddning och Kabeldragning

Monteringsanvisning elektrisk sits- och rygg tilt Azalea Max


I grönt delar som ingår.

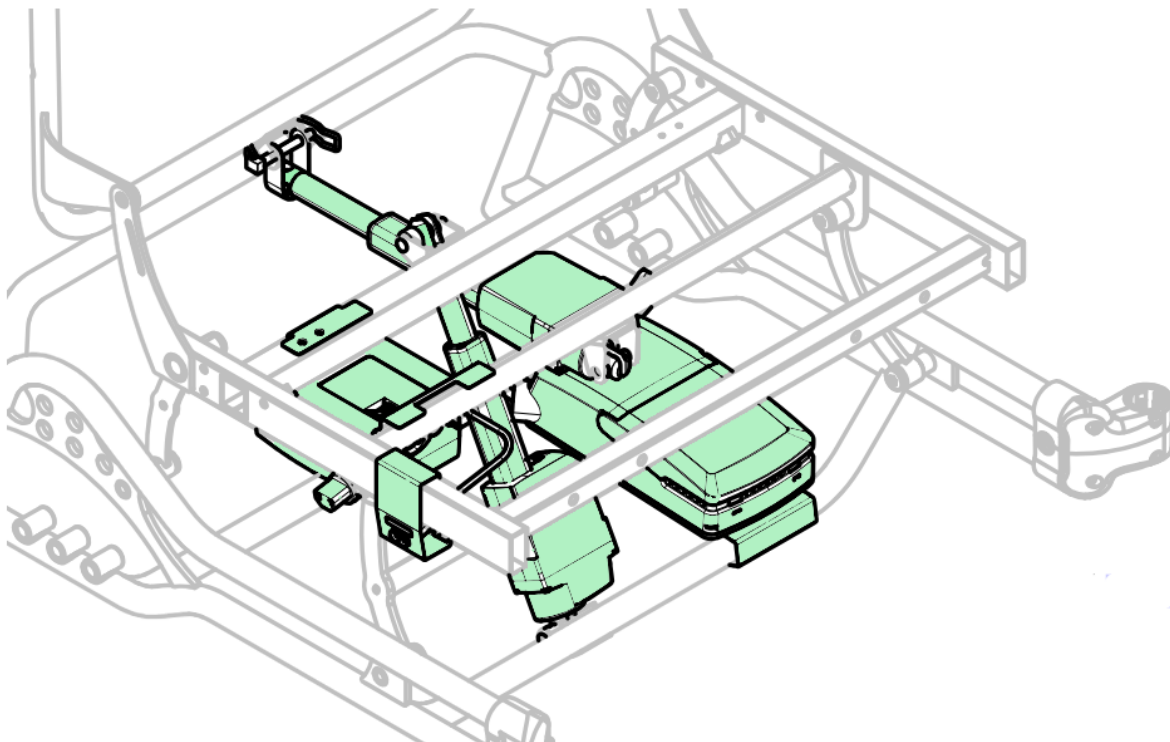


1. SP60134809 Kontrollenhet CO61 f Azalea o Azalea Max 2023-07=>

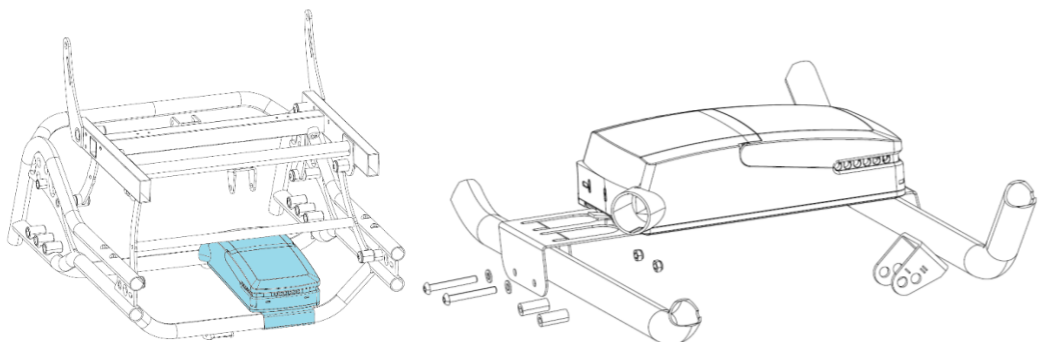

2. SP1673220 Ställdon f sits t Azalea o Azalea Max 2023-07=>

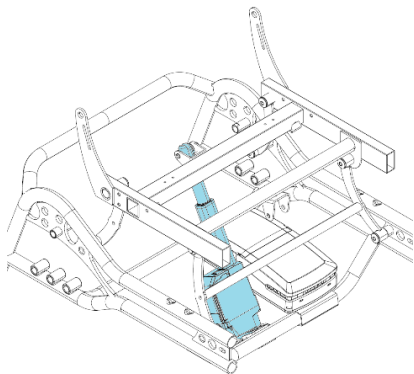

Ställdon ska monteras i läge 1, se röd pil.

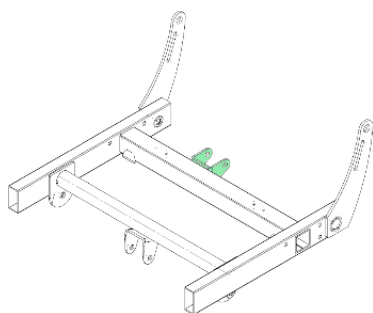


Kabeldragning






3. **SP1673223 Ställdon f rygg t Azalea Max 2023-07=>**
SP1673210 Ställdon f rygg t Azalea 2023-07=>

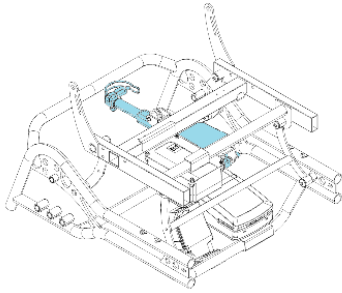




Främre fästet

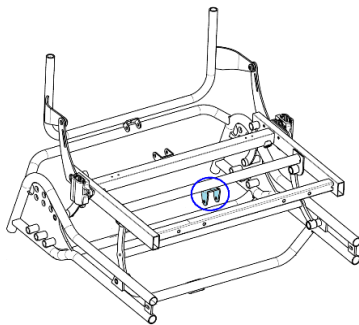

Ställdonet f rygg fästs i ryggbåge med original sprint.


4. **SP1673209** **Batteri f Azalea (OBS ej Azalea MAX)**

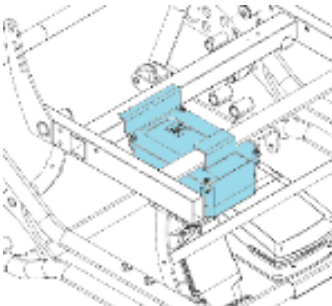

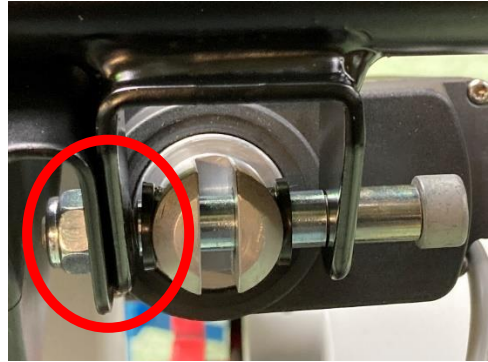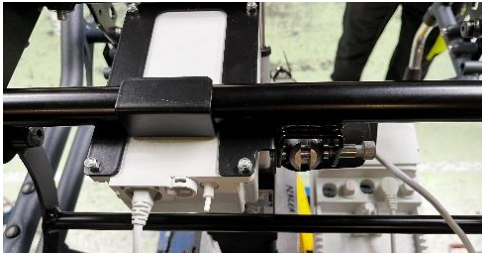


Batteriet fäst tillsammans med ställdon för rygg, röd cirkel, **OBS ej Azalea MAX.**


SP1673222 **Batteri f Azalea Max 2023-07=> (Azalea MAX)**

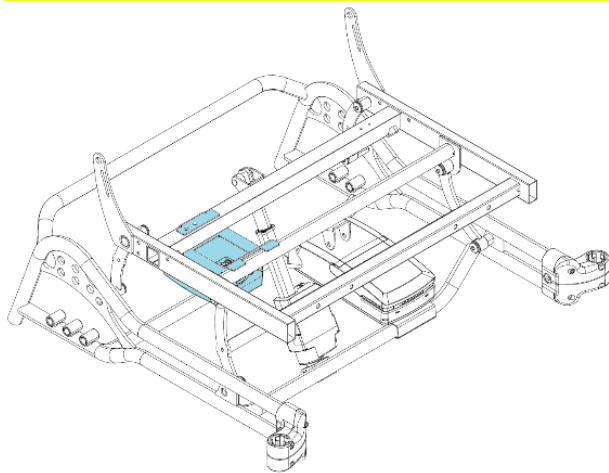


Fäst batteriet med två skruvar.

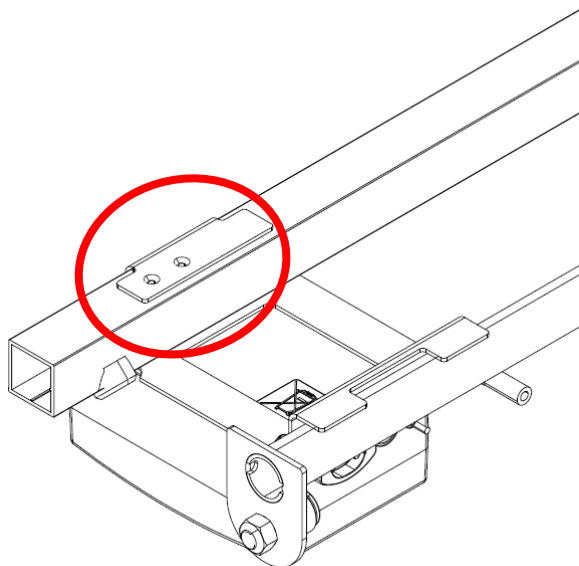

5. Kabeldragning

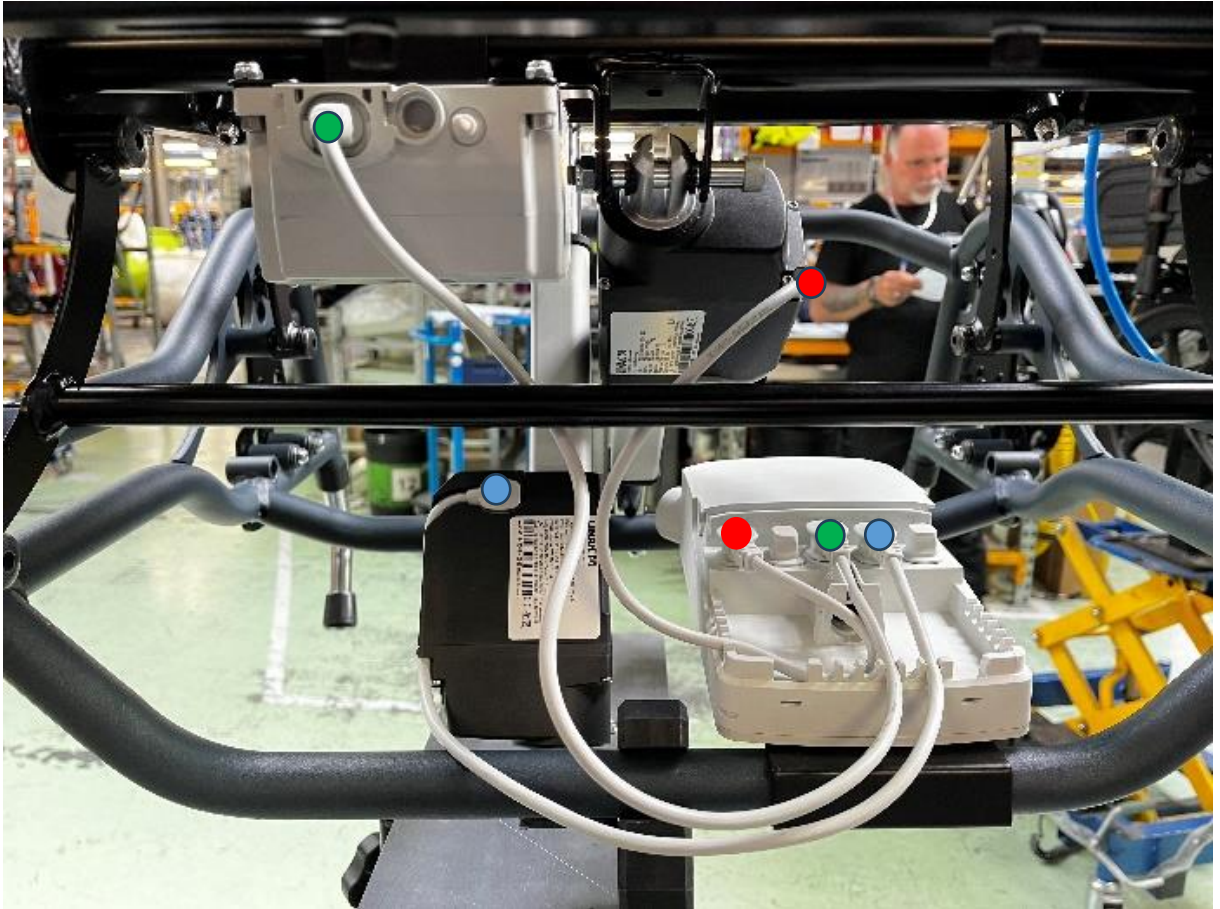


6. SP1582977 Uttag f laddning inkl sladd

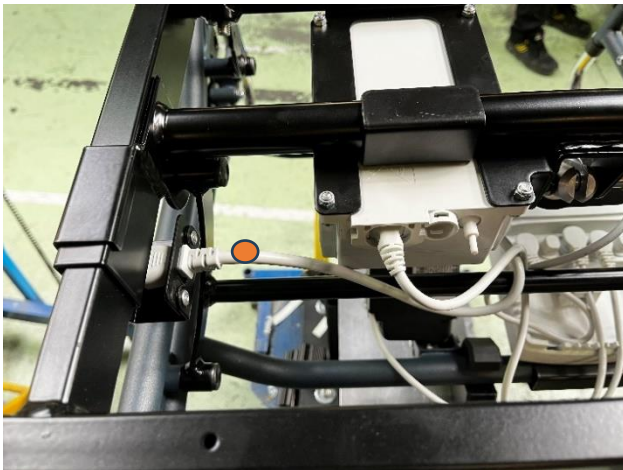



Sätt fast kablar med buntband

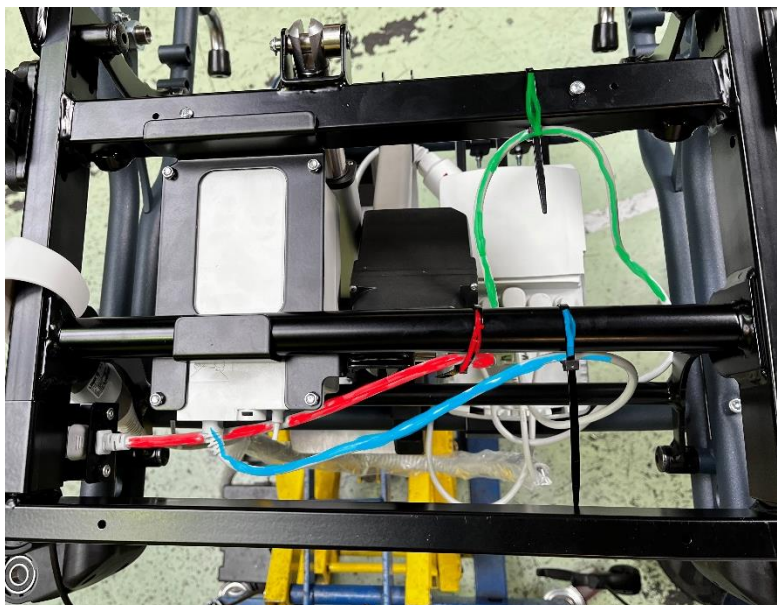

Grön: Ställdon sits (**osäker om den behövs sättas fast med buntband**)

Blå: Batteri

Röd: Kabel f ladduttag