

Montageanweisung [Mounting instruction]

Artikelnummer [Article number]: VK341358


Ulrich Alber GmbH + Co. KG
Sigmaringer Str. 100
D . 72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 . 90 96 0
Internet: www.ulrich-alber.de

alber

Rollstuhl: ETAC Swede Cross Transit
[Wheelchair:]

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

viamobil / VK 341358.00

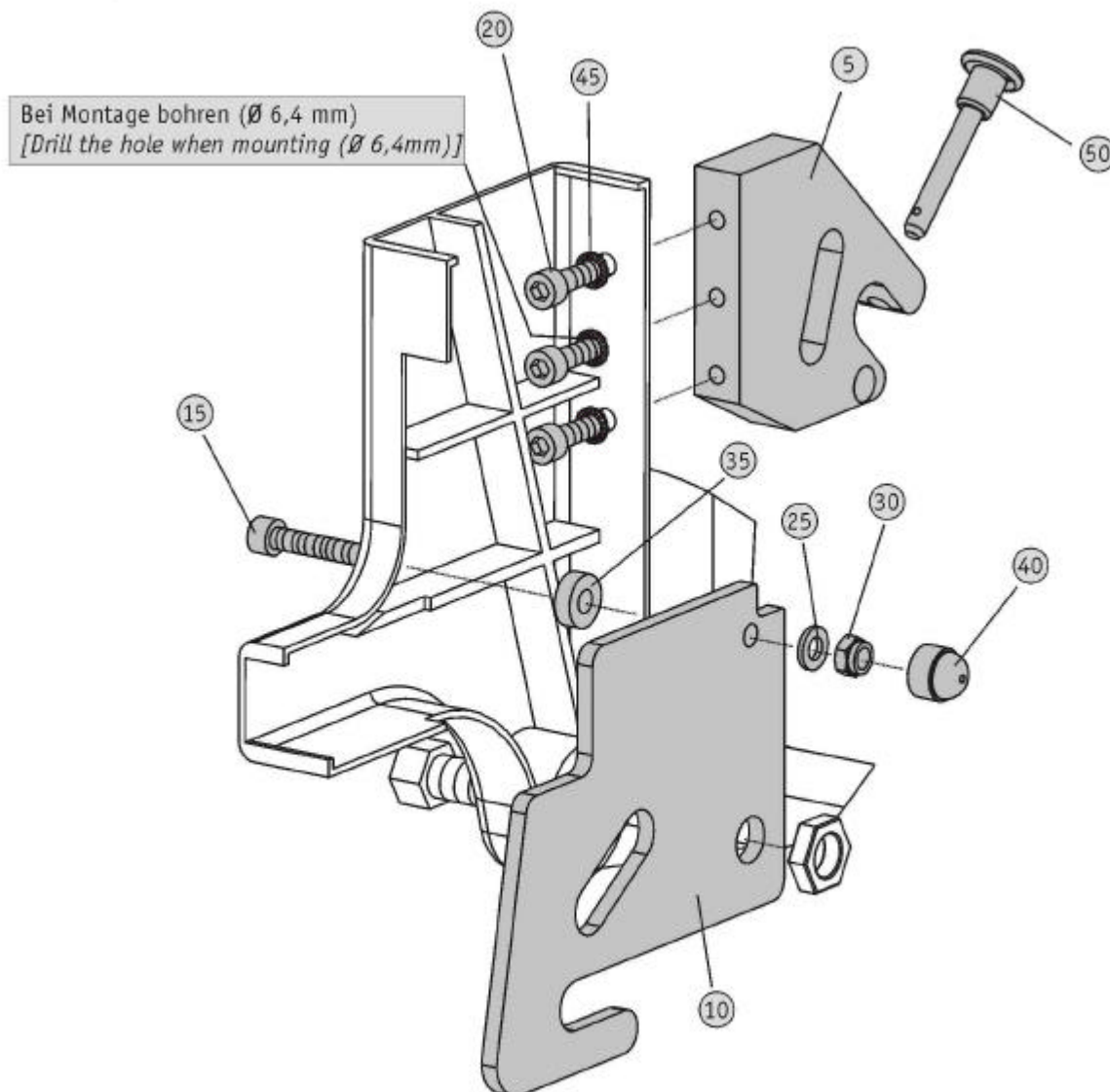

Achtung [Caution]:

- Montage ab SB40 [Mounting is possible from seat width 40 onwards]
- Montage innen [Mounting inner side]



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]



Montageanweisung [Mounting instruction]

Artikelnummer [Article number]: VK341358

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
Sigmaringer Str. 100
D . 72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 . 90 96 0
Internet: www.ulrich-alber.de



Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]	i.O. [O.K.]
5	2	Stück [Stück]	600842.0	PROD	Obere Aufnahme Etac Transit, farblos eloxiert	
10	2	Stück [Stück]	600843.0	PROD	Untere Aufnahme Etac Transit, verzinkt	
15	2	Stück [Stück]	010085.0	PROD	DIN 912 - M 6 x 55 - 8.8 vz Zylinderschraube	
20	6	Stück [Stück]	010077.0	PROD	DIN 912 - M 6 x 20 - 8.8 vz Zylinderschraube	
25	2	Stück [Stück]	010024.0	PROD	DIN 125 - A 6,4 - St vz Scheibe	
30	2	Stück [Stück]	010155.0	PROD	DIN 985 - M 6 - 8 vz Sechskantmutter	
35	2	Stück [Stück]	600043.0	061/04/17	Distanzring Alu 15x5	
40	2	Stück [Stück]	030036.0	071/04/18	Sechskantschutzkappe GPN 1000 M6, schwarz	
45	6	Stück [Stück]	010298.0	PROD	Sicherungsscheibe S - 6 - FSt Schnorr	
50	2	Stück [Stück]	090010.0	066/02/14	Quickpin Kugelsperrbolzen Nutzlänge 33 mm	

Geprüft [inspected]: _____

