

Monteringsanvisning syrgashållare lågmonterad till Azalea

Artikelnummer: **UN1680041**

Ingående del:

2st Klämmor

1st Hållare för flaska

2st Kardborreband



Montering:

Montera klämmorna på det övre tvärgående ramröret. Fäst klämmorna lätt så att man kan placera röret till syrgashållaren i klämmorna enligt bilden.

Skruva fast klämmorna ordentligt.

Hållaren placeras ska placeras under stolen mellan ramsidorna och hållaren skall peka snett uppåt, får inte vara vågrät. Se bild i slutet av dokumentet.


OBS Det kan bli en konflikt med ryggen beroende på ryggvinkling och flaskans storlek. Man kan spärra ryggvinklingen med "Låsdetalj för rygg" se bild nedan, om man vill säkerställa att det inte inträffar.



Användning:

1. Lossa kardborrebanden (A) på O²-hållarens baksida genom att dra i dem.
2. Sätt in syrgastuben (B) i hållaren.
3. Dra åt eller lossa kardborrebanden efter behov och sätt sedan ihop dem igen.

(Bilderna visar en hållare monterad på annat sätt än det som beskrivits här men justering av flaskan i hållaren görs på samma sätt.)

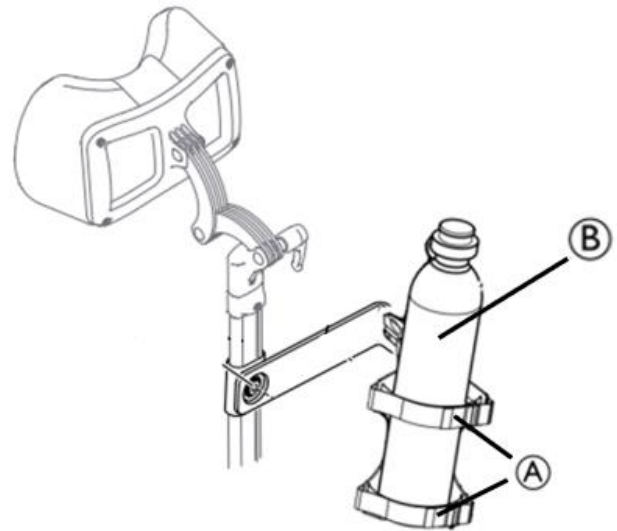

Varning



- Med syrgashållare och syrgastub som hängs på rullstolen kan medföra förhöjd tipprisk. Var uppmärksam på detta.
- Vi rekommenderar att tippskydd används.
- Risk för att syrgastuben trillar av om banden inte är åtdragna. Kontrollera att banden är ordentligt åtdragna.

Teknisk information för syrgastuber

- Max diameter: 111 mm
- Min-/maxlängd: 198 mm / 645 mm
- Min-/maxvikt: 1,3 kg / 3,6 kg

Bild nedan på syrgashållare **UN1680041** monterad på en Azalea.

