


6.6.5 Montera Hemi-armstödet med hållaren



Insexnyckel (3 mm, 4 mm, 5 mm)/fast nyckel (10)/borr med borrarbiter (Ø 6 mm)/såg/avgradare/lacksprej, svart ■■■

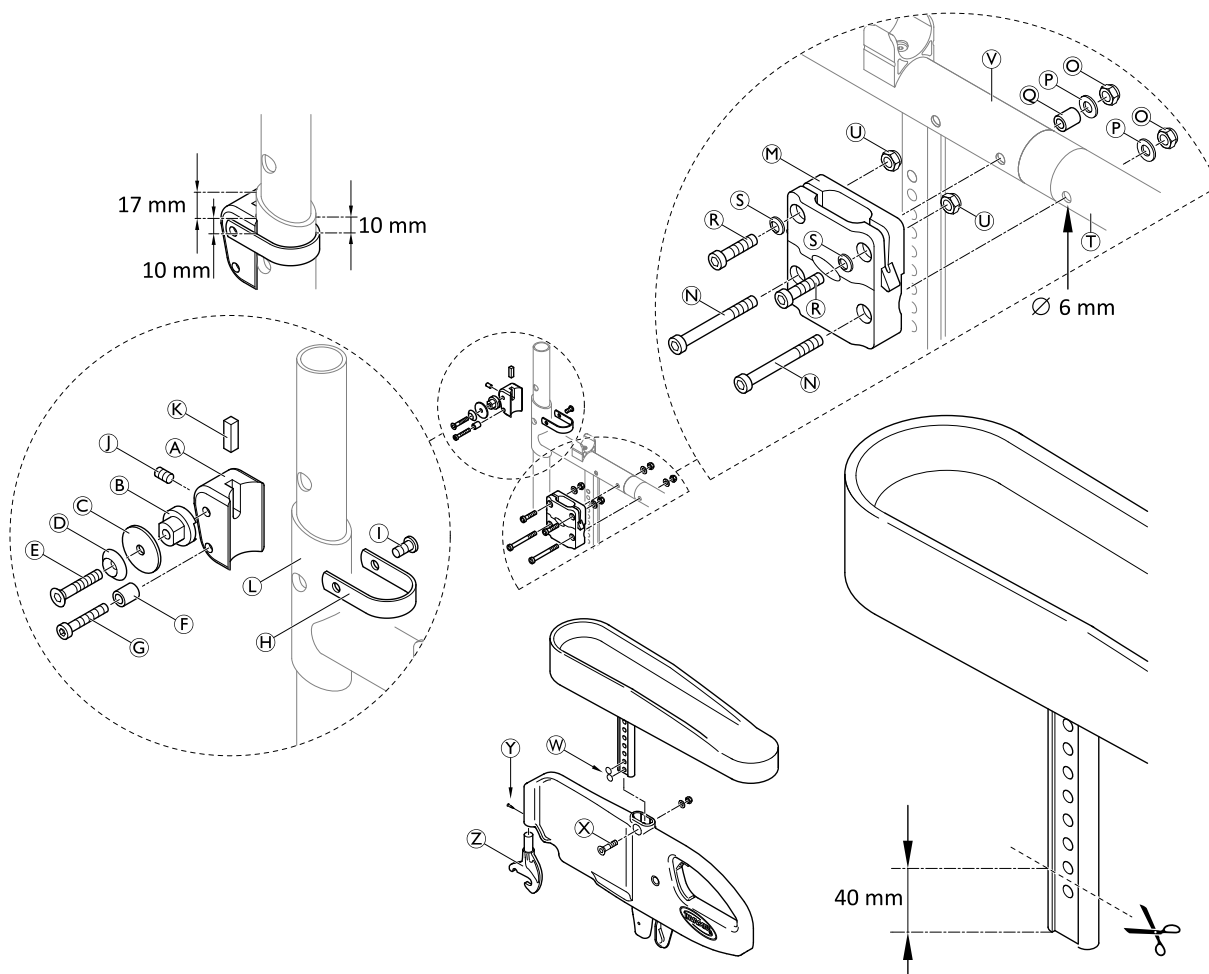

Montera ledardelen

1. Montera fästet **H** runt den bakre ramen **L** på klämblocket **A** med skruven **I**.
2. Montera ledardelen **B** på klämblocket med brickan **C**, den försänkta hylsan **D** och skruven **E**.
3. Sätt in kilen **K** ovanifrån i klämblocket och tryck in enheten mot den bakre ramen med hjälp av ställskruven **J**.



Se till att fästet är exakt horisontellt och uppfyller de angivna avstånden på 10 mm respektive 17 mm till den övre ramens kant.

4. Montera stopphylsan **F** med skruven **G**.

I / **E** / **G** = 7 Nm

Montera armstödshållaren

1. Ta bort den bakre ramens delar, se 6.1.1 Byta ut den bakre ramen, Sida 10.
2. Borra ett hål med en diameter på 6 mm genom den övre ramens anslutningsrör för montering av den främre skruven **N**.
3. Placera distanshylsan **Q** från insidan i ramens hål för den bakre skruven **N**.
4. Montera armstödshållaren **M** på ramen **V** med skruvarna **N** brickorna **P**, låsmuttrarna **Q**.
5. Montera den bakre ramens delar igen, se 6.1.1 Byta ut den bakre ramen, Sida 10.

6. Sätt in muttrarna ① i armstödshållaren och montera skruvarna ② med fjäderbrickan ③.

 Justera skruvarna ② så att armstöden aktiveras optimalt.

② = 7 Nm

Montera Hemi-armstödet på sidostödet

1. Montera krokfästet ④ på sidostödet med skruven ⑤.
2. Klipp av 40 mm från Hemi-armstödet profil.
3. Avgradera skäreggen och sprejlackera den svart.
4. Tryck in 2 plastlock ⑥ i de två nedre hålen på profilen.
5. Sätt försiktigt in Hemi-armstödet i sidostödet och fäst i profilernas andra hål ovanifrån med skruv, bricka och mutter ⑦.

⑦ = 4 Nm

 För att öka avståndet mellan hjulen måste dessutom en annan adapterhylsa, som monteras från insidan, installeras.

6.6.6 Montera Küschall-armstödet

Montera armstödshårdvaran



Insexnyckel (3 mm, 4 mm, 5 mm)/hylsnyckel (10)




1. Sätt in muttrarna ③ och skruvarna ② i de övre hålen på armstödshållaren ① och dra försiktigt åt dem. Kläm inte hållaren.
2. Montera armstödshållaren ① på det bakre ramhålet ④ med skruven ⑤, hylsan ⑥, brickan och muttern ⑦.
3. Borra hål ⑧ med en diameter på 6 mm genom den främre ramen genom att föra in borrarbiten genom det fria hålet på den förmonterade armstödshållaren ①.
4. Sätt i skruven ⑨ och dra åt med bricka och mutter ⑩.
5. Smörj stiftet ⑪ och sätt in det med fjädern ⑫ i det inre hålet i klämdelen ⑬ och placera det runt den förstärkta delen ⑭ på den bakre ramen.
6. Placera den matchande klämdelen ⑮ runt den bakre ramen och fäst den inriktad med brickorna och skruvarna ⑯.


⑦ = 7 Nm

⑩ = 7 Nm

⑯ = 4 Nm

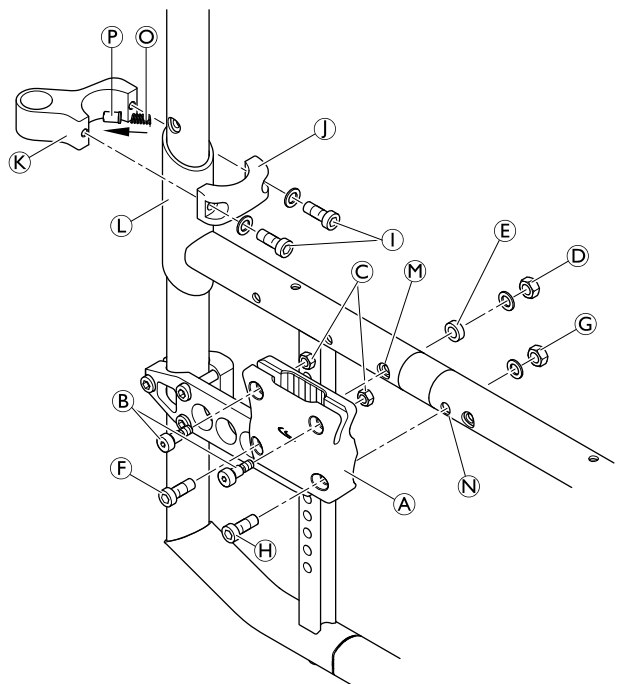

Montera/ta bort armstöd, T-armstödsdyna och klädsel

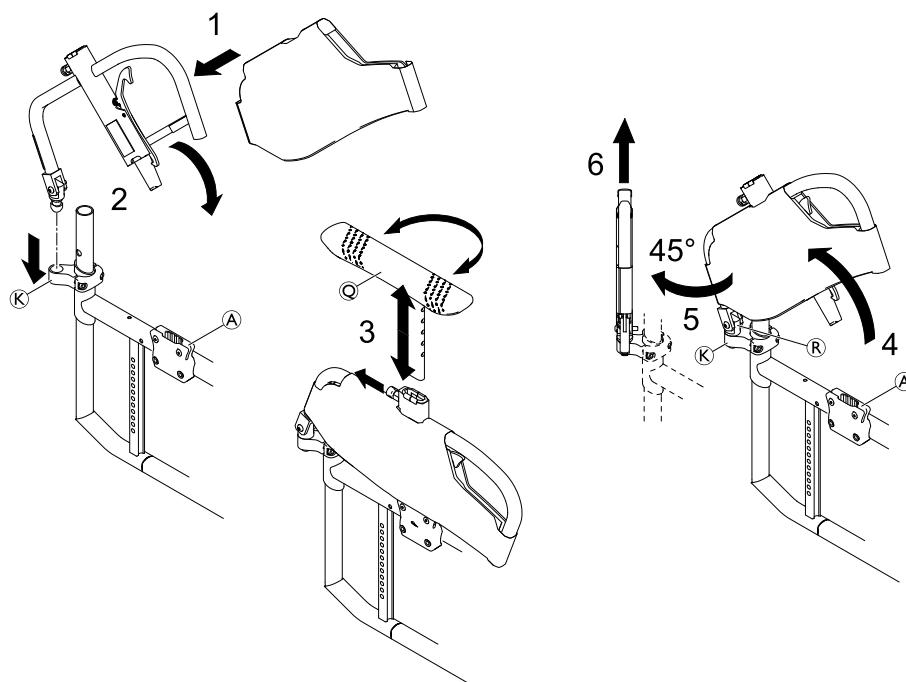


Montering

1. Montera armstödsskyddet på armstödsenheten.
2. Sätt in armstödsenheten i leden (K) och vrid den nedåt så att den hakar i armstödshållaren (A).
3. Montera T-armstödsdynan © på armstödsenheten.

Borttagning

1. Ta bort T-armstödsdynan från armstöd enheten.
2. Vrid armstödsenheten uppåt ut ur armstödshållaren (A).

 På baksidan av ledstiftet (R) finns ett gängat hål med en M5 stoppskruv (S) för att definiera stoppet för armstödsenheten när den vrids bakåt. Justera stoppskruven efter behov.

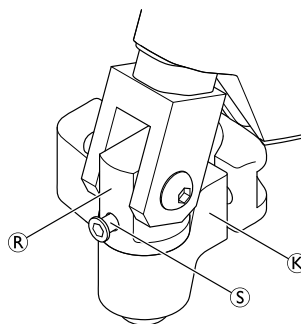

3. Vrid armstödet 45° utåt.
4. Lyft ut armstödsenheten ur leden (K).

6.6.7 Montera sidostödet, instickbar, steglös höjdjustering



Insexnyckel (4 mm, 5 mm)/hylsnyckel (10)



1. Fäst sidofästet ③ med skruvarna ① och ②.
2. För in sidostödet i fästelementet.


Justera höjden

1. Lossa skruvstiftet ④ lite lätt på justeringsplattan ⑤ och skjut det längs armstödsfästet tills armstödet är i önskad höjd.
2. Dra åt skruvstiftet ④ igen.

① = 7 Nm

② = 7 Nm

④ = handkraft

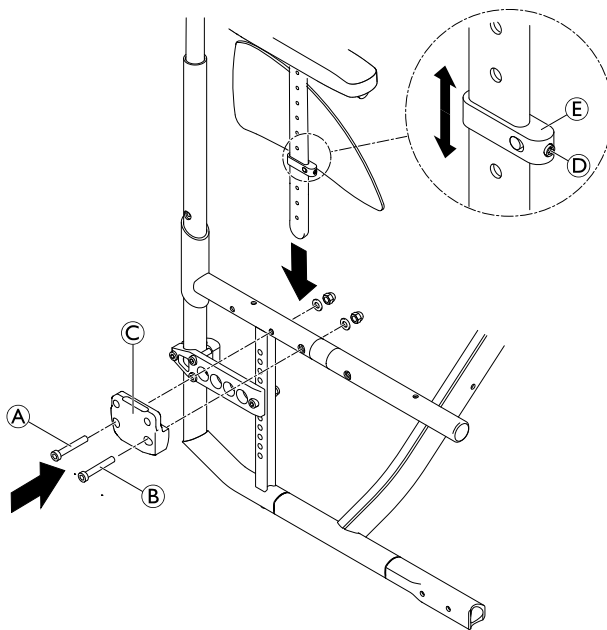

6.6.8 Montera det rörformade armstödet (vridbart)



Insexnyckel (4 mm, 5 mm)



1. Montera de bakre fästpunkterna ① och ② runt ramens rör ③ med hjälp av skruvar och brickor ④.
2. Sätt in armstödsröret ⑥ och ställ in det på önskad höjd.
3. Fäst armstödsröret i fästet genom att dra åt skruvarna med brickorna ⑤.

④ = 7 Nm

⑤ = 4 Nm

