

Invacare® | **Antidecubitus StairWay**



Trusted Solutions, Passionate People



## VÄGLEDNING - att välja madrass



- Förebyggande hos brukare med hög risk att utveckla trycksår.
- Brukare med trycksår kategori 3-4 eller massiva sår kategori 2.
- Brukare med ständigt återkommande trycksår.




- Förebyggande hos brukare med medelhög risk att utveckla trycksår.
- Brukare med trycksår i kategori 1-2.



- Förebyggande hos brukare med låg risk att utveckla trycksår.
- Brukare med trycksår i kategori 1-2.



- Brukare med högre krav på liggkomfort.
- Ingen risk att utveckla trycksår.

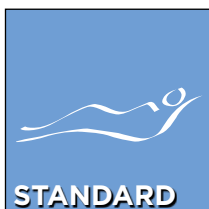

- Brukare som är i behov av en vanlig standard madrass.
- Ingen risk att utveckla trycksår.

## INVACARE -EN TOTALLEVERANTOR

Trycksår uppkommer vid långvarig inaktivitet eller belastning och är ett stort och kostsamt problem som berör de allra flesta som arbetar inom vården och för patienten innebär det stort lidande.


Har man en gång haft ett trycksår och med behandling fått det att läka kommer ärrvävnaden efter såret alltid att vara extra känslig och patienten löper därmed risk att få nya sår. Tänk på att de allra flesta trycksår kan förebyggas med rätt insats vid rätt tidpunkt

Vi får ofta höra att det finns en mängd olika madrasser på marknaden och detta gör det svårt att hitta rätt madrass till rätt brukare. För att det ska vara enkelt att välja rätt underlag så har vi valt att dela in våra madrasser i olika grupperingar.

Med *Invacare Stairway Antidecubitus* är det enkelt att välja rätt madrass till varje brukare. Invacare levererar idag ett komplett madrass-sortiment för att täcka de flesta behoven inom tryckavlastning. **Stairway Antidecubitus** är framtaget med hänsyn till tryckavlastning, skjuv, friktion och komfort.


När det gäller förebyggande av trycksår indelas brukarna i olika riskgrupper: Riskvärdering görs med hjälp av en riskvärderingsskala, exempelvis Norton eller Braden.

*Invacare Stairway Antidecubitus* beskriver vår rekommendation vid val av madrass i relation till riskgrupper: *Invacare Stairway Antidecubitus* kan också ge vägledning vid val av madrass om brukaren redan har ett trycksår.

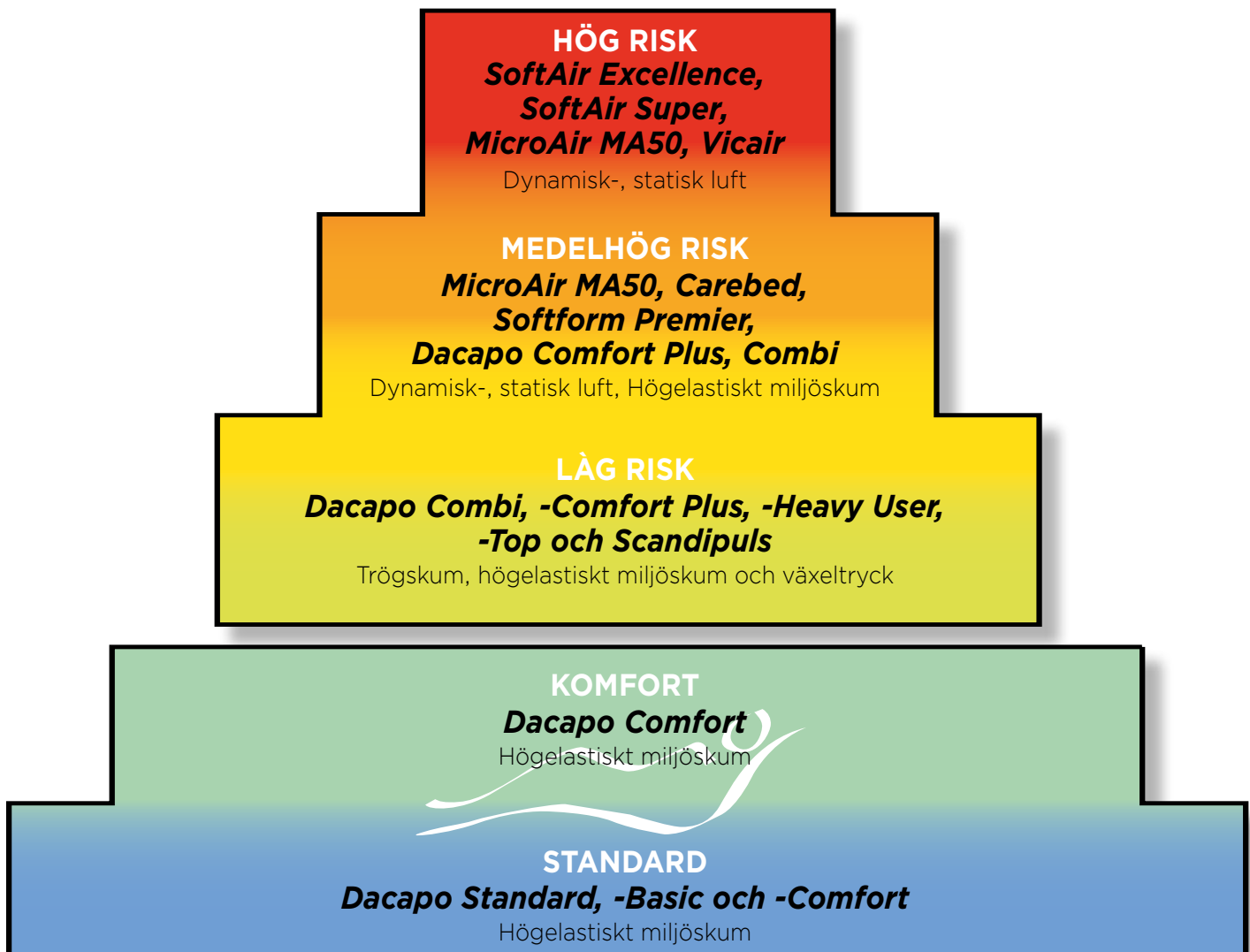


Invacare **Dacapo Skummadrasser: kallskum, miljöskum, trögskum och växeltryck**

**Dacapo Standard och Basic**

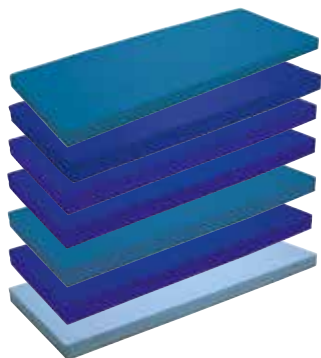

Basmadrasser som uppfyller de mest basala kraven på en god liggkomfort. Består av en kallskumskärna med god bärighet. Två alternativ av överdrag finns: bomull och hygien.

**Dacapo Comfort**

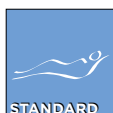

**Dacapo Comfort** är en komfortmadrass som väl uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Madrassen består av miljöskum som är miljömärkt med den Europeiska blomman.

Skumkärnan är av miljöskum vars volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Denna madrass är uppbyggd av olika stora nyckelhålsskurna fyrkanter för att ge bättre stöd mot kroppens olika delar.

Två alternativ av överdrag finns: bomull och hygien. Madrassen är 12 cm hög.

**Dacapo Combi, Top**



Förebyggande madrasser med trögskum / viscoelastiskt skum som tillåter brukaren att sjunka ner i madrassen och där igenom fördela trycket på en större yta. Levereras som kombinationsmadrass, med en del kallskum, till det viscoelastiska skummet eller som toppmadrass. Levereras med luftgenomsläppligt inkontinensöverdrag.

**Dacapo Comfort Plus**



**Dacapo Comfort Plus** är en tryckavlastande/ förebyggande basmadrass som uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort.

Madrassen består av miljöskum som är miljömärkt med den Europeiska blomman. Denna madrass är uppbyggd av olika stora nyckelhålsskurna fyrkanter för att ge bättre stöd mot kroppens olika delar. Skummet har en god återhämtning och dess unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Konceptet erbjuder en dynamisk kombination av komfort, stöd och stabilitet samtidigt som skjuv och friktionskrafter minimeras effektivt med hänsesende på den nyckelhålsskurna utformningen. Med hygienöverdrag. Madrassen är 14 cm hög.


**Softform Premier**



**Förebyggande av trycksår**

Invacare **Softform Premier** är en tvådelad madrass, bestående av en yttre ram med ett inlägg av profilskuret skum, som är individuellt flexibelt. Profileringen är dessutom varierande. Under sätesdelen är profilerna större och nyckelhålsskurna. Detta gör hela liggytan effektivt tryckfördelande. Levereras med luftgenomsläppligt inkontinensöverdrag.

**Dacapo Heavy User**

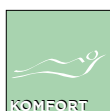

**Dacapo Heavy User** är uppbyggd av tre skikt för att skapa en ökad stabilitet, komfort och tryckavlastning.

Det undre skiktet består av kallskum med mycket hög bärighet som upprätthåller madrassens stabilitet och motverkar att brukaren "ligger igenom". Det mittersta skiktet består också av kallskum, men av en mjukare sort, som ger en god komfort. Det översta skiktet består av viscoelastiskt skum som ger extra god tryckavlastning och komfort. Passar brukare som har låg risk att utveckla trycksår.

Invacare **Scandi Puls, växeltryck**

**Scandi Puls**



**Scandi Puls** är konstruerad med två av varandra oberoende luftkanalsystem som med hjälp av en kompressor växelvis pumpas upp och tömmas.

Denna växling sker var tredje minut. Madrassen levereras med en nästan ljudlös kompressor, och ett madrassmaterial som är motståndskraftigt mot vätska. En lätt strukturerad yta motverkar nedglidning.

Invacare **CareBed, statisk luft**

**CareBed**



Invacare **Carebed** är en statisk luftmadrass som ger effektiv tryckavlastning för att förebygga och behandla trycksår. Madrassen är enkel att använda med automatisk individuell inställning som säkrar funktionen och underlättar hanteringen för vårdpersonalen. Madrassen följer sängens inställningar och är mycket stabil och komfortabel. Finns med påfyllnadspump alternativt underhållspump.



## Invacare **Vicair Academy**, statisk inkapslad luft



Invacare **Vicair Academy** madrassen ger en god tryckfördelning och stöd till kroppen hos brukare med hög risk att utveckla trycksår utan någon elektrisk utrustning. Med lågfriktions luftceller formar madrassen sig kontinuerligt efter kroppens konturer och rörelser. Konceptet erbjuder en optimal kombination av tryckavlastning, stöd och stabilitet samtidigt som skjuv och friktionskrafterna minimeras effektivt.

## Invacare **MicroAir MA50** Dynamiskt/ alternerande tryck



**MicroAir MA50CE** består av 16 alternerande luftfyllda celler som tillsammans bildar en komfortabel liggyta för brukaren. Cellerna är tillverkade av PU-behandlad nylon av hög kvalitet. Cyklerna kan ställas in med alternering mellan 5, 10, 16 eller 20 minuters intervall. Avlastningen utgår från principen en upp, en ner. Överdraget är tillverkat utan bromerande eller halogena ämnen och är vätsketätt med ångandning. Överdraget är dessutom utrustat med blixtlås på alla fyra sidor för optimal hygien och för att enkelt kunna tas av i samband med rengöring.

## Invacare **SoftAIR**, växeltrycksmadrasser

### SoftAIR Super



**SoftAir Super** är en fullhöjds madrass som är uppbyggd av 21 celler (cell-in-cell) som inkluderar 3 statiska celler i huvudsektionen. Luften i cellerna anpassas alternativt i faser om 12 minuter utifrån cykler med 2 upp och 1 ner. Överdraget är elastiskt och ångandans och alla sömmar är svetsade.

### SoftAIR Excellence



**SoftAir Excellence** är en fullhöjds madrass som är uppbyggd av 19 celler (cell-in-cell) som inkluderar 3 statiska celler i huvudsektionen samt stabiliserande luftfyllda sidoceller som gör i- och urstigning säker för brukaren. De stabiliserande luftfyllda sidocellerna ger även en effektiv säkerhet för brukaren vid rörelse i sängen. **SoftAir Excellence** erbjuder även en självständig hälzon bestående av 5 mindre celler med lågt tryck för individuell avlastning av detta känsliga område.

## INVACARE - EN TOTALLEVERANTÖR

Invacare erbjuder nu ett totalkoncept av madrasser för förebyggande och vid avlastning/ behandling av trycksår.

Vi har utvecklat och satt samman ett komplett madrassprogram så att vi kan täcka de allra flesta behov inom tryckavlastning. I sortimentet har vi särskilt lagt vikt på att kunna erbjuda olika valmöjligheter i den förebyggande delen av **Stairway Antidecubitus** med **Trycksår skall förutses - inte ses**.

Med **Invacare Stairway Antidecubitus** erbjuder vi ett enkelt redskap som visar Invacares rekommendationer vid val av madrass i förhållande till de olika riskgrupperna.

Hög kunskap och snabba insatser för alla berörda grupper är helt avgörande faktorer vid förebyggande av trycksår.

Vi arrangerar även fördjupade utbildningar i ämnet Antidecubitus.

Vi har även en väl utbyggd serviceorganisation med erfarna servicetekniker som bl a sköter service av våra madrasser.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Invacare AB  
Box 66  
163 91 Spånga  
Sverige  
Tel: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2016 Invacare International Säril  
Alla rättigheter är reserverade för  
Invacare.

Stairway - SE - 04/2016



**Yes, you can.®**