



Tryckavlastning baserad på statisk luft

Invacare **Carebed** är en statisk luftmadrass som ger effektiv tryckavlastning för att förebygga och behandla trycksår.

Madrassen är enkel att använda med automatisk individuell inställning som säkrar funktionen och underlättar hanteringen för vårdpersonalen.

Madrassen följer sängens inställningar och är mycket stabil och komfortabel.




Tryckavlastning baserad på statisk luft

Det är många faktorer som bör beaktas när det gäller utvecklingen av trycksår. En avgörande faktor är underlagets tryck mot kroppen. Ett sätt att lösa problemet är att låta kroppen sjunka ned i underlaget. Trycket fördelas på en större yta och blodcirkulationen bibehålls. Vid ett tryck som överstiger kapillärtrycket blir blodtillförseln otillräcklig och trycksår kan utvecklas. **Invacare Carebed** uppfyller kraven på tryckfördelning mycket bra.

Funktion

Carebed består av mer än 300 separata luftceller. Luften transporteras och fördelas mellan cellerna och anpassar sig efter patientens kroppsform och vikt. Luft pumpas i under ca 1 minut och ventilen sluter sig vid rätt luftmängd. Luften som pumpas i är dessutom tempererad (27 °), så att kroppen inte förlorar energi på att "värma upp madrassen".

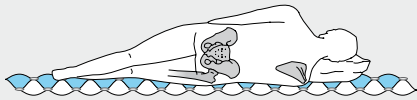

Egenskaper



Folie

Folien är följsam, lätt att rengöra och rekonditionera.



Undermadrass

Ett enkelt sätt att få ned den totala madrasshöjden. 50 mm skum inklusive hygienöverdrag.



Underhållspump



Pump

Fylls med tempererad luft (27°).


Carebed är kliniskt testad vid Department of Health, England. **Carebed** Operationsmadrass är testad på Esbjergs sjukhus i Danmark med mycket gott resultat.

Tekniska data


Carebed



Storlek std:
900 mm
Op: 480 mm

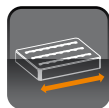

Storlek std:
1900 mm
Op: 1030/1700/
2000 mm

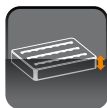

90 mm



Madrassens
vikt std: 3,8 kg
Pumpens vikt: 1,6 kg



Max brukarvikt:
150 kg

Invacare Carebed Inkontinensöverdrag

- 100% vätsketätt
- Polyester med polyuretan
- Luftgenomsläppligt
- Töjbart i två riktningar
- Tvättbart 95°

Material:
PVC utan tungmetaller och syntetiskt gummi.

Madrassen kan återvinnas.
Nätspänning: 220 V

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2016 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Carebed- SE - 02/2016



Yes, you can.®