

Bruksanvisning

Carebed – Carebed OP

Installering

1. Carebed läggs utan luft på sängens ordinarie madrass.
2. Lägg på ett lakan, stretchlakan är bäst.
3. Patienten läggs på Carebed.
4. Skruva av den gröna korken och kontrollera att den röda ventilen är på plats.
5. Carebed fylls med luft från specialpumpen i 1 minut.
6. Skruva på den gröna korken till den bottenar plus ca ¼ varv till.
7. Fäst hörnstropparna runt sängmadrassen.




Om Carebed madrassen är fabriksny!

1. Efterfyll alltid Carebed under ca **30 sekunder dagen efter installering**.
2. Kontrollera med jämna mellanrum att det finns luft i madrassen. Fyll på ny luft vid behov.



För brukare tyngre än 125 kg och lättare än ca 40 kg - (Max brukarvikt är 150 kg)

1. Fyll Carebed med luft **innan** patienten läggs på madrassen.
2. Lägg patienten på Carebed.
3. Håll en flat hand under Carebed och släpp ut luft tills avståndet mellan sängens ordinarie madrass och patientens bäcken är 1-2 cm. Carebed är nu anpassad till brukaren.

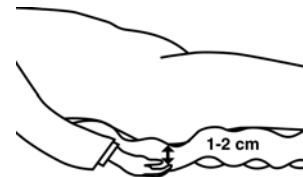


Tillbehör

- Patienter som svettas mycket kan utrustas med en fuktabsorberande övermadrass. Art nr: 1423594.




Korrekt rengöring

Normal rengöring: Tvätta av med såpvatten.
Desinfektion av förorenad madrass, blodstänk (hepatit B)
- DAX Ytdesinfektion Plus
Man kan **inte** autoklavera Carebed madrasser då materialet smälter vid 120° Celsius.

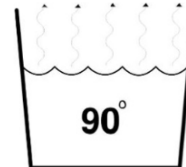

För att finna läckage

Fyll Carebed maximalt med pumpen och skruva på korken.
Test 1. Håll vatten i fördjupningen runt korken och titta efter luftbubblor.
Test 2. Håll Carebed under vatten i t ex ett kar och titta efter luftbubblor.

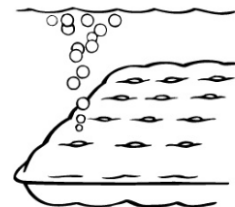

Reparation - en reparationsatts medföljer varje madrass

Skruva av den gröna korken och drag ur den röda ventilen.

1. Stickhål: Placera en droppe av klistret över hålet och låt torka under en timme.
2. Revor: Klipp en bit av plasten, aningen större än hålet och sätt klister på den. Placera laglappen över hålet och tryck tills kanterna fäster i madrassen. Sätt extra klister på kanterna och låt torka i ca 1 timma.
3. Om det händelsesvis skulle ske att en rondell släpper i svetsfogen och en större bubbla uppstår så utgör detta ingen hälsorisk för brukaren. Var god kontakta Invacare för eventuell garantiåtgärd.




Släppa ut luften

Skruva av korken och drag ur ventilen.




Innan pumpning

Sätt i ventilen och tryck ned den till stoppringen. Se till att den sitter ordentlig på plats.

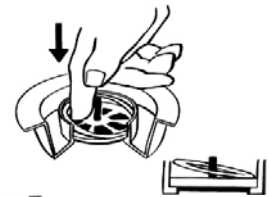

Tryckavlastning för hämlarna

Placera en tunn kudde under Carebed så att vikten av hämlarna förflyttas till vadernas hela längd. Hämlarna skall bara nudda madrassen.

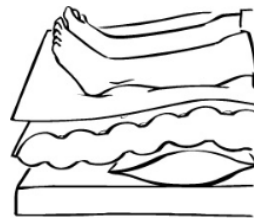

Observera!

- Carebed skall inte användas för att flytta eller lyfta brukaren i.
- Carebed skall endast fyllas med hjälp av pumpen.
- Carebed förvaras **ihoprollad**, ej vikt!
- Den bästa tryckavlastningseffekten uppnås med bara ett lakan mellan patienten och Carebed madrassen.

OBS!



Garantitid: 2 år på madrasser tillverkade före 1 september 2005, därefter är garantitiden 3 år

Carebedmadrassen har ett serienummer på den ena hörnstroppen. De 4 sista siffrorna anger produktionsvecka och år och gäller som utgångspunkt för garantitiden. Om serienumret slutar på 1801 är madrassen tillverkad under vecka 18 år 2001.

Tillverkare:

Care Product AS
Bergkrystallen 25
N-2818 Gjøvik Norge
Tel:+47 61 193941

Återförsäljare

Invacare AB
Box 66, 163 91 Spånga
Tel:08-761 7090 Fax:08-761 8108
E-post: sweden@invacare.com, www.invacare.se